

Használati útmutató

Medintim Active Erection System®



Fontos:

*Kérjük, olvassa el a használati útmutatót, mielőtt felhasználná az erekciós segédeszközt.
Tartsa be a használati útmutatót! Kérjük, nézze meg az animációt a mellékelt DVD-n.*

Használati útmutató

Erekciónak nevezzük, ha a pénisz merev. Ha az erekcióval probléma van, akkor merevedési zavarról beszélünk.

Az ACTIVE Erection System[®] olyan eszköz, amely segít a pénisz merevvé tételében. Ezért ebben a füzetben az ACTIVE Erection System[®] -et erekciós segédeszköznek is nevezzük.

Mi okozhatja az merevedési zavart?

Különböző okok vezethetnek erektilis diszfunkcióhoz (merevedési zavarhoz).

A legelterjedtebbek a cukorbetegség, pajzsmirigy betegség, máj- vagy vesebetegség, a magas vérnyomás, továbbá szív- és érrendszeri betegségek.

A prosztatata műtét gyakran merevedési zavarhoz is vezet.

A depresszió vagy kimerültség merevedési zavarokhoz is vezethet.

Az erektilis diszfunkció néha a gyógyszeres kezelés mellékhatása, pl. magas vérnyomás elleni gyógyszerek.

További lehetséges ok a dohányzás vagy túl sok alkoholfogyasztás.

Az ACTIVE Erection System[®] a következő részekből áll:

- 1 pumpafej
- 1 átlátszó henger
- 1 nagy szürke gyűrű és 1 kicsi szürke gyűrű
- 1 szürke kúp
- 4 különböző méretű leszorítógumi
- 1 síkosító
- 3 AAA elem
- 1 DVD használati útmutatóval és 1 textilzsák

Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt leszorítógumik és a síkosító eltarthatósági idejét.


Hogyan készüljön fel az alkalmazásra?

Az összes termékkel kapcsolatos ábra megtalálható ennek a füzetnek a borítólapján.

- Készítse elő az összes alkatrészt. (1. ábra)
- Nyissa ki a pumpán az elemtartót a 2. ábra szerint.
- Helyezze be a 3 elemet, ügyelve a jelölésre, a 3. ábra szerint. Óvatosan hajtsa vissza a fedelet.
- Tegye vissza a kupakot a pumpafejre. (4. ábra)
- Nyomja a pumpafejet a henger nagyobb nyílásába, a 5. ábra szerint.
- Dugja a nagy gyűrűt a henger másik oldalába. (6. ábra).
- Helyezze a kis gyűrűt a nagy gyűrűbe.
- Helyezze a kúpot a kis gyűrűbe. (7. ábra)
- Vigyen fel elegendő síkosítót a kúpra. (8. ábra)
- Helyezze a szükséges méretű leszorítógumit a kúp tetejére. Csúsztassa a leszorítógumit a kúp fölé a kis gyűrűre. Most vegye le a kúpot. (9. ábra)
- Most az erekciós segédeszköz készen áll a használatra.

Medintim Active Erection System®

tartozékok és alkalmazás

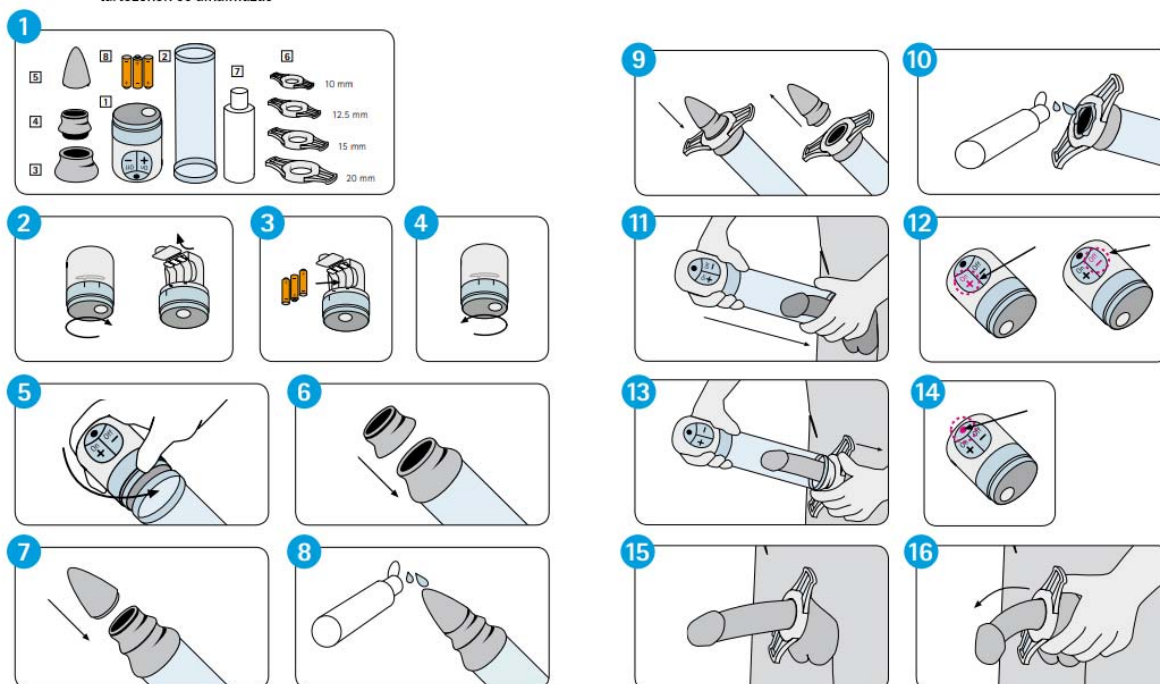

Hogyan kell használni az erekciós segédeszközt?

Az erekciós segédeszközt kizárólag személyes használatra szánják. Ne adja tovább harmadik feleknek, és nem is használja másokkal közösen.

- Távolítsa el a szőrzetet közvetlenül a péniszről és a pénisz töve körül.
- A készüléknek szorosan illeszkednie kell a bőrhöz (a vákuum létrehozása érdekében).
- Vigyen fel síkosítót a gyűrű peremére. (10. ábra)
- Helyezze a péniszt a gyűrűn keresztül a hengerbe. (11. ábra)
- Nyomja szorosan a készüléket a testéhez.
- Tartsa lenyomva a pumpafejen levő (+) gombot. (12. ábra)
- A motor elindul és kiszívja a levegőt a hengerből.
- Ha ismét megnyomja a (+) „be” gombot, a szívás erősebbé válik.
- A pumpán 4 szívóerősség állítható.
- Amikor megnyomja a szivattyú (-) „ki” gombját, a pumpálás gyengébb lesz. (12. ábra)
- Ha nyomva tartja a (-) gombot néhány másodpercig a készülék kikapcsol. (12. ábra)

Észleli az erekciót?

- Csúsztassa a leszorítógumit a gyűrűről a merev péniszre.
- Egészen a pénisz tövéig húzza fel. (13. ábra)
- A pumpafejen levő „levegő” gombot egy pont jelöli. (14. ábra)
- Amikor megnyomja a „levegő” gombot, a levegő bejut a hengerbe és csökkenti a vákuumot).
- Így könnyen eltávolíthatja az erekciós segédeszközt.
- A pénisz leszorítógumi a péniszt mereven tartja. (15. ábra)
- Most már lehet szexelni.

Fontos: Soha ne hagyja a leszorítógumit a péniszen 30 percnél hosszabb ideig. Ne elaludjon el a pénisz gyűrűvel!

Medintim Active Erection System® használati útmutató



Szex után:

- Röviden húzza szét a szorítógumit a szárnyaknál fogva.
- Várjon, amíg a vér visszafolyik a péniszből a testbe.
- Ezután húzza le a péniszről. (16. ábra)
- Az erekciós segédeszköz használatakor orgazmuskor nem lesz látható ejakuláció (csúcspont), mert a leszorítógumi megtartja a spermát (ejakulátum) a péniszben.
- Miután eltávolította a gumit, a sperma kifolyik a péniszből.
- A sperma ideiglenes visszatartása a péniszben nem káros.
- Az erekciós segédeszköz használata után tisztítsa meg az eszközt és tartozékait a „Hogyan tisztítsuk meg az erekciós segédeszközt?” című szakaszban leírtak szerint.
- Szárítsa meg az alkatrészeket.
- Helyezze vissza az alkatrészeket a zsákba, és tartsa az erekciós segédeszközt gyermekektől elzárva.

Hogyan működik az erekciós segéd?

A pumpa kiszívja a hengerből a pénisz körüli levegőt. Ez negatív nyomást (vákuumot) hoz létre.

Ennek következtében a pénisz erek megtöltődnek vérrel és a pénisz megmerevedik. Mivel a henger átlátszó, láthatja, hogy a merevedés elég erős-e.

A legtöbb esetben elegendő az 1-2 percre tartó pumpálás az erekció eléréséhez.

Megjegyzések az alkalmazáshoz

Az erekciós segédeszköz alkalmazása egyszerű.

Ennek ellenére jobb, ha az erekciós segédeszközt kezdetben egyedül és sietség nélkül próbálja meg.

Ezután megmutathatja partnerének is. Ha mindketten tudják, hogyan kell helyesen alkalmazni az erekciós segédeszközt, újra élvezhetik a szexet.

Még idősebb korban is, betegségben vagy testi korlátok között is.

Hogyan válassza ki a megfelelő leszorítógumit?

Annak érdekében, hogy az erekció a lehető leghosszabb ideig fennmaradjon, ki kell választania a megfelelő méretű leszorítógumit.

Ha a gumigyűrű túl nagy, a pénisz nem marad sokáig merev.

Ha túl szoros, fájdalmat okozhat. Fájdalom esetén vegye le a leszorítógumit, és próbáljon ki egy nagyobbat.

Ha először használja az erekciós segédeszközt, akkor a legnagyobb gumival kezdjen. Ha ez a méret túl nagy, próbáljon ki egy kisebbet, amíg meg nem találja a megfelelőt.

Az erekciós segédeszköz csomagja 2 szürke gyűrűt tartalmaz.

A kisebb enyhén szűkebb, a nagyobb kissé tágabb. Ha a kisebb gyűrű túl szűk, csak a nagyobbat használja. A két gyűrű minden leszorító gyűrűre alkalmas. Így nem számít, hogy melyik zsugorítógyűrűt használja.

Ha mindkét gyűrű túl szűk, akkor a leszorítógumit közvetlenül a hengerre is csúsztathatja.

Az erekciós segédeszköz csomagja egy kúpot is tartalmaz. Segít abban, hogy könnyebben csúsztassa a leszorítógumit a gyűrűkre.

Alternatív megoldásként a leszorítógumit a kúp használata nélkül kézzel is felrakhatja a gyűrűkre. Csak a mellékelt leszorítógumikat használja. Ezek egy idő után elhasználódnak és ki kell cserélnie. Megrendelhetők a service@medintim.de webhelyről

Honnak tudom, hogy az elemek lemerültek?

Amikor az erekciós segédprogram motorja be van kapcsolva világít, 2 LED világít.

Ha a LED-ek villognak, az elemek lemerültek és cserélni kell.

Csak 1,5 V-os, AAA méretű alkáli elemeket használjon. Ne használjon újratölthető elemeket.

Mindig 3 azonos és új elemet használjon.

Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

Az elemek megfelelő cseréjét a „**Hogyan készüljön fel az alkalmazásra?**” szakaszban mutatjuk be.

Ne cserélje az elemeket az eszköz testen való alkalmazása közben.

Egyéb figyelmeztetések

Soha ne használja ezt az erekciós segédeszközt, ha alkoholt vagy drogot fogyasztott.

Ne használja az erekciós segédeszközt, ha nem működik megfelelően.

Ne használja az erekciós segédeszközt, ha az láthatóan sérült.

Mindkét esetben kérjük, küldje az erekciós segédeszközt közvetlenül a gyártónak, a KESSEL medintim GmbH-nak.

A jótállási időszak alatt a javítás ingyenes. Ha az eszköz nem működik, vagy megsérült, mert helytelenül működtette, akkor mindig meg kell fizetnie a javításokat.

Ha nem Németországban él, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahonnan vásárolta az erekciós segédeszközt.

Csak olyan síkosító anyagokat használjon, amelyek könnyen lemoshatók vízzel.

Van kérdése vagy segítségre van szüksége? Nyugodtan hívja ezt a számot: +49 (0) 6105 20 37 20 vagy küldjön e-mailt a következő címre: service@medintim.de

Milyen mellékhatásai lehetnek az erekciós segédeszköz használatának?

Szív-érrendszeri betegségben szenved?

- Beszéljen orvosával vagy egészségügyi szakemberrel, mielőtt először használja az erekciós segédeszközt.
- A következő mellékhatások lehetségesek:
- A pénisz alján vagy tetején véraláfutás (hematoma) fordulhat elő.
- Időnként enyhe szöveti sérülés is lehet, amikor hosszú ideig nem volt merevedés. Ez azonban nem veszélyes.
- Minden alkatrészt teszteltünk, de a kontakt allergiák nem zárhatók ki.

Mikor nem lehet használni az erekciós segédeszközt?

Ne használja az erekciós segédeszközt, ha az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

- A vörösvérsejteket érintő betegségek, pl. sarlósejtes vérszegénység
- Vértórak (leukémia)
- Csontvelő daganatok
- A véralvadást befolyásoló betegségek
- Vérzést vagy hosszan tartó erekciót okozó betegségek
- Egyéb betegségek, amelyekben a szex nem ajánlott

Ha nem biztos abban, hogy az erekciós segédeszközt probléma nélkül alkalmazhatja-e, kérdezze meg orvosát vagy egészségügyi szakembert.

Hogyan tisztítsa meg az erekciós segédeszközt?

Tisztítás előtt vegye le a pumpafejet az erekciós segédeszközről. Az alkatrészek meleg és enyhén szappanos vízzel könnyen megtisztíthatók. Ne használjon agresszív tisztítószeret. Minden használat után tisztítsa meg az erekciós segédeszközt. A szennyeződés elkerülése érdekében az erekciós segédeszközt a mellékelt tasakban tárolja.

Hogyan lehet újrahasznosítani az erekciós segédeszközt?

Az alkatrészeket a háztartási hulladékba dobhatja

Garancia

Szinte minden alkatrészre 2 év jótállást vállalunk, az alkalmazandó törvények előírásainak megfelelően.

A kopó alkatrészekre, például a leszorítógumikra, a jótállás nem vonatkozik. Időről időre ki kell cserélni őket.

A garancia nem vonatkozik a készülék fizikai sérüléseire vagy helytelen használat által okozottakra.

A pumpafej tömített és csak a gyártó vagy egy hivatalos szervizpartner nyithatja meg. Ha lehetséges, háromévente küldje be az erekciós segédeszközt a műszaki ellenőrzésre.

Milyen anyagból készülnek az alkatrészek?

- Kúp: Műanyag (akrilnitril-butadién-sztirol, ABS)
- Kicsi és nagy gyűrű: Műanyag (akrilnitril-butadién-sztirol, ABS)
- Henger: műanyag (polikarbonát)
- Leszorítógumi: Biokompatibilis hőre lágyuló elasztomer (TPE))
- Táskák: Nylon®

Az összes alkatrészt és a kenőanyagot megrendelheti. A jelenlegi ár és tartozéklista megszerzéséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot a service@medintim.de vagy Magyarországon a forgalmazó Scart Kft. ügyfélszolgálatával info@medimarket.hu, +36 53 570014.