

AxelGaard neurostimulációs elektródák használati útmutatója

Elektróda típusok: PALS, UltraStim, ValueTrode Cloth és X Cloth.

Csatlakozó típusok: PIN (tűcsatlakozó), SNAP (patentcsatlakozó)

Alak: kerek, ovális, négyszög, téglalap, pillangó, egyéb

Méretetek: 2.5 és 3.2cm, 7.5.x13cm, 5x5cm, 5x9cm, 5x10cm, egyéb

Alkalmazásra, működtetésre és eltávolításra vonatkozó utasítások:

1. A bőr mindig legyen tiszta, száraz és krémektől mentes.
2. Ne használja sérült bőrfelületen.
3. Csatlakoztassa az elvezetéseket az elektródákhoz.
4. Távolítsa el a védőlapot az elektródáról. Őrizze meg a védőlapot.
5. Szorosan rögzítse az elektródát a bőrre. Illessze fel először az elektróda közepét, majd simítsa le a széleit.
6. Csatlakoztassa az elvezetéseket a készülékhez. Kapcsolja be a stimulátort és állítsa be a készülék kezelésre vonatkozó instrukciói szerint. Ne lépje túl a 0,1 W/cm²-es intenzitást.
7. A stimulációs kezelés végeztével kapcsolja KI (OFF) a készüléket.
8. Az elektróda eltávolításához a szélénél fogva emelje fel és húzza le a bőrről.

Az elektróda gondozására és tárolására vonatkozó utasítások:

9. Helyezze vissza a félretett védőlapot az elektródára. Győződjön meg arról, hogy az ON oldal az elektróda géles felszíne felé néz.
10. Válassza le a kábelről az elektróda elvezetésének csatlakozóit.
11. Helyezze vissza az elektródákat az eredeti csomagolásukba.
12. Ha az elektródák kezdik elveszíteni tapadóképességüket, a géles felületbe óvatosan dörzsölt egy-két csepp víz segíthet meghosszabbítani a használhatóságukat. Amennyiben ez nem segít, cserélje le az elektródákat újakra.

Figyelem! A bőrhöz nem elég szorosan tapadó elektródák nagy mértékben növelik az égési sérülések és egyéb mellékhatások esélyét.

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

⚠ Minden vonatkozó veszély, ellenjavallat, figyelmeztetés, óvintézkedés és mellékhatás tekintetében olvassa el a stimulátor készülék használati útmutatóját.

- Tartsa az elektródákat gyermekektől elzárva.
- Az elektródák kizárólag egy emberen használhatók.
- NE a vezeték meghúzásával távolítsa el az elektródát.
- NE használjon olyan elektródákat, amelyek nem megfelelő méretűek vagy alakúak a készüléke számára, vagy amelyek rosszul lettek felhelyezve. Ez bőrirritációt vagy égési sérüléseket okozhat.
- Az elektródák nem érhetnek össze a kezelés közben.
- NE használja sérült bőrfelületen. Amennyiben bőrkiütést vagy égési sérülést tapasztal, azonnal hagyja abba az eszköz használatát, és keresse fel kezelőorvosát.
- NE lépje túl a 0,1 W/cm²-es intenzitást.
- NE használja az elektródákat a fej és a szív területén, illetve a nyak elülső részén.
- NE alkalmazzon stimulációt vezetés vagy gépkezelés közben.

MEGJEGYZÉS: Az elektródák élettartama függ a bőr állapotától és előkészítésétől, az ingerlés típusától, a tárolási és légköri viszonyoktól.

Használat előtt, kérjük, olvassa el a készüléke használati útmutatóját is.