



L4-08-4613 03/4/2020

Neurostimulation Electrodes - Instructions for Use - Translations

SLOVAK (SK)

Pokyny na aplikáciu, prevádzku a odstránenie

1. Pokožka musí byť stále čistá, suchá a nenakrémovaná.
2. Neaplikujte na poranenú pokožku.
3. Pripojte zvodové vodiče k elektródam.
4. Z elektródy odstráňte ochrannú podložku. Podložku uchovajte.
5. Elektródu pevne priložte na pokožku. Priložte najprv jej strednú časť a potom vyhladte smerom nadol k okrajom elektródy.
6. Pripojte zvodové vodiče k stimulačnému zariadeniu. Zapnite stimulátor a nastavte ho podľa pokynov na liečbu. Nepresahujte intenzitu 0,1 W/cm².
7. Keď sa stimulačná relácia skončí, stimulátor **VYPNITE (OFF)**.
8. Nadvihnite a odlepte okraj, aby ste mohli odstrániť elektródu z pokožky.

Pokyny na starostlivosť o elektródu a uchovávanie:

9. Uchovanú podložku prilepte späť na elektródu. Presvedčte sa, že ste na gélový povrch elektródy priložili lepivú stranu (**ON**).
10. Odpojte káble stimulátora od konektorov zvodových vodičov elektródy.
11. Vložte elektródy do pôvodného balenia.
12. Ak elektródy strácajú lepivosť, jemným vmasírovaním jednej alebo dvoch kvapiek vody do gélového povrchu **môžete** predĺžiť dobu ich použiteľnosti. Ak sa tak nestane, nahradte elektródy novými.

Upozornenie: Elektródy, ktoré nie sú pevne priložené na pokožku významne zvyšujú šancu popálenia a iných nežiaducich reakcií.

Varovania a bezpečnostné opatrenia:

- ⚠ Všetky relevantné nebezpečenstvá, kontraindikácie, varovania, bezpečnostné opatrenia a nežiaduce vedľajšie účinky sú uvedené v príručke na používanie stimulačného zariadenia.
- Elektródy uchovávajúte mimo dosahu detí.
 - Elektródy sú určené na používanie iba u jednej osoby.
 - NEODSTRAŇUJTE elektródu potiahnutím za zvodový vodič.
 - NEPOUŽÍVAJTE elektródy, ktorých veľkosť alebo tvar nezodpovedajú vášmu prístroju, alebo ktoré sú nesprávne pripevnené. Mohlo by to spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
 - Počas liečby zabezpečte, že sú elektródy oddelené.
 - NEAPLIKUJTE na poškodenú pokožku. Ak dôjde k vyrážke alebo popáleniu pokožky, okamžite zastavte používanie a kontaktujte vášho lekára.
 - NEPRESAHUJTE intenzitu 0,1 W/cm².
 - NEPRIPÁJAJTE elektródy na hlavu, srdce alebo na prednú časť krku.
 - NEPOUŽÍVAJTE stimuláciu počas riadenia alebo prevádzkovania strojov.

POZNÁMKA: Životnosť elektródy sa líši v závislosti od stavu pokožky, prípravy pokožky, typu stimulácie, uchovávaní a podnebia. Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte príručku pre používateľa stimulátora.