

L4-08-4613 03/4/2020

Neurostimulation Electrodes - Instructions for Use - Translations

ROMANIAN (RO)

Instrucțiuni de aplicare, operare și îndepărtare:

1. Pielea trebuie să fie întotdeauna curată, uscată și fără urme de loțiuni.
2. Nu aplicați pe pielea afectată de leziuni.
3. Atașați derivațiile la electrozi.
4. Îndepărtați învelișul protector de pe electrod. Păstrați învelișul.
5. Aplicați electrodul bine fixat pe piele. Aplicați mai întâi centrul, apoi întindeți până la marginile electrodului.
6. Atașați derivațiile la dispozitivul stimulator. Porniți stimulatorul; reglați în conformitate cu instrucțiunile stimulatorului pentru tratament. Nu depășiți intensitatea de 0,1 Watt/cm².
7. La finalizarea sesiunii de stimulare comutați stimulatorul în poziția **OPRIT (OFF)**.
8. Ridicați de margini și dezlipiți electrozii pentru a-i îndepărta de pe piele.

Instrucțiuni pentru îngrijirea și stocarea electrozilor:

9. Aplicați din nou pe electrod învelișul protector păstrat. Asigurați-vă că aplicați partea marcată **PORNIT (ON)** lipită de suprafața cu gel a electrodului.
10. Deconectați cablurile stimulatorului de la conectorii derivațiilor electrozilor.
11. Reintroduceți electrozii în ambalajul original.
12. Dacă electrozii încep să își piardă proprietatea adezivă, frecarea delicată a una sau două picături de apă pe suprafața cu gel **poate** prelungi durata de utilizare. Dacă nu se întâmplă acest lucru, înlocuiți cu electrozi noi.

Atenție: Neatașarea fermă a electrozilor pe piele crește mult posibilitatea producerii de arsuri și a altor reacții adverse.

Avertismente și precauții:

- ⚠** Pentru toate pericolele, contraindicațiile, avertismentele, precauțiile și efectele secundare adverse relevante, consultați manualul de utilizare al dispozitivului stimulator.
- Nu lăsați electrozii la îndemâna copiilor.
 - Electrozii sunt destinați utilizării pentru o singură persoană.
 - NU îndepărtați electrodul trăgând de derivație.
 - NU utilizați electrozi care nu au dimensiunea sau forma corectă pentru dispozitivul dumneavoastră sau care sunt incorect aplicați. Se pot produce iritații ale pielii sau arsuri termice.
 - Țineți electrozii separați în timpul tratamentului.
 - NU aplicați pe pielea afectată de leziuni. Dacă se produce o iritație sau o arsură a pielii, întrerupeți imediat utilizarea și contactați medicul.
 - NU depășiți intensitatea de 0,1 Watt/cm².
 - NU aplicați electrozii pe cap sau pe zona inimii sau pe partea din față a gâtului.
 - NU efectuați stimularea în timp ce conduceți un vehicul sau operați un utilaj.

NOTĂ: Durata de viață a electrodului variază în funcție de starea pielii, de pregătirea pielii, de tipul de stimulare, de stocarea electrodului și de climă. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare a dispozitivului stimulator înainte de utilizare.