

Používate ľská príručka

POWER Q-1000 PREMIUM

Lymfodrenážny prístroj



Čo je lymfatická masáž?

Lymfatická masáž pomáha zlepšovať lymfatický a krvný obeh v končatinách, znižuje chronický opuch či žilovú nedostatočnosť. Zariadenie pumpuje vzduch do návlekov, ktoré je potrebné nosiť na končatinách postihnutých daným stavom. Zvyšovanie a znižovanie tlaku vzduchu vo vzduchových komorách návleku simuluje pohyb svalov a napodobňuje pohyb pumpy. Táto stimulácia presúva tekutinu v končatinách smerom k stredu tela, čím účinne zlepšuje obeh. Zlepšená cirkulácia napomáha reabsorpcii tekutín, tým že ich presúva smerom k srdcu. To z nej robí ideálnu terapiu na liečbu a zvládanie chronických stavov, ktoré zahŕňajú opuchy končatín a problémy s krvným obehom.

Lymfatická masáž sa môže použiť na liečbu:

- Nedostatočnej cirkulácie končatín, trupu
- Lymfatickej nedostatočnosti
- Lymfedému končatín
- Žilovej nedostatočnosti dolných končatín
- Edémov
- Svalovej atrofie v prípade paralýzy
- Relaxačnú masáž

Zariadenie



Používanie zariadenia

1. Tlačidlo ON / OFF - priamo na ľavej strane od obrazovky
2. Obrazovka - v prednej časti zariadenia
3. Tlačidlá na výber programov - priamo na pravej strane od obrazovky
4. Výstup vzduchu návleku - na pravej strane zariadenia

Funkcie menu

- (1) MENU: voľba ponuky (režim, doba inflácie, interval, čas, tlak).
- (2) MOVE: voľba programov (režim, doba inflácie, interval, čas, tlak).
- (3) SET: výber programu
- (4) START / STOP: štart / stop
- (5) SAVE: tlačidlo uloženia (podržte 5 sekúnd)
- (6) RESET: tlačidlo reset (podržte 5 sekúnd)

- (7) LCD obrazovka
- (8) Tlak (mmHg): hodnota tlaku vzduchu návleku
- (9) MODE: voľba režimov (A1, A2, B, C, D(D1, D2, D3, D4), E)
- (10) INTERVAL: interval medzi zmenami tlaku (5, 10, 15, 20, 25, 30 sekúnd)
- (11) TIME (min): čas liečby (5 ÷ 99 minút)
- (12) PRESSURE TIME: doba inflácie návleku (5,7,9,11,13,15,17,19,21 sekúnd).
- (13) OBRÁZOK NOHY: zobrazuje priebeh inflácie v samostatných návlekoch.

Príslušenstvo



Power Q-1000 Premium obsahuje:
zariadenie na lymfatickú masáž, napájací kábel

Voliteľné príslušenstvo

- Dvojitá vzduchová hadica, 2x4 komora
- Vzduchová hadica, 4 komory
- Návlek na nohu, M/L/XL veľkosti
- Predĺženie návleku na nohu, M/L veľkosti
- Návlek na torzo, M/L veľkosti
- Návlek na rameno, M/L veľkosti
- Konektor rozdeľovača vzduchu, slúžiaci na pripojenie dvoch návlekov zároveň

Veľkosti návlekov

Návlek na nohu, veľkosť M:

- Dĺžka: 76 cm
- Obvod stehna: 65 cm
- Obvod členku: 38 cm

Návlek na rameno, veľkosť M:

- Dĺžka: 86 cm
- Obvod bicepsu: 50 cm
- Obvod zápästia: 36 cm

Návlek na torzo, veľkosť M:

- Obvod: 136 cm
- Výška: 46 cm
- Obvod suchého zipsu: 31 cm

Predĺženie návleku na nohu:

- Maximálna šírka: 13 cm
- Minimálna šírka: 6 cm

Pri nadpriemernej veľkosti tela sú k dispozícii špeciálne návleky na predĺženie.

Špecifikácie

Zariadenie Power Q-1000 Premium má nasledujúce špecifikácie:

- Zariadenie kategórie IIa (smernica 93/42 / EHS, dodatok IX, článok 9);
- Komponenty triedy I, BF (klasifikované podľa CEI EN 60601-1);
- Zariadenie nie je vodotesné;
- Zariadenie a jeho súčasti nemožno sterilizovať;
- Zariadenie by sa nemalo používať v blízkosti horľavých alebo výbušných látok alebo v prostredí bohatom na kyslík.
- Zariadenie s nepretržitým chodom;
- Zariadenie sa nesmie používať vo vonkajších priestoroch.

Technické špecifikácie

Napájacie napätie	220-240 VAC, 50-60 Hz
Max výstupný prúd	výkon 0.2 A / 53W
Dĺžka ošetrovania	Nastaviteľná (0 až 99 minút)
Maximálny tlak	0 – 240 mmHg (±20%)
Váha	2 Kg3.2 Kg


Účel zariadenia

Klinický účel: Liečebná terapia
Použitie: Klinické a domáce použitie

Návod na obsluhu

Používanie návleku na nohu


- Návlek navlečte na nohu, zatvorte zips až po vrch návleku a zatvorte suchý zips.
- V prípade širšieho obvodu nôh použite príslušenstvo pre rozšírenie návleku;

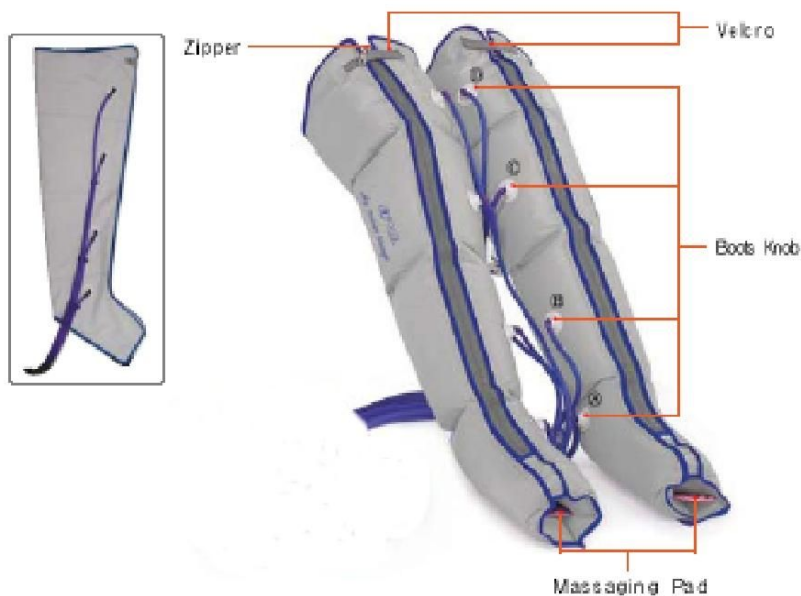

- Pripojte 4 trubice k 4 vstupom konektorov na návlekoch.
- Pripojte dlhšie trubice ku konektorom v blízkosti stehien: dlhšie trubice a konektory vo vyššej polohe sú tmavšej farby.
- Opačné konce hadíc pripojte k výstupu na zariadení.

Používanie návleku na torzo

- Návlek navlečte na torzo. Spodný okraj manžety by mal byť vo výške vášho pásu.
- Pripojte 4 trubice k 4 vstupom konektorov na návlekoch.
- Pripojte dlhšie trubice ku konektorom v blízkosti hrudníka
- Opačné konce hadíc pripojte k výstupu na zariadení.
- Pri použití jedného návleku uzavrite druhý výstup hermetickým uzáverom.

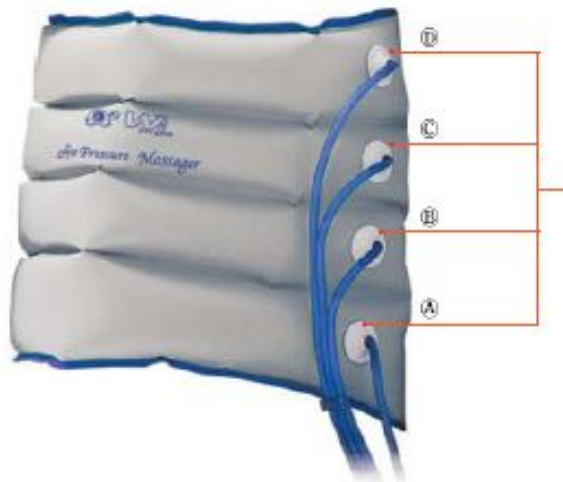

Používanie návleku na rameno

- Návlek navlečte na rameno.
- Pripojte 4 trubice k 4 vstupom konektorov na návlekoch.
- Pripojte dlhšie trubice ku konektorom v blízkosti pleca.
- Opačné konce hadíc pripojte k výstupu na zariadení.
- Pri použití jedného návleku uzavrite druhý výstup hermetickým uzáverom.

Používanie návleku na torzo a nohu zároveň

- Návleky navlečte na nohu (viz. Používanie návleku na nohu) a torzo (viz. Používanie návleku na torzo)
- Pripojte 4 trubice k 4 vstupom konektorov na návlekoch.
- Pripojte dlhšie trubice ku konektorom v blízkosti stehien: dlhšie trubice a konektory vo vyššej polohe sú tmavšej farby.
- Pripojte 4 trubice k 4 vstupom konektorov na návlekoch.
- Pripojte dlhšie trubice ku konektorom v blízkosti hrudníka
- Opačné konce hadíc pripojte k výstupu na zariadení.

Postupujte rovnako, ak používate spoločne návleky na rameno a nohy.


Používanie predĺžení návlekov na nohy

- Predĺženie pripojte k návleku pred jeho navlečením na nohu
- Užšia časť predĺženia by mala smerovať k členkovej časti návleku na nohu
- Predĺženie pripojte k návleku zipsom
- Návlek navlečte na nohu, zatvorte zips až po vrch návleku a zatvorte suchý zips.
- Ďalej postupujte podľa krokov v časti Používanie návleku na nohu



Spustenie ošetrenia

- Pripojte sieťový kábel do zásuvky (220-240V) a zariadenie zapnite prepnutím vypínača ON / OFF na ON
- Zvoľte požadované parametre liečby pomocou tlačidla MENU.
- Pomocou tlačidla MOVE zvoľte parameter, ktorý chcete zmeniť (režim ošetrenia, čas udržiavania tlaku, dĺžka liečby, tlak ošetrenia atď.).
- Výber programu (MODE výber režimu na obrazovke). Požadovaný program vyberiete stlačením tlačidla SET.
- Zariadenie má dostupných 5 programov:

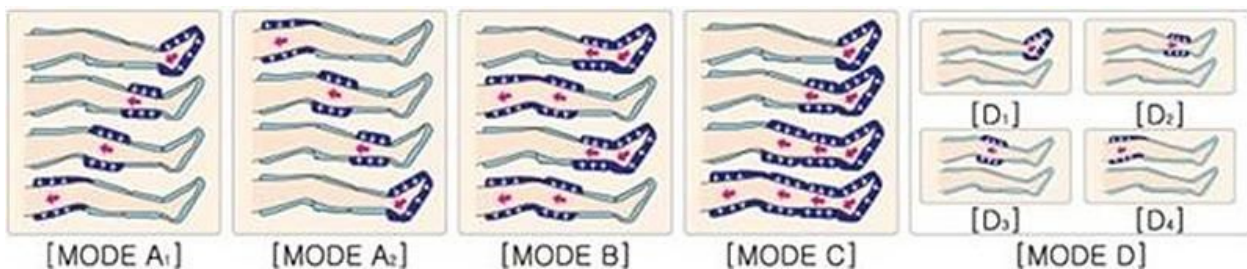

- **MODE A1 / REŽIM A1:** Vzduch je napustený do najnižšej vzduchovej komory návleku na končatiny, až kým sa nedosiahne požadovaný tlak. Potom je naplnená ďalšia vzduchová komora, ktorá smeruje k trupu, zatiaľ čo predtým naplnená komora je vypustená.
- **MODE A2 / REŽIM A2:** Vzduch je napustený do najvyššej vzduchovej komory návleku na končatiny, až kým sa nedosiahne požadovaný tlak. Potom sa naplní ďalšia vzduchová komora, ktorá smeruje od trupu, zatiaľ čo predtým naplnená komora je vypustená.
- **MODE B / REŽIM B:** Vzduch sa naplní do najnižších dvoch vzduchových komôr návleku na končatiny, až kým sa nedosiahne požadovaný tlak. Potom sa naplnia ďalšie dve vzduchové komory, ktoré smerujú k trupu, zatiaľ čo predtým naplnené komory sú vyfúknuté.
- **MODE C / REŽIM C:** Vzduch sa naplní do najnižšej vzduchovej komory návleku na končatiny, až kým sa nedosiahne požadovaný tlak. Táto komora udržiava tlak pri nafukovaní nasledujúcej vzduchovej komory, smerom k trupu. Toto pokračuje až do úplného nafúknutia návleku, po čom sa proces opakuje.

- **MODE D (1-2-3-4) / REŽIM D (1-2-3-4):** Vzduch je nafúknutý len do vybranej vzduchovej komory. Tento režim je kompatibilný iba s návlekmi na nohy. (D1 - dolná vzduchová komora, D2 - druhá vzduchová komora odspodu návleku, D3 - tretia vzduchová komora odspodu návleku, D4 - najvyššia vzduchová komora návleku).
- **MODE E / REŽIM E:** Slúži na striedanie medzi dvoma rôznymi režimami inflácie. Pri prvom cykle nafukovania návleku sú komory nafukované podľa režimu A1. Pri ďalšom cykle sú komory nafukované za použitia režimu C. Režimy A1 a C sa striedajú až do ukončenia liečby.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Zariadenie Power Q-1000 Premium sa nezapne	Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený Skontrolujte správnu polohu tlačidla ON / OFF Skontrolujte, či je zdroj napájania poškodený
Zariadenie Power Q-1000 Premium produkuje unikavý alebo hvízdavý zvuk	Skontrolujte, či sú hadice poškodené, či sa na nich nachádzajú diery Skontrolujte, či sú hadice správne pripojené Uistite sa, že hadice nie sú ohnuté
V návlekoch nie je tlak alebo vzduch nemôže prúdiť do vzduchových komôr	Skontrolujte, či sú hadice poškodené, či sa na nich nachádzajú diery Skontrolujte, či sú hadice správne pripojené Uistite sa, že hadice nie sú ohnuté Skontrolujte, či sa vzduchové komory nafúknu v správnom poradí
Vzduch prúdi do komôr, ale tiež uniká	Skontrolujte, či sú návleky poškodené, či sa na nich nachádzajú diery Ak nenájdete diery, vypnite zariadenie a znova ho zapnite Skontrolujte vyššie uvedené kroky Ak problém pretrváva, obráťte sa na výrobcu

Varovania

Nasledujúce upozornenia zaručujú bezpečnosť používateľa a zabraňujú zraneniam.

Pred použitím prístroja Power Q-1000 Premium si prečítajte návod na použitie.



Pozor!

Používanie prístroja na ošetrovanie

- Zariadenie by sa malo používať len na dospelých (starší ako 18 rokov) a to s ich súhlasom.
- Prístroj používajte výhradne so zdrojom napájania 220V. V opačnom prípade môže prístroj predstavovať riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak zariadenie nepoužívate, odpojte ho.
- Nepripájajte viac zariadení k rovnakému predlžovaciemu káblu.
- Prístroj nepoužívajte viac ako 20 minút počas prvých niekoľko ošetrení.
- Odporúčané sú 5-10 minútové počiatočné ošetrenia.
- Ošetrovanie okamžite prerušte ak pociťujete nevoľnosť alebo bolesť!
- Nepoužívajte zariadenie, ak trpíte infekciou alebo zápalom!
- Pred používaním zariadenia sa poraďte so svojím lekárom v prípade, že trpíte problémami s trávením, nedávnou zlomeninou, trombózou alebo rakovinou.
- Používajte zariadenie iba na účely opísané v používateľskej príručke.
- Počas používania zariadenia končatinami nepohybujte!

Manipulácia s prístrojom

- Neťahajte za a neporušujte elektrické káble prístroja. Toto môže predstavovať riziko elektrošokov.
- Vyvarujte sa nárazom.
- Na zariadenie, jeho hadice ani káble nekladte ťažké predmety.

- Zriedkavé použitie zariadenia alebo jeho použitie v chladnom prostredí môže viesť k jeho nesprávnemu fungovaniu. Pre opätovným použitím zariadenia spustite ošetrovanie 3 - 4 krát bez toho aby ste na seba navliekli návršky.
- Neohýbajte trubice zariadenia.
- Zariadenie čistite iba suchou čistou textilnou utierkou. Nečistite zariadenie abrazívnymi čistiacimi prostriedkami alebo prostriedkami na kyselinovej báze.
- Prístroj uchovávajte mimo tekutín! Zariadenie nie je vodotesné a kvapalina vstupujúca do zariadenia môže spôsobiť trvalé poškodenie.
- Zariadenie zodpovedá normám nakladania s OEEZ.
- Nevystavujte prístroj intenzívnemu teplu ani priamemu slnečnému žiareniu.
- Prístroj nepripájajte ani neodpájajte z elektrickej siete vlhkou rukou. Toto môže spôsobiť elektrošok a spôsobiť zranenie.
- Nepoužívajte prístroj, ak máte podozrenie, že je poškodený alebo chybný. Toto môže spôsobiť elektrošok a spôsobiť zranenie. Obráťte sa na výrobcu!

Údržba, preprava a skladovanie

Ak používate jednotku v súlade s používateľskou príručkou, údržba sa nevyžaduje.

Prepravné opatrenia

Na prepravu zariadenia nie sú potrebné žiadne prípravy. Odporúčame prepraviť Power Q-1000 Premium a jeho príslušenstvo v originálnom balení.

Podmienky skladovania

Zariadenie Power Q-1000 Premium môže byť uskladňované v nasledujúcich podmienkach:

V pôvodnom balení:

teplota	+5 až +40 ° C
vlhkosť	30 - 80%
tlak vzduchu	500 - 1060 hPa

Mimo pôvodného balenia:

teplota	-10 až +55 ° C
vlhkosť	10 - 90%
tlak vzduchu	500 - 1060 hPa

Záruka

Pre záruku, sa obráťte na lokálneho predajcu alebo výrobcu (spoločnosť Wonjin Mulsan Co.).

Služba

Všetky opravy spotrebiča môžu vykonávať iba výrobca alebo jeho autorizované servisné stredisko. Obráťte sa na distribútora o pomoc.

Scart Kft.

Adresa: 2730 Albertirsa, Koltói Anna 39., Maďarsko

Telefón: +36 53 570014

Fax: +36 53 570015

Email: info@medimarket.com

Webová stránka : www.medimarket.com

Pre zachovanie záruky prístroja, Vám odporúčame používať len originálne príslušenstvo a náhradné diely.

POWER Q-1000 Premium vyrába:



Manufacturer: Wonjin Mulsan Co., Ltd.
Namdong Industrial Complex 10B-7L,
623-6 Namchon-dong, Namdong-gu, Incheon, I
Warranty Service: 82-32-816-0552