



Instrucțiuni de utilizare

SaltDome pentru terapie cu sare cu ultrasunete

Declarația de conformitate:

Dispozitivul a fost fabricat și verificat în conformitate cu un sistem de management certificat ISO 9001 și îndeplinește toate aspectele specificației convenite în conformitate cu cerințele europene.

Producător: J&R Electronics Co, China

Asistență tehnică.



Felicitări pentru achiziționarea dispozitivului de terapie cu sare cu ultrasunete SaltDome!

SaltDome este conceput pentru uz casnic. Nebulizatorul său de particule cu ultrasunete folosește vibrațiile ultrasonice pentru a transforma soluția salină în particule de sare cu dimensiunea de 1-5 microni. Aceste particule sunt capabile să pătrundă adânc în plămâni și alveole pentru a ajuta la eliminarea flegmei, combaterea bacteriilor, virusilor și ciupercilor, reducerea inflamației, îmbunătățirea oxigenării fluxului sanguin și umezirea căilor respiratorii.

Terapia cu sare a fost utilizată cu succes în tratamentul și prevenirea bolilor respiratorii cronice și acute. Ajută la reducerea inflamației, deblocarea blocajelor, curățarea sistemului respirator și îmbunătățirea respirației. De asemenea, previne dezvoltarea bolilor respiratorii, protejează împotriva răcelii și gripei prin menținerea igienei generale a întregului sistem respirator.


SaltDome oferă aer sărat și ioni negativi care nu numai că ameliorează afecțiunile care afectează sistemul respirator, dar sunt, de asemenea, benefice pentru eficiența muncii și concentrare.

Dispozitivul de terapie cu sare SaltDome este livrat cu un adaptor de rețea, instrucțiuni, o cupă de amestecare și sare gemă naturală suficientă pentru aproximativ trei luni de utilizare continuă.

Acest instrument este ușor de utilizat. Trebuie doar să îl conectați, să umpleți rezervorul și să îl folosiți noaptea. Așezați dispozitivul pe noptieră, lângă pat, la aceeași înălțime cu corpul dumneavoastră, și bucurați-vă de efectele minunate ale sării naturale.

SaltDome este foarte silențios și nu vă va deranja somnul. Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm o utilizare regulată, pe termen lung.

Detalii despre dispozitiv

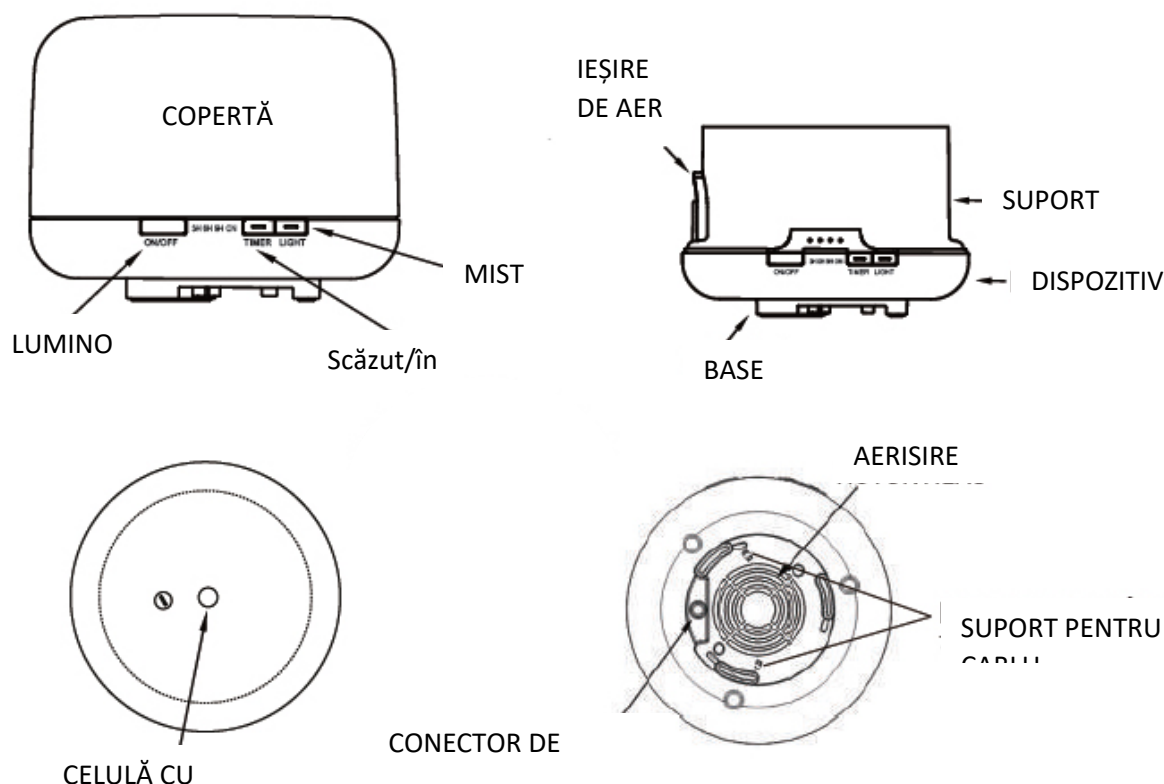

Utilizați

1. Așezați aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă și uscată unde va fi utilizat (noptieră) și ridicați capacul superior. **Fig. 1 (FIG1)** Nu așezați o față de masă sau alte materiale textile sub aparat, deoarece acestea pot bloca orificiul de aerisire.
2. Conectați adaptorul de alimentare în priză din partea de jos a dispozitivului. **Figura 2 (FIG2)**
3. Folosiți paharul de măsurare furnizat și umpleți 1-3 pahare de apă în rezervorul de apă (până la 300 ml) **Figura 3 (FIG3)**
4. Apoi dizolvați 1/2 lingură de sare grunjoasă (NU MAI MULT!) în cea de-a 4-a cană de măsurare de apă. Turnați această soluție de sare în rezervorul de apă, care se va umple apoi. Nivelul apei nu trebuie să depășească nivelul maxim. **Figura 5 (Fig5)**
Dacă coloana de apă este prea mare, celula cu ultrasunete nu va putea produce umiditate, astfel încât rezervorul nu va rămâne fără apă.
5. Este normal să vedeți murdărie pe fundul rezervorului după ce sarea s-a dizolvat. Sarea gemă este naturală și nerafinată. Nu este periculoasă pentru dumneavoastră!
Nu umpleți NICIODATĂ apă într-un aparat care este deja pornit!
Dacă apa de la robinet este dură sau conține clor, folosiți apă dedurizată sau îmbuteliată. **Figura 4 (FIG4)**
6. Dizolvarea a 1/2 lingură de sare gemă este de obicei suficientă. În cazul unor afecțiuni grave, cantitatea de sare poate fi ușor crescută, dar nu trebuie să depășească o lingură pentru întregul acvariu. Mai multă sare nu este necesară pentru efectul terapeutic, ci mai degrabă creșteți timpul petrecut în aerul sărat!
7. Ștergeți rezervorul de apă cu un prosop de hârtie. Puneți la loc capacul superior
8. Conectați fișa de alimentare la priză de perete. **Figura 6 (FIG6)**
9. Apăsăți butonul POWER pentru a porni. **Figura 9 (FIG9)**
Aparatul se va porni numai dacă există apă în rezervor. LED-ul "1 oră" care indică starea de pornire se va aprinde și aparatul va începe să funcționeze.
Particulele microscopice de sare sunt evacuate din aparat prin deschiderea superioară.
Cel mult o ușoară ceață este vizibilă, iar acest lucru este normal! Doar foarte puțini vapori sunt emiși din dispozitiv.
10. Apăsăți din nou butonul POWER pentru a seta temporizatorul. Timpul poate fi setat la 1 oră, 3 ore, 6 ore. După expirarea timpului setat, dispozitivul se va opri automat. Apăsăți din nou butonul POWER pentru a porni lumina LED. În această poziție, aparatul va funcționa continuu și se va opri doar atunci când rezervorul este gol. Apăsăți din nou butonul POWER pentru a opri aparatul.
11. A/M (Low/High Vapour Output) - utilizați butonul A/M pentru a reduce/crește cantitatea de vapori emisă. Schimbarea este abia perceptibilă cu ochiul liber. Diferența de ieșire a vaporilor între cele două moduri este de aproximativ 20-25%. **Figura 8 (FIG8)**
12. LUMINĂ - apăsarea butonului aprinde LED-ul încorporat în dispozitiv, iar acesta își schimbă culoarea în mod continuu la fiecare câteva secunde. Dacă vă place o culoare, apăsăți din nou butonul pentru a o seta ca fiind permanentă. Apăsăți din nou butonul LIGHT (LUMINĂ) pentru a vă deplasa printre culori. În cele din urmă, lumina poate fi stinsă. **Figura 7 (FIG7)**

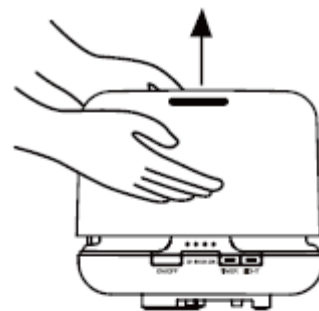


Fig 1

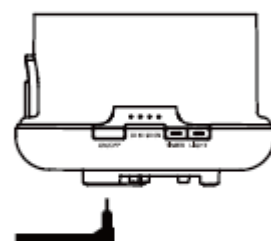


Fig 2

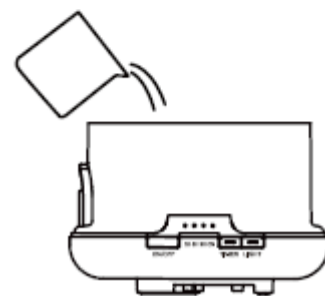


Fig 3



Fig 4

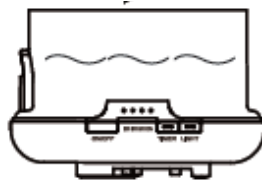


Fig 5

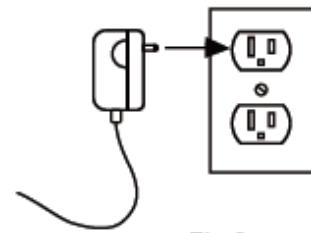


Fig 6

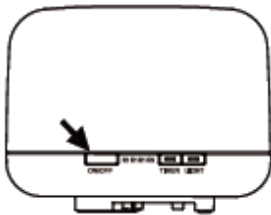


Fig 7

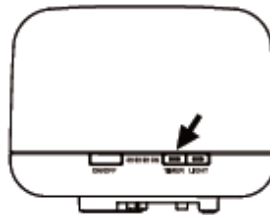


Fig 8

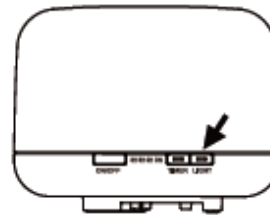


Fig 9

Dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, turnați apa și puneți aparatul într-un loc uscat.

Aparatul se va opri automat atunci când nu mai există saramură în rezervor. Rezervorul de apă se epuizează în aproximativ 5-9 nopți. Pentru a relua utilizarea, umpleți din nou rezervorul cu saramură.

Odată ce unitatea este încărcată, nu o înclinați sau mutați și nu scoateți capacul superior.

Dacă nu există apă în rezervorul de apă, apăsarea butonului ON / OFF va emite un semnal sonor pentru a vă reaminti să adăugați apă.

Dispozitivul nu va funcționa fără apă.

Telecomandă

Dispozitivul poate fi operat și prin telecomandă.



Întreținere și curățare

2-3 curățați dispozitivul după utilizare, după cum urmează:

1. Deconectați aparatul de la rețea și scoateți capacul.
2. Scurgeți apa rămasă pe "Latura de scurgere" a rezervorului.
3. Curățați aparatul cu un pahar de acid citric dizolvat în apă caldă și o cârpă moale și ștergeți-l cu un prosop de hârtie (decalcifiere).
4. Curățați ușor celula cu ultrasunete (mica adâncitură rotundă din partea de jos a rezervorului de apă) cu o cârpă moale.
5. Nu utilizați niciodată alți acizi, enzime sau detergenți, deoarece se pot produce gaze toxice sau pot apărea defecțiuni.
6. În interiorul rezervorului de apă există, de asemenea, un capac interior care poate fi îndepărtat pentru a fi curățat. Localizați mânerul și scoateți capacul interior.
După curățare, introduceți mai întâi ieșirea de aer și apoi apăsați partea laterală a mânerului până când auziți un clic.
7. Pentru a depozita aparatul, curățați-l temeinic în conformitate cu instrucțiunile. Odată uscat, puneți-l înapoi în ambalajul original și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

FOARTE IMPORTANT:

Utilizați numai o cârpă moale pentru a curăța celula cu ultrasunete. Nu o atingeți niciodată cu un obiect ascuțit sau dur.

Nu scufundați NICIODATĂ baza aparatului în apă și aveți grijă să nu intrați apă în interiorul AIR sau în alte deschideri.

După încărcare, NU mutați dispozitivul dintr-un loc în altul. Întotdeauna scoateți capacul și goliți rezervorul de apă înainte de a-l muta în alt loc.

Condiții de transport și depozitare: -20 °C - 55 °C, umiditate ≤95%, presiune 70-106 kPa.

Condiții de funcționare: 5- 40°C, umiditate 30-80%, presiune 80kPa - 106kPa.

Date tehnice

Tensiune de intrare: 24V

Putere: 13W

Metoda de umidificare: celula cu ultrasunete 2.4Mhz

Capacitatea rezervorului de apă: 500ml

Nivelul de zgomot: <35dB

Adaptor: Intrare 100-240V~ 50/60Hz

Rezistența la apă: IPX0

Dimensiunile dispozitivului: 168x121mm

Greutate: aproximativ 520 gr.

Măsuri de precauție

Vă rugăm să citiți și să respectați următoarele:

- Țineți întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, plană și nivelată. Nu așezați o pernă sau o pătură dedesubt, deoarece aceasta va bloca orificiile de ventilație de dedesubt, provocând supraîncălzirea și defectarea aparatului.
- Nu umpleți niciodată apa peste marcajul "MAX".
- Nu adăugați mai multă sare în apă decât se recomandă.
- Folosiți sare grunjoasă naturală și fără aditivi, cum ar fi sarea grunjoasă Parajdi sau sarea de Himalaya.
- Nu folosiți sare de mare, sare care conține iod sau alți aditivi.
- Dacă rezervorul este gol, nu porniți aparatul.
- Respectați instrucțiunile de întreținere și curățați aparatul în mod regulat pentru a preveni funcționarea defectuoasă a acestuia.
- Deconectați întotdeauna alimentarea cu energie electrică înainte de întreținere.
- După utilizare, turnați apa rămasă din "Latura de scurgere" a rezervorului și ștergeți dispozitivul cu o cârpă curată și uscată.
- A se păstra departe de lumina directă a soarelui, de sursele de căldură și de aerul condiționat.
- Nu înclinați aparatul, deoarece apa ar putea intra în partea inferioară și provoca o funcționare defectuoasă.
- Nu îl utilizați mai mult de 10 ore la un moment dat. Așteptați 60 de minute înainte de repornire pentru a evita deteriorarea celulei cu ultrasunete.
- Pentru aromaterapie se pot folosi numai uleiuri esențiale 100% naturale. Parfumurile chimice, mirodeniile sau impuritățile vor cauza disfuncționalități. Folosiți câte 3-5 picături la 100ML de apă. O cantitate prea mare de ulei va bloca sistemul și va cauza defecțiuni. Vă rugăm să curățați aparatul în conformitate cu instrucțiunile de întreținere înainte de a trece la un nou tip de ulei esențial.
- Folosiți numai apă de la robinet și apă îmbuteliată, nu folosiți apă minerală, apă minerală, apă spumantă, apă Salvus sau apă termală, deoarece acestea pot deteriora aparatul.
- Nu mutați dispozitivul în timpul utilizării.
- Nu atingeți niciodată nicio parte a produsului cu mâinile umede.
- A se ține departe de copii și animale de companie.
- Cablul nu ar trebui să traverseze nicio traiectorie de deplasare și nu ar trebui să aplice niciodată o forță de tracțiune puternică în niciun punct.
- Dacă simțiți un miros de arsură, deconectați imediat.

Depanare

Dacă dispozitivul nu funcționează corect, verificați următoarele:

Lipsa de defecțiune	Cauza posibilă	Soluția propusă
Nu pornește - se oprește devreme	• Este suficientă apă în rezervor? • Este cablul de alimentare conectat corect?	• Umpleți rezervorul cu apă • Deconectați și verificați cablurile, apoi reconectați-le cu atenție.
Nu există ceață sau este anormală	• Nu este suficientă apă • Prea multă apă • Este celula cu ultrasunete contaminată? • Sunt placarea și căptușeala interioară instalate incorect? • Este blocată intrarea de aer din partea de jos a aparatului din anumite motive?	• Se umple cu apă suficientă. • Nu umpleți niciodată rezervorul de apă peste linia MAX. • Vă rugăm să consultați instrucțiunile de întreținere pentru curățarea corespunzătoare a celulei cu ultrasunete. • Îndepărtați-l și înlocuiți-l în mod corespunzător pentru a vă asigura că formarea de vapori nu este împiedicată. • Curățați sau deblocați orificiul de admisie. • Fluxul de aer restricționat are un efect asupra formării de vapori.
Scurgeri de apă din dispozitiv	• Sunt placarea și căptușeala interioară instalate incorect? • S-a răsturnat dispozitivul? • Temperatură scăzută sau umiditate ridicată?	• Îndepărtați-l și înlocuiți-l în mod corespunzător pentru a vă asigura că formarea de vapori nu este împiedicată. • Urmați instrucțiunile privind scurgerile accidentale. • În aceste condiții, condensul se condensează rapid în picături de apă.

Atenție

Cantitatea și intensitatea vaporilor produși variază, dar nu este considerată o defecțiune. Factorii care influențează cantitatea de ceață includ cantitatea de apă din rezervor, umiditatea și temperatura din încăperea și fluxul de aer.

Dacă nu există apă în rezervor, apăsarea butonului PAPER (Hârtie) va face ca aparatul să emită un "bip" de 3 ori pentru a vă reaminti să adăugați apă. Aparatul nu va funcționa fără apă.

În cazul în care aparatul se răstoarnă sau se răstoarnă în timpul utilizării, vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a evita funcționarea defectuoasă.

- Scoateți aparatul din priză și îndepărtați capacul.
- Turnați apa rămasă din rezervorul de apă.
- Scuturați ușor aparatul pentru a scurge apa care se poate afla în carcasa aparatului, apoi lăsați-l să se usuce timp de cel puțin 24 de ore.

Distribuitor: Scart Kft. 2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.

+36 53 200108 - info@medimarket.com - www.medimarket.com