

MYND felhasználói kézikönyv

Kedves Ügyfél,

Köszönjük, hogy a Mynd-t választotta. A TensCare kiváló minőségű, alaposan tesztelt termékeket képvisel a kíméletes elektroterápia, izomtónusnövelés, kontinenciakezelés és a vajúdas alatti fájdalomcsillapítás területén történő alkalmazásokhoz.

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra, tegye hozzáférhetővé más felhasználók számára, és tartsa be a benne foglalt információkat.

Üdvözlettel,



Az Ön TensCare csapata

TARTALOM


1. SZÁNDÉKOS FELHASZNÁLÁS
2. ELLENJAVALLATOK, FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
3. PROGRAMOK
 - 3.1. PROGRAMBEÁLLÍTÁSOK
 - 3.2. GEL PAD TÁMOGATÁS
4. TARTALOM
5. EGYSÉGINFORMÁCIÓK
 - 5.1. VEZÉRŐSZEREK
 - 5.2. HASZNÁLATI UTASÍTÁS
6. 6. A MYND BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA
 - 6.1. AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE
 - 6.2. FELKÉSZÜLÉS AZ ÜLÉSRE
 - 6.3. KEZELÉSI ÜLÉS
 - 6.4. A KEZELÉS UTÁN
7. TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS
8. EMC
9. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS HULLADÉKOK ÁRTALMATLANÍTÁSA (WEEE)
10. KIEGÉSZÍTŐK
11. GARANCIA
12. HIBAELHÁRÍTÁS
13. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

FELHASZNÁLT SZIMBOLOK

	BF TÍPUSÚ FELHASZNÁLT RÉSZ: Elektromos áramütés elleni védelmet nyújtó berendezés, elszigetelt alkalmazott résszel. Jelzi, hogy ez a készülék a végfelhasználóval vezető kapcsolatban van.
	Ez a szimbólum a készüléken azt jelenti: "Lásd a használati utasítást".
	Hőmérsékletkorlátozás: azt a hőmérsékleti határértéket jelzi, amelynek az orvostechnikai eszköz biztonságosan kitehető.
	A tételszám a gyártó tételkódját jelzi, így a tétel vagy tétel azonosítható.
	Páratartalom-korlátozás: azt a páratartalom-határértéket jelzi, amelynek az orvostechnikai eszköz biztonságosan kitehető.
	A sorozatszám a gyártó sorozatszámát jelzi, hogy egy adott orvostechnikai eszköz azonosítható legyen.
	Ne dobja a háztartási hulladékba.
	Katalógusszám: a gyártó katalógusszámát jelzi, hogy a készülék azonosítható legyen.
	Légköri nyomás: azt a légköri határértéket jelzi, amelynek az orvostechnikai eszköz biztonságosan kitehető.
	Orvostechnikai eszköz
	Gyártó szimbólum
	Gyártás dátuma: az orvostechnikai eszköz gyártásának dátumát jelzi. Ezt a dátumot az utazótáskán található sorozatszám tartalmazza, vagy "E/év/szám" (YY/123456) vagy "E/hónap/év/szám" (MM/YY/123456) formában.
	CE-jelölés

	<p>Importőr szimbólum</p>
	<p>Ez az orvostechnikai eszköz otthoni használatra javallott.</p>
<p>IP22</p>	<p>Ez az orvostechnikai eszköz nem vízálló, és meg kell védeni a folyadékoktól. Az első 2. szám: Védett a veszélyes alkatrészekhez való hozzáférés ellen ujjal, és a 12 mm \varnothing, 80 mm hosszúságú, csuklós vizsgálati ujjnak megfelelő távolságot kell biztosítani a veszélyes alkatrészekről, és védettnek kell lennie a 12,5 mm \varnothing vagy annál nagyobb szilárd idegen tárgyakkal szemben. A második szám 2: Véd a függőlegesen lezúduló vízcseppek ellen, ha a burkolatot 15°-ig megdöntik. A függőlegesen lezúduló vízcseppek nem lehetnek káros hatással, ha a burkolatot a függőlegeshez képest bármelyik oldalon 15°-ig bármilyen szögben megdöntik.</p>

1. SZÁNDÉKOLT FELHASZNÁLÁS

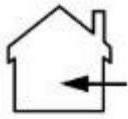

A MYND egy orvosi eszköz, amelyet otthoni egészségügyi környezetben történő használatra terveztek a gyakori epizodikus és krónikus migrénes fejfájások kezelésére és megelőzésére.

Mindenki használhatja, aki képes a készüléket kezelni és megérti az utasításokat. Jelenleg nincs bizonyíték a 18 év alatti felhasználók hatékonyságára.

2. ELLENJAVALLATOK, FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ebben a kézikönyvben: Az ellenjavallat akkor használatos, ha egy eszközt nem szabad használni, mert a használat kockázata egyértelműen meghaladja az előrelátható előnyöket, és súlyos sérülést vagy halált okozhat.

A figyelmeztetés akkor használatos, ha az utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

A Vigyázat akkor használatos, ha az utasítások be nem tartása kisebb vagy közepes mértékű sérülést, illetve a készülék vagy más vagyontárgyak károsodását eredményezheti.

A megjegyzések pontosításra vagy ajánlásra szolgálnak.

ELLENJAVALLATOK:

Ne használja, ha nem gyógyult agy- vagy arcsérülései vannak.

A homlokokon kívül más területen ne használja a MYND-et. A mellkason vagy nyakon történő alkalmazás hatással lehet a szívre vagy a beültetett eszközökre, és befolyásolhatja az epilepsziás rohamküszöböt. Hatással lehet a testen viselt monitorozó eszközökre is. Ne használja a MYND-et, ha Önnek szívritmus-szabályozója, beültetett defibrillátora vagy más beültetett fém vagy elektronikus eszköze van. Az ilyen használat áramütést, égési sérüléseket, elektromos interferenciát vagy halált okozhat.

NEM szabad használni, ha a kezelt területen: aktív vagy feltételezett rákos megbetegedés, vagy nem diagnosztizált, rákos megbetegedéssel járó fájdalom áll fenn. A megerősített vagy feltételezett rosszindulatú daganatos betegségen keresztül történő közvetlen stimuláció kerülendő, mivel az serkenetheti a növekedést és elősegítheti a rákos sejtek terjedését.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A MYND kezelés után várjon egy órát, mielőtt koncentrációt igénylő tevékenységet folytatna. Álmoságot vagy koncentrációhiányt tapasztalhat.

Ne helyezzen elektródabetéteket sérült bőrre. Az elektródabetétek fertőzést okozhatnak.

Ne használja a MYND-et rövidhullámú vagy mikrohullámú terápiás berendezés közelében (kevesebb mint 1 méter), mivel ez instabilitást okozhat a MYND kimenetében.

Veszélyes lehet a MYND-et olyan eszközökkel összekapcsolni, amelyek nem szerepelnek ebben a felhasználói kézikönyvben.

5 év alatti gyermekektől távol tartandó. Hosszú töltőkábel - a csecsemőknél fennáll a fojtogatás veszélye.

Ne használja egyidejűleg nagyfrekvenciás kórházi diagnosztikai/terápiás berendezésekkel.

Ez égési sérüléseket okozhat az elektródák helyén és a készülék esetleges károsodását.

Az ingerlés nem alkalmazható közvetlenül a szemem, a szájat takarva, a nyak elülső részén (különösen a carotis sinuson), illetve a hát felső részén elhelyezett vagy a szív fölött kereszteződő elektródákból.

Ne alkalmazza az ingerlést a mellkasán keresztül, mert az elektromos áram bevezetése a mellkasba ritmuszavart okozhat a szívében, ami halálos lehet.

Ezt a készüléket csak a homlokfelszíni bőr kezelésére használják. Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használaton kívül más célra.

VIGYÁZATOK:

Ne hagyjon figyelmen kívül semmilyen allergiás reakciót az elektródabetétekre: Ha bőrirritáció alakul ki, hagyja abba a MYND használatát, mivel a felhasználók egy kis részénél előfordulhat, hogy a gél nemkívánatos reakciót vált ki.

A trigeminális neuralgia és az övsömör az arcidegeket túlérzékennyé teszi, így a MYND használata fájdalmas lehet.

Óvatosan kell eljárni, ha vérzési rendellenességben szenved, mivel az ingerlés fokozhatja a véráramlást a stimulált területre.

Nem oxigéndús környezetben való használatra szánták.

Nem használható gyúlékony érzéstelenítőkkel vagy gyúlékony anyagokkal együtt.

A beteg a tervezett kezelő, és neki kell irányítania a készüléket.

Ne szervelje és ne tartsa karban a készüléket, amíg a betegnél használatban van.

A gél cseréje az egyetlen karbantartási feladat, amelyet a betegnek el kell végeznie.

A karbantartást és minden javítást csak erre felhatalmazott szerv végezhet. A gyártó nem vállal felelősséget az illetéktelen személyek által végzett karbantartás vagy javítás eredményéért.

Szükség esetén áramköri rajzokat, alkatrészlistákat vagy más olyan információkat adunk át, amelyek segítik az erre felhatalmazott szerviz szakembereket a készülék javításában.

Az elhasználódott gélbetétek negatívan befolyásolhatják a teljesítményt vagy más problémákat okozhatnak.

MELLÉKHATÁSOK

- Intolerancia az elektromos ingerlés által okozott paresztéziával szemben
- Intolerancia a homlokokon érzett nyomásérzéssel szemben, fogfájás, nyaki fájdalmak és feszültségtípusú fejfájás a kezelés alatt.
- Ébredés és alvásváltozások
- Hányás és hányinger az ingerlés végén
- Fokozott fülzúgás az ülés alatt
- Enyhe fájdalom az egyik szemöldök felett, zsibbadás a tarkó tájékán, hirtelen elektromos váltakozás érzése.

Kellemetlenség a kezelés alatt: A felhasználók egy kis része nagyon kellemetlennek találhatja az ingerlést. Ez az érzés általában elmúlik, ahogy megszokja. Néhány betegnél azonban ez a kellemetlen érzés megmarad. Ebben az esetben a páciensnek csökkentenie kell az intenzitást (az intenzitás csökkentésére vonatkozó utasításokat lásd az "5.2 Kezelési útmutató" című szakaszban).

Fejfájás a 2. program után: Nagyon ritkán előfordulhat, hogy a 2. program használata után fejfájás jelentkezik. Ez rövid ideig tart, de néhány felhasználó számára megnehezítheti a 2. program használatát. Megjegyzendő, hogy jelenleg nincsenek olyan jelentések, amelyek szerint az 1. program használata fejfájást okozhatna. Ha azonban bármilyen kellemetlen érzés jelentkezik, a felhasználónak figyelembe kell vennie az alábbiakban felsorolt, mellékhatásokkal kapcsolatos tanácsokat.

Nyakfájás: A kezelés kezdetén előfordulhat, hogy a MYND használata közben megfeszülnek a nyakizmai, és ez nyakfájáshoz vezethet. Ha ez előfordul, próbálja meg a fejét a kezelés alatt egy párnára helyezni.

Megjegyzés: A mellékelt elektródabetétek nem tartalmazzak mérhető latexet.

HA A MELLÉKHATÁSOK BÁRMELYIKE ELFOGADHATATLANNÁ VÁLIK, KÉRJÜK, AZONNAL HAGYJA ABBA A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁT.

HA A MELLÉKHATÁSOK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁNAK ABBAHAGYÁSA UTÁN IS FENNÁLLNAK, KÉRJÜK, FORDULJON EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERHEZ.

A KÉSZÜLÉK JÓ MŰKÖDÉSÉNEK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN TARTSA BE A KÖVETKEZŐ TOVÁBBI FIGYELMEZTETÉSEKET:

Vigyázat! Ne merítse a készüléket vízbe, és ne helyezze azt túlzott hőhatás, például kandalló vagy sugárzó fűtőtest, illetve magas páratartalmú források, például porlasztó vagy vízforraló közelébe, mert ez a készülék nem fog megfelelően működni.

Vigyázat! A készüléket tartsa távol a napfénytől, mivel a hosszú távú napfényhatás hatással lehet a gumira, ami miatt az kevésbé lesz rugalmas és megrepedhet.

Vigyázat! Tartsa távol a készüléket a szőszről és portól, mivel a szősznek vagy pornak való hosszú távú kitettség károsíthatja a csatlakozóaljzatot. Tartsa távol a gyermekektől, háziállatoktól és kártevőktől.

Vigyázat! Hőmérséklet és relatív páratartalom a tárolás során: -10°C és +60°C között, 15% és 75% relatív páratartalom között.

Vigyázat! Nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Ne próbálja meg kinyitni vagy módosítani a készüléket. Ez befolyásolhatja a készülék biztonságos működését, és érvényteleníti a garanciát.

Vigyázat! A készülék felületén lévő szilikon és hátoldali gélek érintkezhetnek a beteggel vagy a kezelővel. Ha allergiás ezekre az anyagokra, kerülje az érintkezést, és hagyja abba a használatot.

3. PROGRAMOK

3.1. PROGRAMBEÁLLÍTÁSOK

1. program - Kezelés	
Maximális intenzitás (500 Ω terhelési ellenálláson keresztül)	20 mA (csúcsérték)
Impulzus frekvencia	110 Hz
Impulzus szélesség	200 μ s
Impulzus időtartama	200 μ s
A munkamenet időtartama	60 perc

Az 1. programot migrénes rohamok kezelésére tervezték, és 60 percig tart. Akkor kell alkalmazni, amikor a migrén már jelen van, vagy lehetőleg akkor, amikor a következő migrénes roham első jelei érezhetőek.

Megjegyzés: Egyes migrénes betegeknél a migrénes rohamokkal együtt allodinia is kialakul. Ilyenkor bármilyen bőrstimulációt, beleértve a MYND-et is, fájdalmasnak érznek.

2. program - Megelőzés	
Maximális intenzitás (500 Ω terhelési ellenálláson keresztül)	20 mA (csúcsérték)
Impulzus frekvencia	55 Hz
Impulzus szélesség	200 μ s
Impulzus időtartama	200 μ s
A munkamenet időtartama	20 perc

A 2. program a migrén megelőzésére szolgál, és 20 percig tart. Ezt a programot naponta egyszer kell használni. Rendszeres használata segít csökkenteni a migrénes rohamok gyakoriságát.

3.2. GÉLPÁRNA-TANÁCSADÁS

- A gélpárnák újrafelhasználhatóak, de csak egy páciens számára.
- Annak érdekében, hogy a gélpárnákon keresztül a legjobb vezetőképességet érje el, mindig győződjön meg arról, hogy jó állapotban vannak és ragadósak.
- Használat előtt mindenképpen tisztítsa meg a homlokát.
- Használat után mindig cserélje vissza az átlátszó műanyag bélést a készülék gélpárnáinak tetejére. Tartsa a készüléket és a gélbetéteket az utazótáskában.
- Cserélje ki a gélbetéteket, ha azok elveszítik tapadásukat.
- A rossz csatlakozás kellemetlen érzést és bőrirritációt okozhat.
- Egy bontatlan csomag gélbetét eltarthatósági ideje 2 év. Ezt befolyásolhatja a nagyon magas hőmérséklet vagy a nagyon alacsony páratartalom.

4. TARTALOM

A csomag a következőket tartalmazza:

1 x MYND egység

3 x Újrafelhasználható gélbetét

1 x fejpánt

1 x töltőkábel


1 x utazótáska

1 x használati utasítás

1 x Gyorsindítási útmutató

5. EGYSÉGINFORMÁCIÓ

5.1. VEZÉRLŐSZEREK

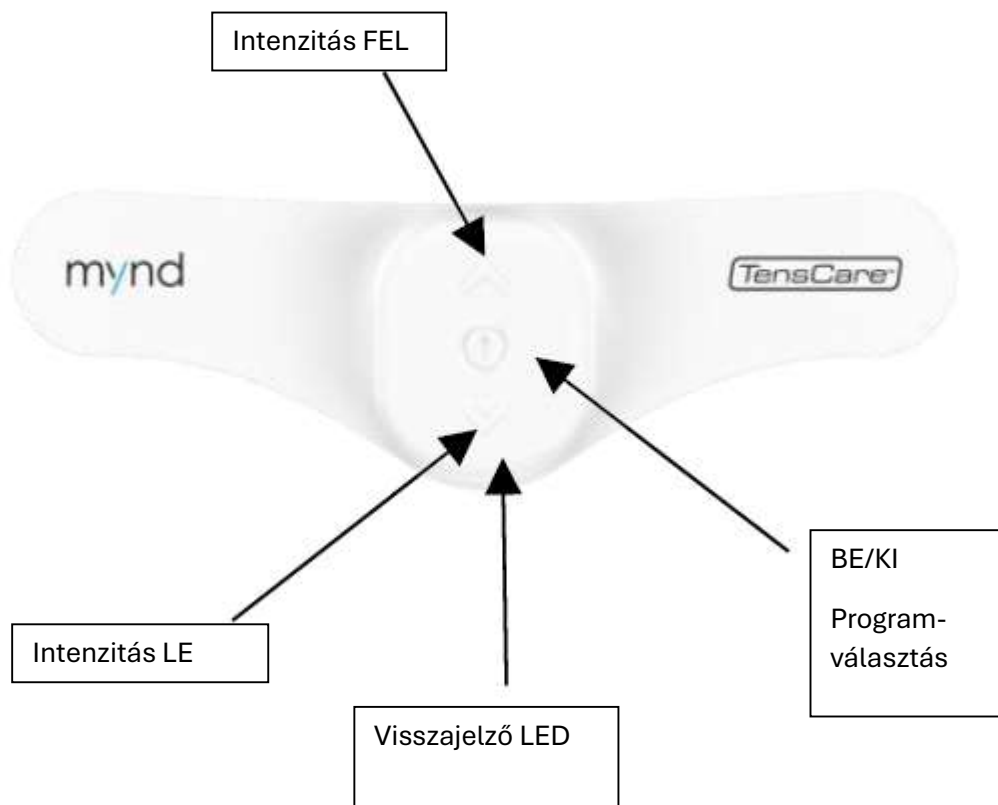

5.2. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ON/OFF

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a készülék ON/OFF gombját, és tartsa lenyomva 1 másodpercig. Hosszú hangjelzés hallatszik, és a fehér LED-lámpák bekapcsolnak.

A készülék automatikusan kikapcsol, amikor a kezelés befejeződik (60 perc az 1. programban és 20 perc a 2. programban). A kezelés végét egy hosszú hangjelzés jelzi, az intenzitás fokozatosan csökken, és a készülék kikapcsol.

Ha manuálisan szeretné kikapcsolni a készüléket, nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az ON/OFF gombot. Hosszú hangjelzés hallatszik (1 másodperc), és a fehér LED-ek fénye kialszik.

Megjegyzés: Mindig ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva, mielőtt a MYND eszközt felhelyezi vagy eltávolítja a homlokáról.

Megjegyzés: A készülék használata előtt mindig tisztítsa meg a homlokot.

PROGRAMVEZÉRLÉS

Az ON/OFF gomb egyben a programválasztó gomb is. A MYND két előre beállított programmal rendelkezik.

A készülék minden bekapcsolásakor automatikusan az 1. program kerül kiválasztásra. Ha a 2. programra kíván váltani, nyomja meg és engedje el a ON/OFF gombot. A 2. program kiválasztását két rövid hangjelzés jelzi.

Az 1. programra való visszaváltáshoz nyomja meg és engedje el az ON/OFF gombot. Egyetlen hangjelzés jelzi, hogy az 1. program van kiválasztva.

Minden egyes alkalommal, amikor új programot választanak, az erősségi szint visszaáll nullára. Ez egy biztonsági funkció, amely enyhíti a hirtelen fellépő túlfeszültség érzését, mivel minden program más-más érzetet kelt.

ERŐSSÉG-ELLENŐRZÉS

A \wedge , \vee jelzésű gombok az erősségszabályozók.

Az intenzitás 0,5 mA-es lépésekben történő növeléséhez nyomja meg és engedje fel a \wedge gombot. Az automatikus növeléshez nyomja meg és tartsa lenyomva a \wedge gombot (gyors növekedés 0,5 mA-es lépésekben). Az intenzitás 0,5 mA-es lépésekben történő csökkentéséhez nyomja meg és engedje el a \vee gombot. Az intenzitás automatikus csökkentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a \vee gombot (gyors csökkenés 0,5 mA-es lépésekben).

Az erősségszabályozók minden egyes megnyomásakor egy rövid hangjelzés hallható.

Az erősségszabályozók használatakor a maximális vagy minimális intenzitás elérését három gyors hangjelzés jelzi.

Lehet, hogy a növekedés első néhány szakaszában semmit sem érez. Folytassa a nyomást, amíg az érzés erős, de kényelmes nem lesz. A használat során további emelésekre lehet szükség, ha a teste hozzászokik az érzéshez. Vegye figyelembe, hogy a maximális 20mA intenzitás elegendő a terápiás hatás eléréséhez, még akkor is, ha úgy érzi, hogy ez az intenzitás már elviselhetővé vált.

INTENZITÁS LED-EK

Az egység 40 erősségi szinttel rendelkezik. Az erősségi szintet a készülék alján található három LED jelzi. Az egyes LED-ek az erősség növekedésével egyre világosabbak lesznek. A minimális és maximális erősségek a következők:

Minimális intenzitás - egy halvány LED

Maximális intenzitás - három fényes LED

A LED-ek automatikusan kikapcsolnak, ha 3 másodpercig nem nyomja meg senki a gombokat.

6. A MYND BEÁLLÍTÁSA ÉS HASZNÁLATA

6.1. AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A MYND beépített újratölthető Li-ion akkumulátorral működik. A készlet egy külön töltőkábelt tartalmaz univerzális USB csatlakozóval.

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a központi LED fehéren villog. Ez körülbelül 4 órával az akkumulátor lemerülése előtt kezdődik (4 óra készenléti állapotban).

Figyelmeztetés: Csak a mellékelt töltőkábelt használja. Más töltők használata veszélyes lehet, és a garancia érvényét veszti.

Az akkumulátor töltése:

Csatlakoztassa az USB-kábelt egy mobiltelefon vagy táblagép töltőaljzatához vagy a számítógép USB-portjához.

Amíg az akkumulátor töltődik, a központi LED-lámpa lassan és többször fehéren villog.

A készülék töltése körülbelül 2-2,5 órát vesz igénybe.

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a fehér LED-lámpa nem villog tovább, és bekapcsolva marad.

Megjegyzés: Az akkumulátor kapacitásának csökkenésének minimalizálása érdekében a készüléket évente újra kell tölteni, függetlenül a használattól.

Megjegyzés: A készülék nem használható töltés közben.

Megjegyzés: Töltési feszültség: töltési áram: 60mA.

Az akkumulátor élettartama

Az akkumulátor élettartama normál használat mellett a maximális teljesítmény 50%-ánál körülbelül 22 óra.

Az akkumulátor élettartama 100%-os kimeneti intenzitás mellett körülbelül 18 óra.

Akkumulátor figyelmeztetések

Ez a termék lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. Az akkumulátor a készülék belsejében van rögzítve, ezért a készülékre vonatkozó figyelmeztetések az akkumulátorra is vonatkoznak. Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, a lítium-ion akkumulátorból sav szivároghat, felforrósodhat, felrobbanhat vagy meggyulladhat, és sérülést és/vagy kárt okozhat.

Ne szűrje át, ne nyissa ki, ne szedje szét, és ne használja nedves és/vagy korrozív környezetben.

Ne tegye ki 60 °C (140 F) feletti hőmérsékletnek.

Ne tegye, tárolja vagy hagyja hőforrások közelében, közvetlen napfényben, magas hőmérsékletű helyen, nyomás alatt lévő tartályban vagy mikrohullámú sütőben.

Ne merítse vízbe vagy tengervízbe, és ne vigye fel nedves bőrre.

Ne zárja rövidre.

Ha az akkumulátor szivárog, és bőrrel vagy szemmel érintkezik, alaposan mossa le sok vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Ne cserélje ki saját elemekkel. A lítium akkumulátorok vagy üzemanyagcellák helytelen cseréje elfogadhatatlan kockázatokhoz vezethet.

Ne cserélje ki az akkumulátort megfelelően képzett személyzet nélkül, különben veszélyt okozhat (például túlmelegedés, tűz vagy robbanás).

Ne helyezze a készüléket töltés közben úgy, hogy neheztse a töltőadapter használatát. A mellékelt töltőadapter a berendezés áramköreinek a hálózati áramellátástól való leválasztására szolgál.

Eltávolítás: Az akkumulátorokat és a készüléket mindig felelősen, a helyi önkormányzati irányelveknek megfelelően kell megsemmisíteni. Ne dobja az elemeket tűzre. Robbanásveszély.

6.2. FELKÉSZÜLÉS AZ ÜLÉSRE


1) Használat előtt biztosítsa, hogy nedves ruhával és szappanos vízzel tisztítsa meg a bőrét. Ha a homlokát kissé nedvesen hagyja, az lehetővé teszi a készülék jobb tapadását és stimulációját.



Megjegyzés: Ne használjon sminkeltávolító termékeket a homlokának tisztításához, mivel ezek zsíros réteget hagynak a bőrön.

2) Az első használathoz vegye ki az egyik gélpárnát a fóliás csomagolásból.

3) Távolítsa el a kék műanyag bélést a gélbetétekről, és helyezze a MYND készülék hátuljára.

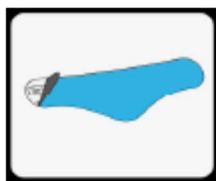

4) Távolítsa el az átlátszó műanyag bélést a készülék hátuljáról. Ügyeljen arra, hogy a gélbetétek a készülékhez tapadva maradjanak.



5) Helyezze vissza az átlátszó műanyag bélést az utazótáskába. A kék bélés kidobható.

6) Helyezze a készüléket a homloka közepére, nagyjából 1 cm-rel a szemöldöke fölé.



A gélbetétek újrafelhasználhatóak. Idővel azonban kevésbé lesznek tapadóképesek. Ha ez megtörténik, távolítsa el a készüléken lévő gélbetétet, és helyezzen fel új gélbetétet.

A Mynd készülékhez egy szövet fejpántot mellékelünk. Bizonyos esetekben szükség lehet ennek használatára, hogy segítsen a készüléket a helyén tartani.

Megjegyzés: Az egyes gélpárnák alkalmazásainak száma a felhasználó bőrállapotától függően változik.

Megjegyzés: A gélpárnák egy páciens számára készültek. A gél egy lehúzható hidrogél (vízbázisú).

Figyelmeztetés: A készülék felhelyezése és eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a MYND ki van kapcsolva.

6.3. KEZELÉSI ÜLÉS

- 1) A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék ON/OFF gombját 1 másodpercig.
- 2) Válassza ki a kívánt programot. A készülék bekapcsolása után mindig az 1. program lesz az alapértelmezett program. Ha a 2. programra kíván váltani, nyomja meg és engedje el a ON/OFF gombot. Két rövid hangjelzést fog hallani.
- 3) Az intenzitás 0,5 mA-es lépésekben történő növeléséhez nyomja meg és engedje fel a \wedge gombot. Az automatikus növeléshez nyomja meg és tartsa lenyomva a \wedge gombot (gyors növekedés 0,5 mA-es lépésekben).

Megjegyzés: Ha az érzés kellemetlen, csökkentse az intenzitást.

6.4. A KEZELÉS UTÁN

A készülék automatikusan kikapcsol, amikor a kezelés befejeződik.

- 1) Annak ellenőrzéséhez, hogy a készülék ki van-e kapcsolva, használja a mellékelt tükröt, és győződjön meg arról, hogy a fehér LED-lámpa ki van kapcsolva. Ha nem, tartsa lenyomva az ON/OFF gombot a kikapcsoláshoz. Vegye le a készüléket a homlokáról úgy, hogy óvatosan lehúzza a készüléket a külső széleinél fogva.
- 2) Helyezze vissza az átlátszó műanyag bélést a gélbetétekre, és tárolja a készüléket az utazótáskában. Ez segít megőrizni a gél ragadását.

Amikor a készüléket nem használják, azt MINDIG az utazótáskában kell tartani.

7. TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Legalább hetente egyszer tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával, enyhe szappan és víz oldatával történő áttöréssel. Vigyázzon, hogy ne érintkezzen az ezüst elektródákkal. Törölje szárazra.

- Ne merítse a MYND készüléket vízbe.
- A szappanon és vízen kívül ne használjon más tisztítószer.

Tárolási élettartam

- Az öntapadós gélbetétek bontatlan csomagjának tárolási ideje 2 év. Ezt befolyásolhatja a nagyon magas hőmérséklet vagy a nagyon alacsony páratartalom.
- Az egységnek nincs meghatározott eltarthatósági ideje.

8. EMC

A vezeték nélküli kommunikációs berendezések, mint például a vezeték nélküli otthoni hálózati eszközök, mobiltelefonok, vezeték nélküli telefonok és bázisállomásaik, walkie-talkie-k befolyásolhatják ezt a berendezést, ezért a készülék bármely részéhez 30 cm-nél (12 hüvelyknél) közelebb nem szabad használni.

(Megjegyzés. Az IEC 60601-1-2:2014 szabvány 5.2.1.1.1. f) pontjában az ME-berendezésekre vonatkozóan megadottak szerint).

Megjegyzés: Kórházi használatra a teljes EMC-tanácsadó táblázat kérésre rendelkezésre áll.

9. ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS HULLADÉKOK ÁRTALMATLANÍTÁSA (WEEE)

A 2012/19/EU európai irányelv egyik rendelkezése, hogy minden elektromos vagy elektronikus eszközt nem szabad háztartási hulladékként kezelni és egyszerűen kidobni. Hogy emlékeztessük Önt erre az irányelvre, az összes érintett terméket mostantól az alábbi ábrán látható, áthúzott kuka szimbólummal jelöljük.

Az irányelvnek való megfelelés érdekében régi elektroterápiás készülékét leadhatja nekünk ártalmatlanításra. Egyszerűen nyomtasson ki egy postaköltséges PACKETPOST RETURNS címkét a www.tenscare.co.uk weboldalunkról, csatolja ezt egy borítékhoz vagy párnázott zacskóhoz, amelyhez a készüléket mellékeli, és küldje vissza nekünk. A kézhezvételt követően feldolgozzuk a régi készülékét alkatrész-visszanyerés és újrahasznosítás céljából, hogy segítsünk megőrizni a világ erőforrásait és minimalizálni a környezetre gyakorolt káros hatásokat.

10. KIEGÉSZÍTŐK

Várható élettartam

- A gép gyakran több mint 5 évig tart, de 2 év garanciát kap. A tartozékokra (töltőkábel, gélpárnák, utazótáska és tükör) nem vonatkozik a garancia.
- Az egyes gélpárnák alkalmazásainak száma a felhasználó bőrállapotától és páratartalmától függően változik.

A gélpárnák és a töltővezeték cseréje beszerezhető a beszállítójától vagy forgalmazójától (az elérhetőségeket lásd a hátsó borítón), a TensCare-től postai úton, telefonon, hitel- vagy bankkártyával, vagy a TensCare weboldalán keresztül.

A következő cserealkatrészek rendelhetők a TensCare-től a www.tenscare.co.uk vagy a +44(0) 1372 723434 címen.

E-MYND 3 darabos csomag MYND gélpárna

11. GARANCIA

Ez a garancia csak a készülékre vonatkozik. Nem vonatkozik a gélpárnákra, a töltőkábelre, az utazótáskára vagy a tükörrre.

TERMÉKGARANCIA INFORMÁCIÓK

Erre a termékre a vásárlástól számított 2 évig gyártási hibáktól mentes garanciát vállalunk.

Ez a garancia érvényét veszti, ha a terméket módosítják vagy megváltoztatják, ha a terméket helytelen használatnak vagy visszaélésnek vetik alá; ha a termék szállítás közben megsérül; ha a felelős gondosság hiánya miatt leejtik; ha a készüléket vízbe merítették; ha a mellékelt írásos használati útmutató be nem tartása miatt keletkezik kár; vagy ha a termék javítását a TensCare Kft. felhatalmazása nélkül végzik el.

Megjavítjuk, vagy saját választásunk szerint díjmentesen kicseréljük az anyag vagy a kivitelezés kijavításához szükséges alkatrészeket, vagy kicseréljük az egész készüléket, és a garancia időtartama alatt visszaküldjük Önnek. Ellenkező esetben árajánlatot adunk a javításra, amelyet az árajánlatunk elfogadásakor végzünk el. A jelen garancia által biztosított előnyök kiegészítik a termékkel kapcsolatos minden egyéb jogot és jogorvoslati lehetőséget, amelyekkel a fogyasztó az 1987. évi fogyasztóvédelmi törvény értelmében rendelkezik.

Árukhoz olyan garanciák tartoznak, amelyek az Egyesült Királyság fogyasztóvédelmi törvényei szerint nem zárhatók ki. Ön jogosult az áru javíttatására vagy cseréjére, ha az áru nem megfelelő minőségű.

Szükség esetén áramköri rajzokat, alkatrészlistákat vagy más olyan információkat adunk át, amelyek segítik az erre felhatalmazott szerviz szakembereket a készülék javításában.

Mielőtt elküldi készülékét szervizbe

Mielőtt beküldi készülékét szervizbe, kérjük, szánjon néhány percet a következőkre:

Olvassa el a kézikönyvet, és győződjön meg róla, hogy minden utasítást betart.

A készülék szervizelésre történő visszaküldése

Kérjük, győződjön meg róla, hogy minden lényeges adatot kitöltött, mielőtt beküldi készülékét szervizbe. Kérjük, győződjön meg arról, hogy elérhetőségei még mindig aktuálisak, és mellékelje a probléma rövid leírását a vásárlási bizonylattal együtt.

Higiéniai okokból kérjük, ne küldjön használt gélpárnákat vagy töltőkábelt. Csak a MYND egységet küldje el.

Kérjük, küldje vissza a készüléket a következő adatokkal:

- Név:
- Cím:
- Irányítószám:
- Telefon:
- E-mail:
- Modell:
- A vásárlás dátuma:
- Csatolja a vásárlást igazoló bizonylatot
- Kiskereskedők neve:

- A kiskereskedők címe:
- Kiskereskedők irányítószáma:
- A probléma rövid leírása:

A visszaküldéseket a következő címre kell küldeni:

TensCare Ltd.

9 Blenheim Road, Epsom, Surrey KT19 9BE, Egyesült Királyság

Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk telefonszámunkon:

+44 (0) 1372 723 434.

A GARANCIA ÉRVÉNYÉT VESZTI, HA A FENTI INFORMÁCIÓK NEM TELJESÜLNEK ÉS NEM HELYESEK.

12. HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a MYND készülék nem működik megfelelően, kérjük, ellenőrizze a következőket:

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A fehér LED-ek nem kapcsolnak be	Lemerült akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort. Lásd a 6.1. szakaszt.
Nincs érzés	Az intenzitás nem elég erős	Növeli az erőt
Hirtelen változás az érzésben	Ha eltávolítja a készüléket, és néhány perc múlva újra alkalmazza, a jelnek sokkal erősebbnek kell lennie.	Mindig állítsa vissza az erősséget nullára, vagy kapcsolja ki a készüléket, mielőtt eltávolítja a készüléket a homlokáról.

Ha a fenti felülvizsgálat nem oldotta meg a problémát, vagy ha váratlan működést vagy eseményeket szeretne jelenteni, illetve visszajelzést szeretne adni, hívja a TensCare-t vagy a helyi kereskedőt (cím a hátsó borítón) tanácsért.

Lépjön kapcsolatba a TensCare ügyfélszolgálatával a +44 (0) 1372 723 434-es telefonszámon. Munkatársaink képzettek, hogy a legtöbb felmerülő problémában segíthessenek Önnek, anélkül, hogy a terméket szervizbe kellene küldenie.

Az európai orvostechnikai eszközrendelet előírja, hogy az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és az ország illetékes hatóságának. Ez megtalálható a következő címen:

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36683/attachments/1/translations/en/renditions/pdf>

13. ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓ

Hullámforma	Alternált monofázisú egyenes derékszögű váltakozás
Amplitúdó (500Ω terhelési ellenálláson keresztül)	20 mA (csúcs) nulla és +ve csúcs között 40 lépésben. +/- 10%
Akkumulátorok	Beépített lítium-ion akkumulátor Modell: WEL 302025 Gyártó: Ganzhou WeAction New energy Co., Ltd. Értékelések 110mAh,0.407Wh, 3.7V
Súly	15 gr.
Méreték	120 x 38 x 11 mm
Biztonsági besorolás	Belső áramforrás. Folyamatos használatra tervezték. Nincs speciális nedvességvédelem.
Szoftver verzió	R5-02
Alkalmazott rész	Gél
Környezeti előírások:	
Működés	Hőmérséklet: 40 °C-ig (a maximális hőmérséklet az alkalmazott rész alatt 40°C-on 42°C) Páratartalom: 15 % és 90 % között, nem kondenzálódik Légköri nyomás: 700hPa és 1060hPa között
Tárolás	Hőmérséklet: -10 °C és 60 °C között Páratartalom: 15 % és 75% között Légköri nyomás: 700hPa és 1060hPa között Az akkumulátor tárolási hőmérséklete: -10 °C ~ +60 °C (≤ 1 hónap) -10 °C ~ + 45 °C (≤ 3 hónap) -10 °C ~ + 28 °C (≤ 1 év) Páratartalom: 45% ~75% RH

Megjegyzés: Az elektromos specifikációk névlegesek, és a normál gyártás miatt eltérhetnek a felsorolt értékektől.

Megjegyzés: Legalább 30 perc szükséges ahhoz, hogy a készülék a minimális/maximális tárolási hőmérsékletről a két használat között felmelegedjen/lehűljön, amíg készen áll a rendeltetésszerű használatra.

A TensCare célja, hogy a lehető legjobb terméket és szolgáltatást nyújtsa Önnek. Meghallgatjuk az Ön javaslatait, és folyamatosan próbáljuk javítani termékeinket. Szeretnénk megismerni termékeink használatának módját és az általuk nyújtott előnyöket is. Ha van valami, amit szeretne megosztani velünk, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

www.tenscare.co.uk

EK-megfelelőségi nyilatkozat CE2797

A Tenscare Ltd. ezúton kijelenti, hogy a termék megfelel az (EU) 2017/745 RENDELET rá vonatkozó rendelkezéseinek. Az orvostechnikai eszköz az (EU) 2017/745 RENDELET IV. melléklete szerint a IIa osztályba sorolták. Az érintett terméket az (EU) 2017/745 RENDELET IX. mellékletének megfelelő minőségirányítási rendszer szerint tervezték és gyártották. Ezt az EU-megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adjuk ki. Nem alkalmazandó "közös előírás".