

FASTBAND öv használati útmutató

A FastBand öv egy kiegészítő tartozék, mely elektrostimulátorhoz csatlakoztatható. Javasolt 2 vagy 4 csatornás stimulátor használata, hogy az öv szolgáltatásait ki lehessen használni.

- mosható, többször használható
- ideális a hasizmok és a derékizmok edzéséhez
- alkalmas deréktáji fájdalmak csillapításához (TENS programokkal).
- az elektródák pozíciója miatt igen hatékony kezeléseket tesz lehetővé
- az öv önállóan nem működik!
- bármely 2 vagy több csatornás elektrostimulátor készülékkel működtethető
- Az öv anyaga neoprén, a maximális derékméret: 100-105 cm.
- Külön vásárolható 40cm-es bővítő. Ezzel együtt a maximális körfogat: 140 cm!
- Az öv higiéniai termék, mivel bőrrel érintkezik.

Használat

A FastBand öv felcsatolása előtt a fekete gumi-elektrodafelületeket alaposan meg kell nedvesíteni (csapvíz megfelelő) vagy a külön kapható kontakt géllal.

A kábeleket az alábbi ábrák szerint csatlakoztassa

Deréktáji izmok kezelése

A-B csatlakozók (egy kábel pozitív és negatív pólusa)



Hasizmok kezelése

Ha a testmérete S-M-L, akkor az egyik kábel (+ és -) pólusait az A-B pontokra, a második csatornát a C-D pontokra csatlakoztassa.

Ha a testmérete XL-XXL, akkor az egyik kábel (+ és -) pólusait az A-B pontokra, a második csatornát a E-F pontokra csatlakoztassa.



Farizmok kezelése

Ha a testmérete S-M-L, akkor az egyik kábel (+ és -) pólusait az A-C pontokra, a második csatornát a B-D pontokra csatlakoztassa.

Ha a testmérete XL-XXL, akkor az egyik kábel (+ és -) pólusait az A-E pontokra, a második csatornát a B-F pontokra csatlakoztassa.

