



# Instrucțiuni de utilizare

SaltDome pentru terapie cu sare cu ultrasunete

## Declarație de conformitate:

Dispozitivul a fost fabricat și verificat în conformitate cu un sistem de management certificat ISO 9001 și îndeplinește toate aspectele specificației convenite conform cerințelor europene.

*Producător: J&R Electronics Co, China*

*Asistență tehnică.*



## Felicitări pentru achiziționarea dispozitivului SaltDome pentru terapie cu sare cu ultrasunete!

Dispozitivul de terapie cu sare SaltDome este conceput pentru uz casnic. Acesta utilizează pulverizarea cu ultrasunete pentru a crea un vapor de soluție salină în rezervorul său, care conține particule de sare cu dimensiuni cuprinse între 1 și 5 microni. Aceste particule pot ajunge în toate părțile plămânilor. Moleculele de sare (NaCl) de pe pereții căilor respiratorii au un efect osmotic, ajutând la dizolvarea secrețiilor și facilitând eliminarea lor. Aceasta ajută la protejerea împotriva bacteriilor, virusilor și ciupercilor, reduce inflamația și îmbunătățește indirect oxigenarea și umidificarea căilor respiratorii.

S-a dovedit că terapia cu sare ajută la prevenirea bolilor respiratorii. Ea protejează cu siguranță împotriva alergiilor respiratorii superioare, chiar și împotriva răcelii și gripei (dar nu garantează că nu vă veți îmbolnăvi).

Pentru bolile respiratorii cronice (BPOC, astm, fibroză chistică etc.), poate fi utilizat ca terapie complementară la tratamentul medical.

Ajută la ameliorarea simptomelor alergice ale căilor respiratorii superioare.

SaltDome oferă aer sărat și ioni negativi care nu numai că îmbunătățesc condițiile care afectează sistemul respirator, dar sunt, de asemenea, benefice pentru eficiența muncii și concentrare.


Dispozitivul de terapie cu sare SaltDome este furnizat cu un adaptor de rețea, manual de instrucțiuni, pahar de amestecare și dozator. Sarea naturală de stâncă Parajdi sau Himalaya este disponibilă opțional.

Acest instrument este ușor de utilizat. Conectați-l, umpleți rezervorul cu saramură și utilizați-l. Deoarece terapia cu sare este eficientă pe o perioadă lungă de timp, este recomandat să o utilizați noaptea, în timp ce dormiți. Așezați dispozitivul pe noptieră lângă pat, la aceeași înălțime cu corpul dumneavoastră, și bucurați-vă de efectele minunate ale sării naturale. Cu cât dispozitivul este mai aproape de dumneavoastră, cu atât este mai eficient - mai puțină sare benefică va intra în plămâni de la un dispozitiv plasat mai departe.

SaltDome este silențios și nu deranjează somnul majorității oamenilor. Dacă sunteți sensibil la sunet, ar trebui să mutați dispozitivul mai departe.

Pentru cele mai bune rezultate, recomandăm utilizarea regulată, pe termen lung.

### Detalii dispozitiv

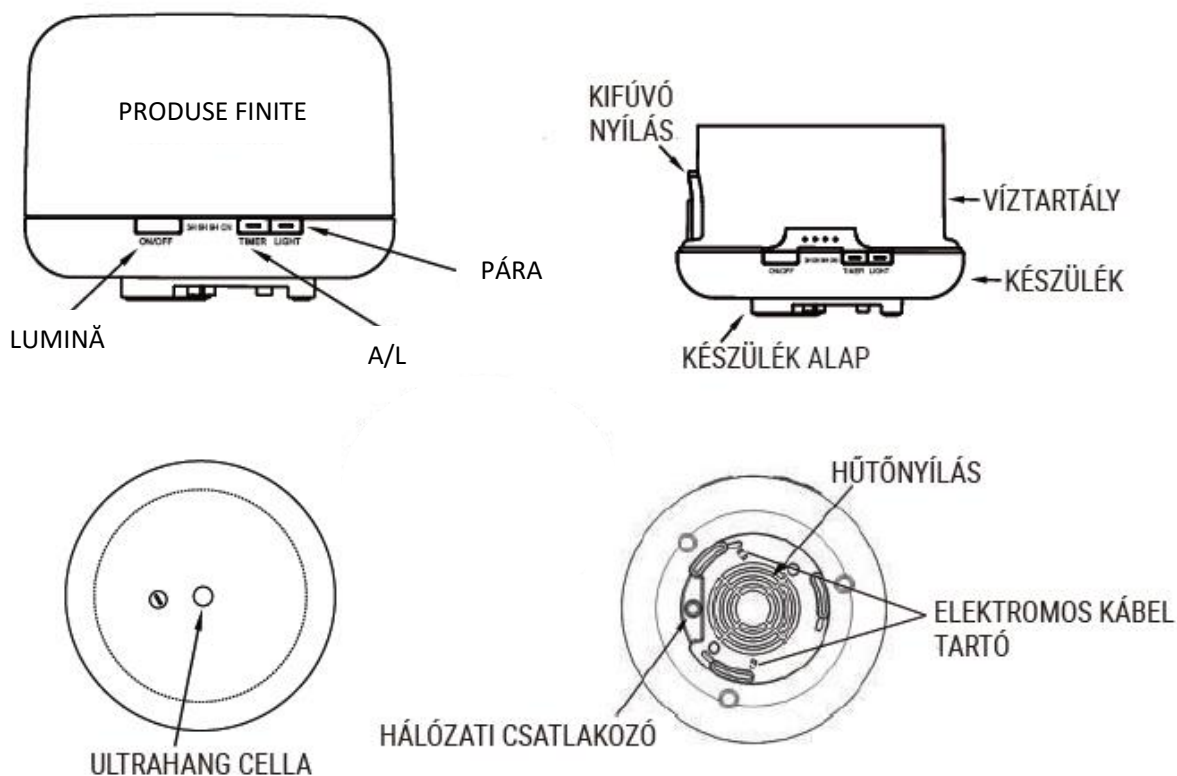

## Utilizare

1. Așezați aparatul pe o suprafață orizontală, stabilă și uscată unde va fi utilizat (noptieră) și ridicați capacul superior. **Fig. 1 (FIG1)** Nu așezați o față de masă sau alt material textil sub aparat, deoarece poate bloca orificiul de aerisire.
2. Întotdeauna conectați mai întâi adaptorul de alimentare la mufa din partea de jos a dispozitivului. **Figura 2 (FIG2).**
3. În 500 ml (o jumătate de litru) de apă, dizolvați 1 lingură (1 gram) de sare gemă (NU MAI MULT!) **Figura 4 (FIG4)**
4. Turnați saramura pregătită în rezervorul de apă, care se va umple apoi. Nivelul apei nu trebuie să depășească nivelul Max. **Figura 5 (FIG5)**  
Dacă nivelul apei este prea ridicat, celula cu ultrasunete nu va putea produce umiditate și apa nu va fi evacuată din rezervor.
5. Este normal să vedeți murdărie pe fundul rezervorului după ce sarea s-a dizolvat. Sarea gemă este naturală și nerafinată. Nu este periculoasă pentru dumneavoastră!  
Nu umpleți cu apă un aparat care este deja pornit!  
Dacă apa de la robinet este dură sau conține clor, utilizați apă dedurizată sau îmbuteliată.
6. Dizolvarea a 1 lingură (1 gram) de sare gemă este suficientă în scopuri medicinale. Nu este nevoie de mai mult! Un efect mai puternic nu este de așteptat de la mai multă sare, ci de la mai mult timp în aerul sărat!
7. Puneți capacul superior în poziție și rotiți priza în direcția dorită.
8. Conectați datapad-ul la rețea. **Figura 6 (FIG6)**  
Utilizați întotdeauna o priză sau o cutie de distribuție protejată împotriva supratensiunilor!
9. Apăsăți butonul POWER pentru a porni. **Figura 9 (FIG9)**  
Aparatul va porni numai dacă există saramură în rezervor. LED-ul "1 oră" care indică starea de pornire se va aprinde și aparatul va începe să funcționeze.  
Particulele microscopice de sare sunt evacuate din aparat prin orificiul superior.  
Cel mult o ușoară ceață este vizibilă, iar acest lucru este normal! Doar foarte puțini vapori sunt emiși din dispozitiv.
10. Apăsăți din nou butonul POWER pentru a seta temporizatorul. Timpul poate fi setat la 1 oră, 3 ore, 6 ore. După timpul setat, dispozitivul se va opri automat. Apăsăți din nou butonul POWER pentru a pune lumina LED pe ON. În această poziție, aparatul va funcționa continuu și se va opri numai atunci când rezervorul este gol. Apăsăți din nou butonul POWER pentru a opri aparatul.
11. A/M (Low/High Vapour Output) - utilizați butonul A/M pentru a reduce/majora cantitatea de vapori. Modificarea este greu de observat cu ochiul liber. Diferența de ieșire a vaporilor între cele două moduri este de aproximativ 20-25%. **Figura 8 (FIG8)**
12. LUMINĂ - apăsarea butonului pornește LED-ul încorporat în dispozitiv și acesta își schimbă culoarea continuu la fiecare câteva secunde. Dacă vă place o culoare, apăsăți din nou butonul pentru a o seta permanent. Apăsăți din nou butonul LIGHT pentru a vă deplasa printre culori. În final, lumina poate fi oprită. **Figura 7 (FIG7)**

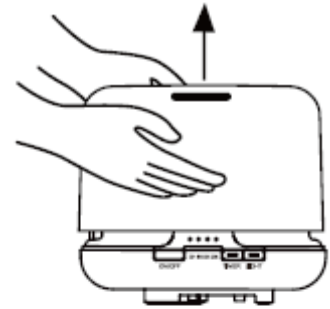


Fig 1

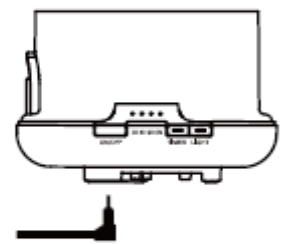


Fig 2

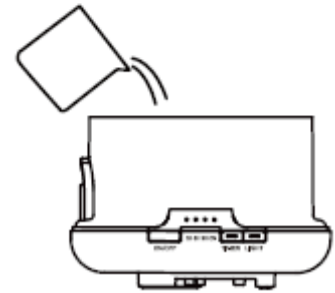


Fig 3



Fig 4

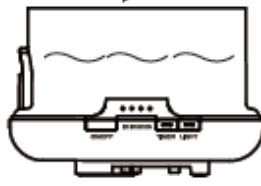


Fig 5

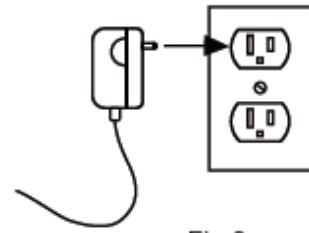


Fig 6

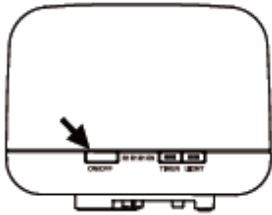


Fig 7

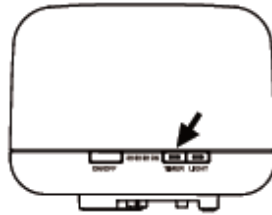


Fig 8

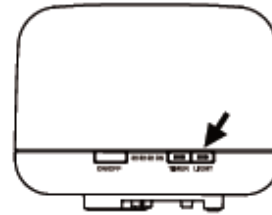


Fig 9

Aparatul se va opri automat atunci când nu mai există saramură în rezervor. Rezervorul de apă se termină în aproximativ 5-9 nopți. Pentru a relua utilizarea, reumpleți rezervorul cu saramură.

După ce unitatea este încărcată, nu înclinați sau mișcați unitatea și nu scoateți capacul superior.

Dacă nu există apă în rezervorul de apă, apăsarea butonului ON / OFF va emite un semnal sonor pentru a vă reaminti să adăugați apă.

Dispozitivul nu va funcționa fără apă.

Utilizarea dispozitivului este recomandată ca un tratament de cel puțin 10-14 zile. Nu lăsați apă în dispozitiv atunci când nu îl utilizați. Goliți și depozitați dispozitivul într-un loc uscat.

## Telecomandă

Dispozitivul poate fi operat și prin telecomandă.



## Întreținere și curățare

La fiecare câteva zile, curățați dispozitivul după cum urmează:

1. Deconectați dispozitivul de la rețea și scoateți capacul.
2. Scurgeți apa rămasă pe partea unde vedeți semnul "DRAIN SIDE".
3. Curățați dispozitivul cu un pahar de acid citric dizolvat în apă caldă și o cârpă moale și uscați cu un șervețel de hârtie (detartrare).
4. Curățați ușor celula cu ultrasunete (mica adâncitură rotundă din partea de jos a rezervorului de apă) cu o cârpă moale.
5. Nu utilizați niciodată alți acizi, enzime sau detergenți, deoarece aceștia pot cauza defecțiuni.
6. În interiorul rezervorului de apă există și un capac interior care poate fi scos pentru curățare. Localizați mânerul și scoateți capacul interior.  
După curățare, introduceți mai întâi ieșirea de aer și apoi apăsați partea laterală a mânerului până când auziți un clic.
7. Pentru a depozita dispozitivul, curățați-l bine în conformitate cu instrucțiunile. Când este uscat, puneți-l în ambalajul original și depozitați-l într-un loc răcoros și uscat.

### **IMPORTANT:**

Utilizați numai o cârpă moale pentru a curăța celula cu ultrasunete. Nu o atingeți niciodată cu un obiect ascuțit sau dur.

Nu scufundați NICIODATĂ partea inferioară a aparatului în apă și aveți grijă să nu pătrundă apă în AIR sau în alte deschideri.

După încărcare, NU mutați dispozitivul dintr-un loc în altul. Scoateți întotdeauna capacul și goliți rezervorul de apă înainte de a-l muta într-un alt loc.

**Condiții de transport și depozitare:** -20 °C - 55 °C, umiditate ≤95%, presiune 70-106 kPa.

**Condiții de funcționare:** 5- 40°C, umiditate 30-80%, presiune 80kPa - 106kPa.

## Date tehnice

Tensiune de intrare: 24V

Putere: 13W

Metoda de umidificare: celulă cu ultrasunete 2.4Mhz

Capacitatea rezervorului de apă: 500ml

Nivel de zgomot: <35dB

Adaptor: intrare 100-240V ~ 50/60Hz

Rezistență la apă: IPX0

Dimensiunile dispozitivului: 168x121mm

Greutate: aproximativ 520 gr.

## Măsuri de precauție

Vă rugăm să citiți și să respectați următoarele:

- Țineți întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, plană și nivelată. Nu așezați o pernă sau o pătură dedesubt, deoarece aceasta va bloca orificiile de ventilație de dedesubt, cauzând supraîncălzirea și defectarea aparatului.
- Nu umpleți niciodată apa peste marcajul "MAX".
- Nu adăugați mai multă sare în apă decât se recomandă. Mai multă sare nu dă un efect mai puternic asupra sănătății! Pentru un efect mai puternic, petreceți mai mult timp în aburii de sare!
- Utilizarea unei soluții de sare prea concentrate (mai multă sare decât cea recomandată) nu va crește efectul, dar va duce la o funcționare defectuoasă a aparatului (se va depune pe ventilator și îl va împiedica să se rotească).
- Utilizați sare gemă naturală și fără aditivi, cum ar fi sarea gemă Parajdi sau Himalaya.
- Nu utilizați sare de mare, sare care conține iod sau alți aditivi (impuritățile din acestea nu sunt bune pentru plămâni).
- Dacă rezervorul este gol, nu porniți dispozitivul.
- Urmăriți instrucțiunile de întreținere și curățați aparatul în mod regulat pentru a preveni funcționarea defectuoasă a acestuia.
- Deconectați întotdeauna sursa de alimentare înainte de întreținere.
- După utilizare, turnați apa rămasă prin "partea de scurgere" a rezervorului și ștergeți dispozitivul cu o cârpă curată și uscată.
- Păstrați departe de lumina directă a soarelui, surse de căldură și aer condiționat.
- Nu înclinați dispozitivul, deoarece apa poate pătrunde în partea inferioară și poate provoca o funcționare defectuoasă.
- Nu utilizați pentru mai mult de 10 ore la un moment dat. Așteptați 60 de minute înainte de repornire pentru a evita deteriorarea celulei cu ultrasunete.
- Nu adăugați uleiuri esențiale sau substanțe de aromaterapie. Parfumurile chimice, condimentele sau impuritățile vor cauza defecțiuni.
- Utilizați numai apă de la robinet, nu utilizați apă minerală, apă minerală, apă Salvus sau apă de spa, deoarece acestea pot deteriora aparatul.
- Nu mișcați dispozitivul în timpul utilizării.
- Nu atingeți nicio parte a produsului cu mâinile ude.
- Păstrați departe de copii și animale de companie.
- Cablul nu trebuie să se încrucișeze și nu trebuie să aplice niciodată o forță de tracțiune puternică în niciun punct.
- Dacă simțiți un miros de arsură, deconectați imediat.
- Nu deconectați niciodată fișa de alimentare în timp ce aparatul este în uz.

### AVERTISMENT!

***Dacă se preconizează că aparatul nu va fi utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp (plecarea în vacanță, plecarea pentru câteva zile), goliți rezervorul și uscați-l, deoarece apa rămasă în aparat și care se evaporă atunci când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp poate deteriora aparatul.***

***Dacă rețeaua dvs. electrică nu este protejată împotriva supratensiunilor și nu utilizați o bară de curent protejată împotriva supratensiunilor, scoateți adaptorul din priză în caz de furtună sau fulger.***



## Rezolvarea problemelor

Dacă dispozitivul nu funcționează corect, vă rugăm să verificați următoarele:

Lipsa defectelor	Cauza posibilă	Soluția propusă
Nu pornește - se oprește devreme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Există suficientă apă în rezervor?</li> <li>Cablul de alimentare este conectat corect?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umpleți rezervorul cu apă</li> <li>Deconectați și verificați cablurile, apoi reconectați-le cu atenție.</li> </ul>
Ceață anormală sau absentă	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nu este suficientă apă</li> <li>Prea multă apă</li> <li>Celula cu ultrasunete este contaminată?</li> <li>Învelitoarea și căptușeala interioară sunt instalate incorect?</li> <li>Intrarea de aer din partea de jos a dispozitivului este blocată din anumite motive?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se umple cu suficientă apă.</li> <li>Nu umpleți niciodată rezervorul de apă peste linia MAX.</li> <li>Vă rugăm să consultați instrucțiunile de întreținere pentru curățarea corespunzătoare a celulei cu ultrasunete.</li> <li>Scoateți-l și înlocuiți-l corespunzător pentru a vă asigura că formarea vaporilor nu este împiedicată.</li> <li>Curățați sau deblocați orificiul de admisie.</li> <li>Fluxul de aer restricționat are un efect asupra formării vaporilor.</li> </ul>
Scurgeri de apă din dispozitiv	<ul style="list-style-type: none"> <li>Învelitoarea și căptușeala interioară sunt instalate incorect?</li> <li>S-a răsturnat dispozitivul?</li> <li>Temperatură scăzută sau umiditate ridicată?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scoateți-l și înlocuiți-l corespunzător pentru a vă asigura că formarea vaporilor nu este împiedicată.</li> <li>Urmați instrucțiunile pentru deversări accidentale.</li> <li>În aceste condiții, condensul se condensează rapid în picături de apă.</li> </ul>
Când conectez conectorul din partea de jos, se produc scântei	Ați conectat deja adaptorul la priză și conectați cablul direct la dispozitiv ca o a doua conexiune.	Conectarea cablului în loc de sub curent va provoca un mini-circuit (scântelele indică acest lucru!), iar această conexiune (incorectă) poate deteriora componentele electronice, distrugând chiar dispozitivul la prima conectare. În orice caz, conectați mai întâi priză din partea de jos a dispozitivului, apoi conectați adaptorul în priză.
După o pană de curent (sau după o furtună majoră), dispozitivul nu va porni	Fluctuațiile de curent, "vârful" datorat curentului de întoarcere, pot deteriora dispozitivele electronice (toate dispozitivele electrice sunt susceptibile la acest lucru).	Dacă casa sau apartamentul dvs. nu are protecție la supratensiuni, trebuie să utilizați SaltDome de la o sursă de alimentare de distribuție sau neîntreruptibilă care îl protejează de supratensiuni. În plus, în timpul unei furtuni cu fulgere, este o idee bună să deconectați adaptorul de alimentare.
Nu am folosit-o de luni de zile, acum vreau să o folosesc din nou, dar nu pornește.	Apa rămâne în rezervor după ce utilizarea obișnuită a aparatului a încetat. Apa se evaporă, condensează în interiorul aparatului și corodează componentele electrice.	Dacă nu mai utilizați aparatul, chiar și pentru câteva zile, goliți apa și uscați rezervorul și capacul. Puneți aparatul deoparte.



## Atenție

Cantitatea și intensitatea vaporilor produși variază, dar acest lucru nu este considerat un defect. Factorii care influențează cantitatea de vapori includ cantitatea de apă din rezervor, umiditatea și temperatura camerei și fluxul de aer.

Dacă nu există apă în rezervor, apăsarea butonului PAPER va determina aparatul să "bipăie" de 3 ori pentru a vă reaminti să adăugați apă. Aparatul nu va funcționa fără apă.

În cazul în care aparatul se răstoarnă în timpul utilizării, vă rugăm să urmați pașii de mai jos pentru a evita funcționarea defectuoasă.

- Scoateți aparatul din priză și îndepărtați capacul.
- Turnați apa rămasă din rezervorul de apă.
- Scuturați ușor aparatul pentru a scurge apa care s-ar putea afla în carcasă, apoi lăsați să se usuce timp de cel puțin 24 de ore.

## **Garanția și executarea garanției**

Saltdome este garantat timp de 12 luni de la data achiziției, iar adaptorul de alimentare timp de 6 luni.

Pentru reparații în garanție sau în afara garanției, vă rugăm să returnați dispozitivul la adresa de mai jos.

**Adresa:** Scart Ltd - Service. 2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.

Puneți-l întotdeauna în ambalaj:

- Dispozitiv
- sursa de alimentare
- telecomandă (dacă o utilizați)
- scurtă descriere a erorii
- o copie a facturii (dar este suficient un număr de factură sau un număr de comandă)
- adresa de retur
- numărul de telefon (vă putem contacta dacă aveți întrebări)
- adresa de e-mail (vă putem contacta dacă avem întrebări)
- în cazul în care aparatul nu mai este în garanție, indicați dacă doriți neapărat să fie reparat sau solicitați o ofertă pentru costul preconizat.

### **Serviciul clienți:**

Scart Ltd.

2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.

Tel: +36 53 200108

info@medimarket.hu - [www.medimarket.hu](http://www.medimarket.hu)