


Ova 3 Menstruációs fájdalomcsillapító



Használati útmutató

Gyorsindítási útmutató

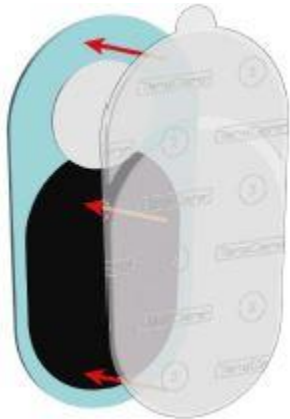

1. Hidrogélek felvitele az elektródákra



2. Helyezze az elektródákat a helyükre.



3. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1 másodpercig.



4. Válassza ki a kívánt programot a P gomb megnyomásával.



5. Az intenzitás szabályozása a + és - gombokkal.



6. Aktiválja a fűtési üzemmódot a fűtés gomb megnyomásával.

1. Bevezetés

Az Ova 3 Menstruációs fájdalomcsillapító készülék a TENS technológiát használja az azonnali és tartós fájdalomcsillapítás érdekében. A kicsi és diszkrét készülék egész nap viselhető a ruházat alatt, így biztonságos és hatékony menstruációs fájdalomcsillapítást biztosít a normális, aktív életmód fenntartása mellett.

Az Ova 3 a fájdalomcsillapító programok mellett nyugtató hőterápiát is kombinál. A hőterápia segít javítani a vérkeringést és ellazítja az izmokat a nyugtató enyhülés érdekében.

Az Ova 3 használatának klinikai előnyei a következők:

Az életminőség javulása a menstruációs fájdalommal kapcsolatban.

Fájdalomcsillapítás az elsődleges dysmenorrhoeával kapcsolatos fájdalomban.

2. Rendeltetésszerű használat

Az Ova 3-t úgy tervezték, hogy az otthoni egészségügyi környezetben az elsődleges menstruációs fájdalom (dysmenorrhoea) tüneteinek kezelésére használják.

Az Ova 3 segíthet enyhíteni a másodlagos menstruációs fájdalmakat is, amelyek olyan betegségek miatt jelentkeznek, mint az endometriózis, a mióma vagy a kismencedencei gyulladásos betegség.

Az Ova 3 felnőttek (18+) számára alkalmas, akik képesek a készüléket kezelni és megértik az utasításokat.

A készülék alkalmas gyermekek (12+) felügyeletével történő használatra.

Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használaton kívül más célra.

Figyelmeztetés: Ha nem biztos a fájdalom okában, akkor forduljon orvoshoz az ok megállapítása és a megfelelő kezelés meghatározása érdekében.

3. Tartalom

1 x Ova 3 stimulátor pár

2 x elektródák

1 x Ova 3 hidrogél csomag (2 darabos csomag)

1 x Micro-USB kábel

1 x tároló tok

1 x felhasználói kézikönyv



Biztonsági iránymutatások

Ellenjavallatok

Ne használja, ha pacemakerrel rendelkezik (vagy ha szívritmuszavara van), illetve bármilyen elektronikus orvosi eszközzel. A készülék elektronikus orvosi eszközökkel való használata a készülék hibás működését okozhatja. A beültetett készülék közvetlen közelében történő stimuláció hatással lehet egyes modellekre. A nyak elülső részén történő stimuláció befolyásolhatja a szívritmust. A mellkason keresztül történő nagyon erős stimuláció extra szívverést okozhat.

Ne használja, ha Ön terhes vagy terhes lehet. Nem ismert, hogy a TENS befolyásolhatja-e a magzat fejlődését.

A terhesség későbbi szakaszában ne használja a hason. Azonnal hagyja abba a használatát, ha váratlan összehúzódásokat tapasztal.

Figyelmeztetések

NE használja vezeték, gépkezelés vagy hasonló, izomkontrollt igénylő tevékenységek során. A laza elektródák vagy a hirtelen érintkezés változása rövid ideig tartó önkéntelen izommozgásokat okozhat.

NE használja a nem diagnosztizált fájdalom elfedésére vagy enyhítésére. Ez késleltetheti a progresszív állapot diagnózisát.

NEM szabad használni, ha a kezelt területen: aktív vagy feltételezett rákos megbetegedés, vagy nem diagnosztizált, rákos megbetegedéssel járó fájdalom áll fenn. A megerősített vagy feltételezett rosszindulatú daganatos betegségen keresztül történő közvetlen stimuláció kerülendő, mivel az serkentheti a növekedést és elősegítheti a rákos sejtek terjedését.

NE használjon elektródákat a nyak elülső részén. A nyak elülső részén történő ingerlés befolyásolhatja a szívritmust vagy a torok összehúzódását okozhatja.

NE használjon elektródákat a mellkason keresztül. A mellkason keresztüli nagyon erős stimuláció extra szívverést és/vagy ritmuszavarokat okozhat a szívében, ami halálos lehet.

NE használja, ha egyidejűleg nagyfrekvenciás sebészeti berendezéshez van csatlakoztatva, mivel ez égési sérüléseket okozhat a stimulátor elektródáinak helyén és a stimulátor esetleges károsodását eredményezheti.

NEM szabad rövidhullámú vagy mikrohullámú készülék közelében (pl. 1 m) használni, mivel ez instabilitást okozhat a stimulátor kimenetében.

NE használjon elektródákat a mellkas közelében, mivel ez növelheti a szívfibrilláció kockázatát.

Ne használja a hő funkciót, ha nem érzékeli a hőmérsékletet.

Ne használja a hőfunkciót olyan izmokon vagy ízületeken, amelyek duzzanatot vagy ödémát mutatnak. A hő súlyosbíthatja a fájdalmat és/vagy az állapotot.

Ne használja, ha a kismedencei régióban gyenge az érzékelése. Előfordulhat, hogy nem tudja biztonságosan szabályozni az ingerlés intenzitását.

Ne használja, ha a készülék bármilyen mellékhatását tapasztalja, és azonnal forduljon egészségügyi szakemberhez.

Figyelmeztetések

Óvatosan kell eljárni, ha vérzési rendellenességben szenved, mivel az ingerlés fokozhatja a véráramlást a stimulált területre.

Óvatosan kell eljárni, ha epilepszia gyanúja vagy diagnózisa áll fenn, mivel az elektromos stimuláció befolyásolhatja a rohamküszöböt.

Óvatosan kell eljárni, ha a készüléket a testen viselt elektródákkal ellátott megfigyelőberendezéshez csatlakoztatott készülékkel egyidejűleg használják. Ez zavarhatja a megfigyelt jeleket.

A közelmúltban végzett sebészeti beavatkozásokat követően óvatosan kell eljárni. Az ingerlés megzavarhatja a gyógyulási folyamatot.

Nem oxigéndús környezetben való használatra szánták.

Nem használható gyúlékony érzéstelenítőkkel vagy gyúlékony anyagokkal együtt.

A páciens a tervezett kezelő.

Ne szervizelje és ne tartsa karban a készüléket használat közben.

A karbantartást és minden javítást csak erre felhatalmazott szerv végezhet. A gyártó nem vállal felelősséget az illetéktelen személyek által végzett karbantartás vagy javítás eredményéért.

Szükség esetén áramköri rajzokat, alkatrészlistákat vagy más olyan információkat adunk át, amelyek segítik az erre felhatalmazott szerviz szakembereket a készülék javításában.

Ne engedélyezze a használatát olyan gyermekek számára, akik nem képesek megérteni az utasításokat, vagy kognitív fogyatékossgal élő személyek, pl. Alzheimer-kórban vagy demenciában szenvedők számára.

5 év alatti gyermekektől távol tartandó. Hosszú kábel - a csecsemőknél fennáll a fojtogatás veszélye.

Ha a hőfunkciót túl forrónak érzi, azonnal hagyja abba a kezelést. A TENS programokat hő nélkül is folytathatja.

A kimeneti hőmérséklet az Ön bőrének állapotától, korától, használati környezetétől stb. függően változhat.

Tartsa távol a készüléket a napfénytől, mivel a hosszú távú napfényhatás hatással lehet a gumira, ami miatt az kevésbé lesz rugalmas és megrepedhet.

Hőmérséklet és relatív páratartalom a tárolás során: -25°C és $+70^{\circ}\text{C}$ között, 0 és 93% között
relatív páratartalom a szállítás során: -25°C és $+70^{\circ}\text{C}$ között, 0% és 93% között relatív páratartalom.

Nincsenek szervizelhető felhasználói alkatrészek. Ne próbálja meg kinyitni vagy módosítani a TENS egységet. Ez befolyásolhatja a készülék biztonságos működését, és érvényteleníti a garanciát.

Megjegyzés: A TENS használatának nincs ismert mellékhatása, és a hosszú távú TENS használat nem káros.

Megjegyzés: Az Ova 3 nem rendelkezik alapvető teljesítményjellemzőkkel. A készülék meghibásodása nem okoz elfogadhatatlan klinikai kockázatot a felhasználó számára.

5. Az Ova 3 használata

Felkészülés a munkamenetre

A hidrogélek felhordása

A legjobb eredmény elérése érdekében törölje tisztára és szárítsa meg a test célzott területét.


Vegye ki a hidrogéleket a műanyag zacskóból.

Először távolítsa el a színes műanyag bélést, és helyezze fel az elektródák alsó felületére.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a hidrogélt helyesen igazítja, mielőtt az elektródák alsó felületére felviszi.

Hagyja az átlátszó műanyag bélést a zseléken, amíg készen nem áll a párnák testre helyezésére.

Megjegyzés: Fontos, hogy a béléseket ebben a sorrendben távolítsa el. Biztosítsa, hogy az egyik bélést megtartsa, hogy a kezelés befejezése után újra felhordhassa a géltre.

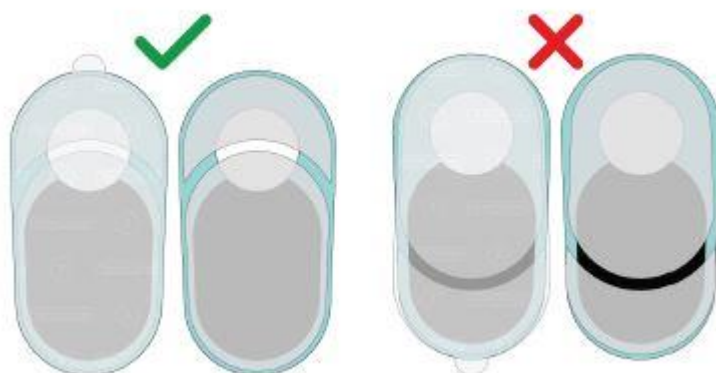


Az elektródák felhelyezése

Távolítsa el a 2. címkével ellátott átlátszó műanyag betéteket, és helyezze az elektródákat a testre.

Javasoljuk, hogy az elektródákat a három pozíció egyikében helyezze el.

A TENS stimuláció az idegek elhelyezkedésétől függően másképp működik, ezért fontos, hogy kipróbálja ezeket a pozíciókat, hogy megtalálja, melyik biztosítja a legnagyobb fájdalomcsillapítást.


Elöl, függőlegesen Az ágyék környékén helyezze a párnákat függőlegesen, egymástól kb. 10 cm (4 hüvelyk) távolságra.

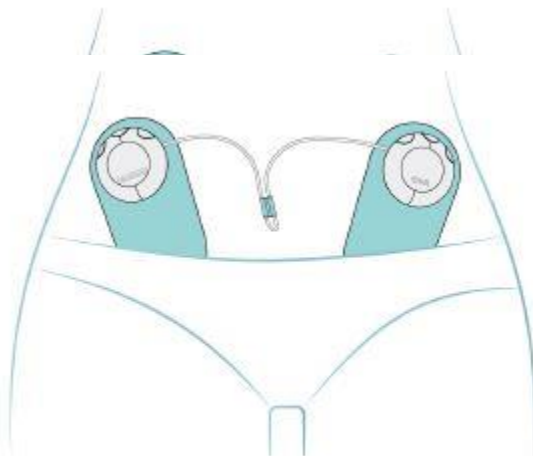

Az elülső oldalon, átlós formátumban

Az ágyéka közelében helyezze el a párnákat V alakban, a párnák alsó végénél egymástól körülbelül 10 cm-re (4 hüvelykre) szűkülve.

A hát alsó részén

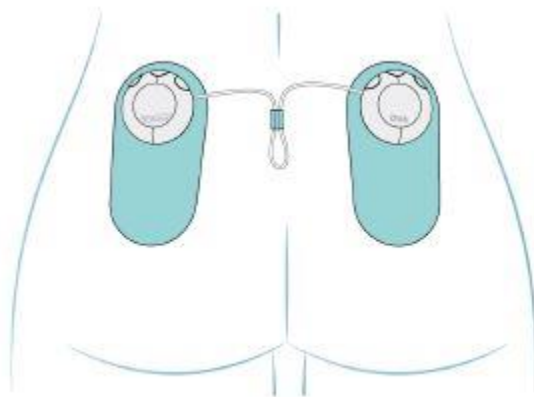

Helyezze a párnákat függőlegesen a gerinc mindkét oldalára, egymástól körülbelül 10 cm (4 hüvelyk) távolságra, úgy, hogy az elektródák alja ne legyen magasabb, mint a fenék felső része.


Mivel minden ember teste más és más, az Ova 3 olyan elektródákkal van ellátva, amelyek elég nagyok ahhoz, hogy még akkor is hatékonyak legyenek, ha nem pontosan mindhárom dermatómán helyezkednek el. Ha a párnák helyesen vannak elhelyezve, az Ova 3 jól fog működni.

Ezért, ha harminc perc elteltével nem érhető el jelentős enyhülés, vagy kissé mozgassa el az elektródákat, vagy próbálja meg egy másik pozíciót.

A stimulátorok csatlakoztatása

Miután az elektródákat a testre erősítette, csatlakoztassa mindkét stimulátort a mágneses rögzítési ponton keresztül.


Megjegyzés: A stimulátort a megfelelő tájolásban kell csatlakoztatni az elektródához. Ha mágneses ellenállást érez, fordítsa el a stimulátort 180°-kal, és próbálja meg újra

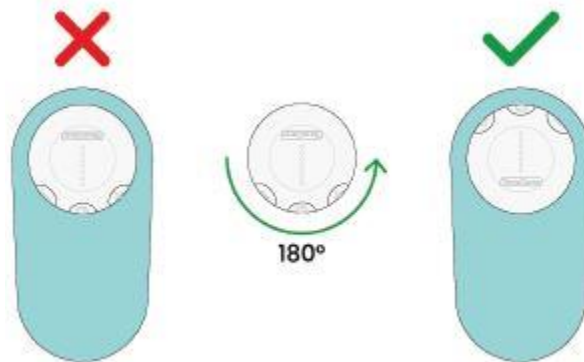

csatlakoztatni.

Vezérlők és interfész

Az Ova 3 két stimulátorral (hő és elektromos) rendelkezik, mindkettő külön LED kijelzővel.

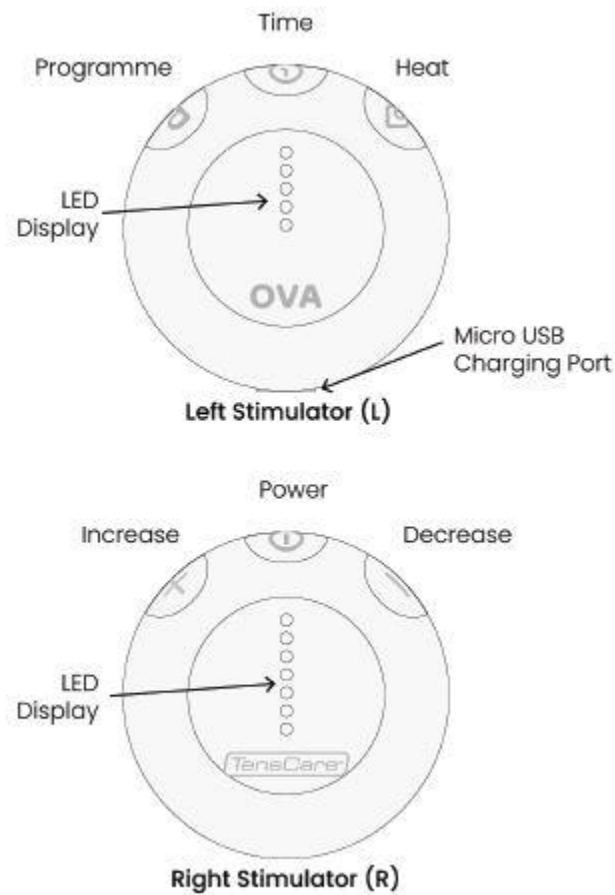


A LED kijelzők az egyes stimulátorok gombjaihoz tartoznak.

Megjegyzés: Amikor a programparaméterek beállításához az üzemmódok között váltogat, a fehér LED-ek egyszer felvillannak.

Megjegyzés: Mindkét stimulátor LED-jei automatikusan kikapcsolnak 10 másodperc után, ha nem nyomja meg a gombokat. A LED-ek újraindításához nyomja meg bármelyik gombot.

Munkamenet befejezése


1) Az Ova 3 bekapcsolása

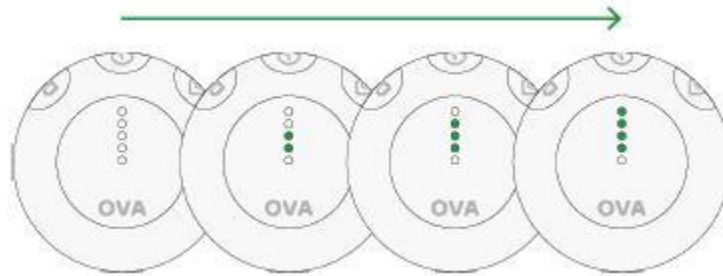

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a készülék bekapcsoló gombját körülbelül 1 másodpercig, amíg a LED kijelzőn megjelenik. A készülék a legutóbb használt programmal indul.

Megjegyzés: Az Ova 3 automatikusan kikapcsol, ha mindkét erősségszabályozó 1 percig nullára van állítva.

2) Program kiválasztása

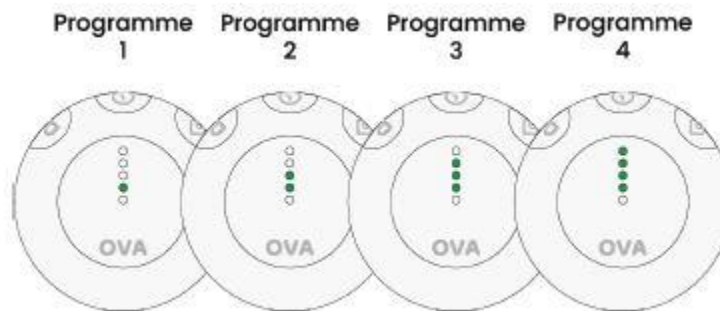

A kívánt program kiválasztásához nyomja meg egyszer a programgombot a programválasztó üzemmódba való belépéshez. (Lásd a 6. fejezet Fájdalomcsillapító programok)


A programválasztó üzemmódban a programgomb ismételt megnyomásával válthat a rendelkezésre álló programok között.

Ezt egy rövid hangjelzés jelzi, valamint a LED kijelzőn is megjelenik.

Megjegyzés: Az Ova 3 bekapcsolásakor az utolsó program- és időzítőbeállítások alapértelmezettként lesznek beállítva.

Megjegyzés: Ha a program gombot ülés közben megnyomja, a kiválasztott program megváltozik, és az intenzitás 0-ra áll vissza.

3) Kezelési idő kiválasztása

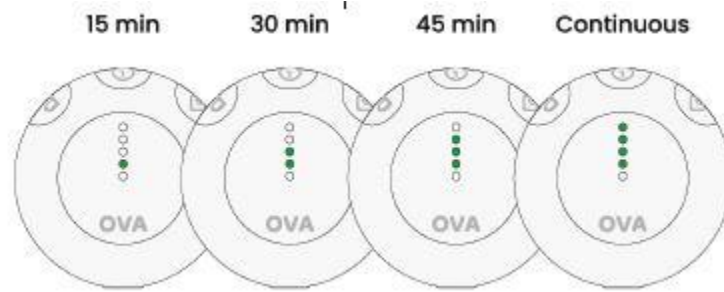

A kezelési idő beállításához nyomja meg egyszer a kezelési idő gombot, hogy belépjen a kezelési idő kiválasztási módba.

Ha a kezelési idő kiválasztási módban van, nyomja meg többször a kezelési idő gombot a rendelkezésre álló kezelési idők közötti váltáshoz.

Megjegyzés: Az Ova 3 alapértelmezés szerint folyamatos kezelési időre van beállítva.

4) Az intenzitás beállítása




Az intenzitás beállításakor ügyeljen arra, hogy olyan érzést érjen el, amelyet erősnek, de kényelmesnek érez.

Állítsa be az intenzitást a + vagy - gombok ismételt megnyomásával. Az intenzitás gyors növeléséhez tartsa lenyomva a + vagy - gombokat.

Amint növelte az intenzitást, kezdődik a foglalkozás. A bal oldali stimulátoron lévő 4 fehér LED egyszer felvillan, majd a hátralévő kezelési időt mutatja.

A LED-ek 15 perces időközönként, csökkenő sorrendben kapcsolnak ki.

Ha a folyamatos kezelési idő van kiválasztva, a legfelső LED villogni fog a kezelés időtartama alatt.

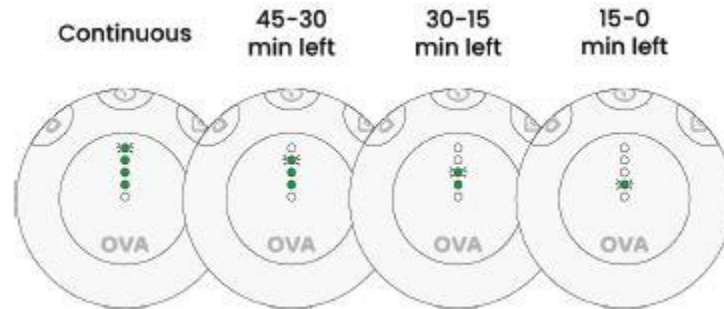

Megjegyzés: Alacsony intenzitásnál gyakran előfordul, hogy nem érezhető semmilyen érzés. A teste is hozzá szokhat az érzéshez. Folytassa az intenzitás növelését, amíg az érzés erős, de kényelmes nem lesz.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az egyik párnában több érzést érez, mint a másikban. Ez normális - attól függ, hogy az elektródák hol helyezkednek el az idegekhez képest.

Csatlakozási hiba kijelzése

Amikor az ingerlőket az elektródához csatlakoztatja, az intenzitás mindig 0-ra áll vissza.

Ha a stimulátort aktív állapotban leveszik az elektródáról, vagy ha rossz a bőrrel való érintkezés, csatlakozási hiba lép fel, és az intenzitás 0-ra áll vissza.


A csatlakozási hibát 3 hangjelzés és a LED kijelző jelzi; az összes fehér LED gyorsan villog.

A munkamenet újraindításához győződjön meg arról, hogy a stimulátorok és az elektródák megfelelően vannak-e csatlakoztatva, és növelje az intenzitást 10 másodpercen belül a munkamenet folytatásához.

Megjegyzés: Csatlakozási hiba esetén az összes kezelőszerv csak akkor működik, ha az Ova 3 elektródák és stimulátorok megfelelően újra csatlakoztatva vannak.

Megjegyzés: Ha kapcsolódási hiba lép fel, és 1 perc elteltével nem történik intézkedés, a készülék automatikusan kikapcsol.

5) Hőterápia aktiválása

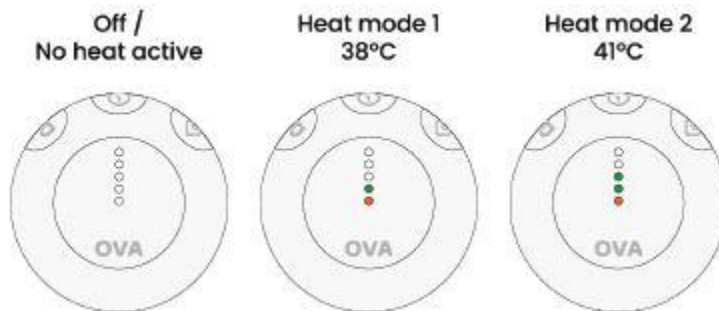

A hőterápia a TENS fájdalomcsillapító programokkal párhuzamosan is alkalmazható.

A hőterápia aktiválásához nyomja meg egyszer a hőgombot a hőterápiás üzemmódba lépéshez.

Ha hőterápiás üzemmódban van, nyomja meg ismételtelen a hőgombot a rendelkezésre álló hőmódok közötti váltáshoz.

Ezt egy rövid hangjelzés jelzi, valamint a LED kijelzőn is megjelenik.

Az Ova 3 két fűtési móddal rendelkezik: alacsony és magas.

Megjegyzés: A hőmérséklet további emelése előtt hagyjon elegendő időt a készülék felmelegedésére.

A hőterápia 10 percig tart, mielőtt automatikusan kikapcsol. Ha a használt TENS program hátralévő kezelési ideje kevesebb, mint 10 perc, a hőterápia a TENS kezelés befejeztével kikapcsol.

Ajánlott a hőterápiát egyszer alkalmazni a kezelés elején a nyugtató enyhülés érdekében.

Vigyázat! Ha a hőterápia használata során bármikor fájdalmasnak vagy kényelmetlenül érzi magát, kapcsolja ki a hőt.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a hő üzemmód nem kapcsolható be túlmelegedés vagy az akkumulátor nem elegendő élettartama miatt. Ha a hő üzemmód nem kapcsolható be, a narancssárga LED-ek minden stimulátoron gyorsan 3 alkalommal villogni fognak. Ez addig ismétlődik, amíg a készülék el nem éri a megfelelő hőmérsékletet, vagy a készüléket fel nem töltik.

A munkamenet után

A munkamenet befejeztével az Ova 3 automatikusan kikapcsol.

A készülék kézi kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.


Vegye le a stimulátorokat az elektródákról úgy, hogy óvatosan kiemeli a stimulátort a mágneses portból.

Távolítsa el az elektródákat a bőréről az elektróda sarkától kezdve. Ügyeljen arra, hogy a hidrogél eltávolításra kerüljön a testről, és maradjon az elektródákhoz rögzítve.

Helyezze fel újra a bélést az elektródák hátoldalán lévő hidrogélre. Tegye vissza az elektródákat és a stimulátorokat a tárolótáskába. A megfelelő tárolás segít maximalizálni a gél élettartamát.

Győződjön meg róla, hogy a hidrogél betéteket kicseréli, amikor azok elveszítik ragadósságukat.

Óvatosan húzza le a hidrogélt az elektródákról. A testtel való rossz kapcsolat hatástalan kezelést, kellemetlen érzést és bőrirritációt okozhat.

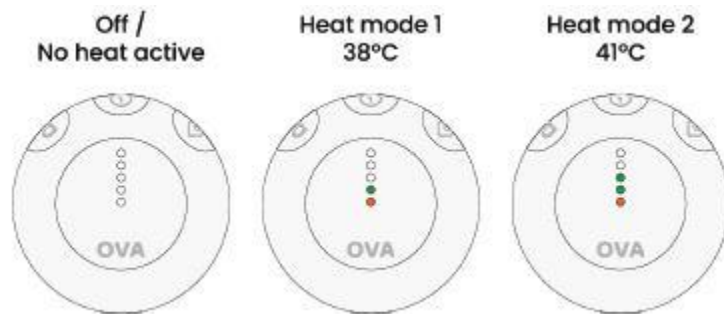

6. Fájdalomcsillapító programok

A transzkután elektromos idegstimuláció (TENS) kétféle módon nyújt természetes megoldást a fájdalomcsillapításra:

Fájdalom kapu

Stimulálja az érzőidegeket, hogy megakadályozza a fájdalomjelek agyból történő beérkezését. A Pain Gate stimuláció fájdalomcsillapítást biztosít használat közben.

Endorfin felszabadulás

Az alacsony frekvenciájú TENS elősegíti az endorfinok, a szervezet természetes fájdalomcsillapítójának felszabadulását. Az endorfin felszabadulás 40 perc alatt épül fel, és az ingerlés befejezése után több órán át tart.

Az Ova 3 négy előre beállított, klinikailag tesztelt programot kínál. Fontos, hogy mind a négy programot kipróbálja, hogy megtalálja az Önnek legmegfelelőbbet.

Megjegyzés: Célszerű rendszeresen váltani egyik programról a másikra, hogy a szervezet ne alkalmazkodjon egy programhoz.

Program	A mentesség típusa	Szenzáció
1	Fájdalom kapu	Sima, állandó érzés
2	Fájdalom kapu	Sima, állandó érzés
3	Fájdalomkapu + Endorfin	Pulzáló
4	Endorfin	Tapping

A használat gyakorisága

A TENS addig használható, amíg szükséges. A folyamatos kezelés biztonságos, de az elektródákat rendszeresen (legalább 12 óránként) újra kell helyezni, hogy a bőr lélegezni tudjon.

7. Hidrogélek tanácsadás

A szállított elektródák és hidrogélek újrafelhasználhatóak, de csak egy betegnél használhatóak. A hidrogélek gélenként 10-20 alkalmazást biztosítanak. Ez azonban a felhasználó bőrállapotától és a hidrogélek használat közötti tárolásától függően változik. Próbálja meg korlátozni a gélek levegőnek való kitettségének idejét.

A ragasztó egy lehúzható hidrogél (vízbázisú).

A hidrogél tapadásának egy részét vissza lehet állítani, ha minden géltre egy apró csepp vizet adunk, és az ujjunkkal szétterítjük. Ha túl sok vizet adunk hozzá, a hidrogél túl puha lesz. Ha ez történik, helyezze az elektródákat és a hidrogéleket ragadós oldallal felfelé néhány órára hűtőszekrénybe. Ez segít helyreállítani a tapadást.

A szállított hidrogélek latexmentesek.

Egy bontatlan csomag hidrogél betét eltarthatósági ideje 3 év. Ezt befolyásolhatja a nagyon magas hőmérséklet vagy a nagyon alacsony páratartalom.

Hidrogélek Óvintézkedések:

Ne hagyja figyelmen kívül a hidrogél betétekre adott allergiás reakciókat: Ha bőrirritáció alakul ki, hagyja abba a TENS használatát, mivel ez a típusú elektróda nem biztos, hogy alkalmas az Ön számára.

Ne használja ezt a készüléket a gyártó által javasoltaktól eltérő gélekkel vagy elektródákkal. A teljesítmény eltérhet a specifikációtól. A kisebb felületű elektródák szöveti irritációt okozhatnak.

Ne használja a hidrogéleket, ha azok elvesztették tapadásukat. A kezelés hatékonysága csökkenhet.

NE HELYEZZEN EL ELEKTRÓDÁKAT:


A jelen kézikönyvben javasoltaktól eltérő helyzetben.

A bőrön, amely nem rendelkezik normál érzéssel. Ha a bőr zsibbadt, túl nagy erősségű alkalmazására kerülhet sor, ami bőrgyulladást eredményezhet.

A sérült bőrön. Az elektródák fertőzéseket okozhatnak.

8. Ova 3 töltése

Ellenőrizze az akkumulátor élettartamát.

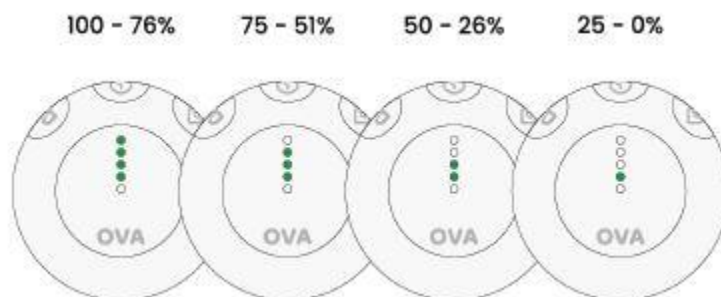

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kezelési idő gombot 3 másodpercig a hátralévő akkumulátor-üzemidő megjelenítéséhez.

A bal oldali stimulátor fehér LED-jei egyszer felvillannak, majd az akkumulátor hátralévő élettartama üzemmódba lép.

Az akkumulátor élettartama 5 másodpercig jelenik meg, mielőtt visszatérne az előző kijelzőre.

Amikor az akkumulátor 20% és 10%-os töltöttségi szintre csökken, az alacsony töltöttségi szintre figyelmeztető hangjelzés szólal meg, és az összes aktív fehér LED villogni kezd.

Töltés



Javasoljuk, hogy naponta töltse fel a készüléket.

Az Ova 3 töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt töltőt a készülékhez, és csatlakoztassa egy USB-csatlakozóhoz.

Az akkumulátor töltés közbeni élettartama a bal (L) stimulátoron 4 fehér LED segítségével jelenik meg.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének növekedésével a LED-ek villogni fognak, és növekvő sorrendben jelennek meg.

Megjegyzés: A készülék nem használható töltés közben.

Minden Ova 3 stimulátorban egy újratölthető li-ion akkumulátor (300mAh) található, amelyek egyidejűleg töltődnek egy micro-USB töltőporton keresztül.

A készlet tartalmaz egy töltőadapert.

Figyelmeztetés: Kizárólag a mellékelt töltőkábelt használja. Más kábelek használata veszélyes lehet, és a garancia érvényét veszti.

A teljes feltöltéshez 0%-ról körülbelül 3 óra szükséges.

Töltse a készüléket, amíg az akkumulátor szintje 100%-os nem lesz.

Az Ova 3 akkumulátorának élettartama folyamatosan aktív hőterápiával körülbelül 30 percig tart.

Az Ova 3 akkumulátorának élettartama 50%-os intenzitáson aktív hőterápia nélkül legfeljebb 30 órán át tart.

Megjegyzés: A készüléket legalább 3 havonta egyszer fel kell tölteni, hogy az akkumulátor élettartama megmaradjon.

Megjegyzés: Töltési feszültség: töltési áram: 90mA.

Megjegyzés: A következő specifikációknak megfelelő adaptereket használjon.

Kimenet: 1A

A névleges bemeneti feszültség nem haladhatja meg a 240 V-ot

Az áramütés elleni védelem besorolása: II. osztály

IP-osztályozás: legalább IP21

Az adapternek meg kell felelnie az IEC 60601-1 vagy IEC 60950-1 szabványnak.

Akkumulátor figyelmeztetések

Ez a termék lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, a lítium-ion akkumulátorból sav szivároghat, felforrósodhat, felrobbanhat vagy meggyulladhat, és sérülést és/vagy kárt okozhat:

Ne tegye ki 60°C (140F) feletti hőmérsékletnek.

Ne tegye, tárolja vagy hagyja hőforrások közelében, közvetlen erős napfényben, magas hőmérsékletű helyen, nyomás alatt lévő tartályban vagy mikrohullámú sütőben.

Ne merítse vízbe vagy tengervízbe, és ne ázzon el.

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ezt a berendezést csak védőföldeléssel ellátott hálózatra szabad csatlakoztatni.

Ha az akkumulátor szivárog, és bőrrrel vagy szemmel érintkezik, alaposan mossa le sok vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.

Óvintézkedések az akkumulátorral kapcsolatban

Ne használja olyan helyen, ahol nagy mennyiségű statikus elektromosság van, különben az akkumulátorcsomagban lévő biztonsági berendezések károsodhatnak.

Ha a készülék szagot áraszt, elszíneződik vagy eldeformálódik, vagy bármilyen módon rendellenesnek tűnik a használat, az újratöltés vagy a tárolás során, azonnal hagyja abba a használatát, és lépjen kapcsolatba a szállítóval.

Eltávolítás: A készüléket mindig felelősen, a helyi önkormányzati irányelveknek megfelelően kell megsemmisíteni. Ne dobja a készüléket tűzre. Robbanásveszély a belső lítium akkumulátorok miatt.

9. Tisztítás

Legalább hetente egyszer tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával, enyhe szappan és víz oldatával történő áttörléssel. Vigyázzon, hogy ne érintkezzen az elektródák hátoldalán lévő fekete lapokkal. Törölje szárazra.

Ne merítse az Ova 3 készüléket vagy az elektródákat vízbe.

A szappanon és vízen kívül ne használjon más tisztítószert.

10. Hibaelhárítás

Ha az Ova 3 nem működik megfelelően, kérjük, ellenőrizze a következőket:

Nincs LED kijelző	
Az akkumulátor lemerült	Töltse fel az akkumulátort. Lásd a 8. fejezetet: Ova 3 töltése.
Sérült eszköz	Kapcsolattartó szállító.
Sérült akkumulátor	Kapcsolattartó szállító. A gélbetétek cseréjén és az akkumulátor töltésén kívül nincs karbantartás vagy kalibrálás. Ne módosítsa a készüléket, mivel ez csökkentheti a biztonságot vagy a hatékonyságot.
A kijelző villog	
Az akkumulátor lemerült	Töltse fel az akkumulátort. Lásd a 8. fejezetet: Ova 3 töltése.
A stimulátor és az elektróda közötti csatlakozási hiba.	Válassza le és csatlakoztassa újra a stimulátort, és növelje az intenzitást.
Az elektróda és a test közötti csatlakozási hiba.	Győződjön meg arról, hogy az elektróda és a hidrogélek hatékonyan vannak felhelyezve a testre. Szükség esetén cserélje ki a hidrogéleket.
Nincs érzés	
Az intenzitás nem elég erős	Növelje az intenzitást, amíg erős, de kényelmes érzést nem érez.
Helytelen kapcsolat az elektróda, a stimulátor és a test között	Győződjön meg arról, hogy az elektródák hatékonyan rögzülnek a testhez. Biztosítsa a jó kapcsolatot a stimulátor és az elektróda között. Ha az elektródák nem tapadnak könnyen a testhez egy teljes ülés alatt, akkor lehet, hogy régi hidrogélt használ, és pótlást kell vásárolnia.
Az elektróda nem tapad a testhez	
A hidrogélek előregedtek és elvesztették tapadásukat.	Pótló hidrogélek beszerzése.
Helytelen elektróda elhelyezés	Helyezze el az elektródákat az elektróda elhelyezési útmutató szerint.
Az intenzitás beállítása visszatér 0mA-ra.	
Egy csatlakozási hiba nyitott áramkörhöz vezet.	Győződjön meg róla, hogy a párnák megfelelően rögzítve vannak a testéhez.
Szokatlanul alacsony vagy következtelen érzékelés	
A hidrogélek előregedtek és elvesztették tapadásukat.	Pótló hidrogélek beszerzése.

Ha a fenti felülvizsgálat nem oldotta meg a problémát, vagy ha váratlan működést vagy eseményeket szeretne jelenteni, vagy visszajelzést szeretne adni, hívja a TensCare-t vagy a helyi szállítót vagy forgalmazót (cím a hátsó borítón) tanácsért.

Lépjen kapcsolatba a TensCare ügyfélszolgálatával a +44 (0) 1372 723 434-es telefonszámon. Munkatársaink képzettek, hogy a legtöbb felmerülő problémában segíthessenek Önnek, anélkül, hogy a terméket szervizbe kellene küldenie.

Az európai orvostechnikai eszközrendelet előírja, hogy az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és az ország illetékes hatóságának. Ez megtalálható a következő címen:

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36683/attachments/1/translations/en/renditions/pdf>

11. Tartozékok

Csere hidrogélek kaphatók a beszállítójától vagy forgalmazójától (elérhetőségek a hátsó borítón), a TensCare postai úton történő megrendelésével, telefonon hitel- vagy bankkártyával, vagy a TensCare weboldalán keresztül.

A következő cserealkatrészek rendelhetők a TensCare-től a www.tenscare.co.uk vagy a +44(0) 1372 723434 címen.

E-OVA3	3 pár Ova 3 hidrogélből álló csomag
E-OHE	Cserélhető Ova 3 Heat TENS elektróda
L-MUSB	Micro-USB töltőkábel

12. Garancia

Ez a garancia a készülékre és az elektródákra vonatkozik. Nem terjed ki a hidrogélre és a töltőkábelre.

Erre a termékre a vásárlástól számított 1 év gyártási hibáktól mentes garanciát vállalunk.

Ez a garancia érvényét veszti, ha a terméket módosítják vagy megváltoztatják, ha a terméket visszaélészerű használatnak vagy visszaélésnek vetik alá; ha a termék szállítás közben megsérül; ha a felelős gondosság hiánya miatt leejtik; ha nem megfelelő akkumulátort szereltek be; ha a készüléket vízbe merítették; ha a mellékelt írásos használati utasítás be nem tartása miatt keletkezik kár; vagy ha a termék javítását a TensCare Ltd. felhatalmazása nélkül végzik el.

Megjavítjuk, vagy saját választásunk szerint díjmentesen kicseréljük az anyag vagy a kivitelezés javításához szükséges alkatrészeket, vagy kicseréljük az egész készüléket, és a garancia időtartama alatt visszaküldjük Önnek. Ellenkező esetben árajánlatot adunk a javításra, amelyet az árajánlatunk elfogadásakor végzünk el. A jelen garancia által biztosított előnyök kiegészítik a termékkel kapcsolatos minden egyéb jogot és jogorvoslati lehetőséget, amellyel a fogyasztó az 1987. évi fogyasztóvédelmi törvény értelmében rendelkezik.

Árukhoz olyan garanciák tartoznak, amelyek az Egyesült Királyság fogyasztóvédelmi törvényei szerint nem zárhatók ki. Ön jogosult az áru javíttatására vagy cseréjére, ha az áru nem megfelelő minőségű.

Mielőtt beküldi készülékét szervizbe, kérjük, győződjön meg róla, hogy átnézte a hibaelhárításról szóló részt, teljesen elolvasta a kézikönyvet, és követte az összes utasítást.

A készülék szervizelésre történő visszaküldése

Kérjük, győződjön meg róla, hogy minden lényeges adatot kitöltött, és mellékelje a vásárlási bizonylatot, mielőtt beküldi készülékét szervizbe.

Név:

Cím: Irányítószám:

Telefon: Email:

Modell: Vásárlás dátuma (csatolja a vásárlást igazoló bizonylatot)

Kiskereskedő neve Kiskereskedő címe, irányítószáma

A probléma rövid leírása.

Higiéniiai okokból kérjük, hogy használt hidrogélt ne tegyen bele. Csak az Ova 3 készüléket és az elektródákat küldje be.

A visszaküldéseket a következő címre kell küldeni:

TensCare Ltd, 9 Blenheim Road, Epsom, Surrey, KT19 9BE, Egyesült Királyság.

Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk telefonszámunkon: +44 (0) 1372 723 434.

A GARANCIA ÉRVÉNYÉT VESZTI, HA A FENTI INFORMÁCIÓK NEM TELJESÜLNEK ÉS NEM HELYESEK.

13. EMC

A vezeték nélküli kommunikációs berendezések, mint például a vezeték nélküli otthoni hálózati eszközök, mobiltelefonok, vezeték nélküli telefonok és bázisállomásaik, walkie-talkie-k befolyásolhatják ezt a berendezést, ezért a készülék bármely részéhez 30 cm-nél (12 hüvelyknél) közelebb nem szabad használni.

(Megjegyzés. Az IEC 60601-1-2 szabvány 5.2.1.1. f) pontjában az ME-berendezésekre vonatkozóan megadottak szerint).

Megjegyzés: Kórházi használatra a teljes EMC-tanácsadó táblázat kérésre rendelkezésre áll.

14. Elektromos és elektronikus hulladékok ártalmatlanítása (WEEE)

A 2012/19/EU európai irányelv egyik rendelkezése, hogy az elektromos vagy elektronikus eszközök nem kezelhetők 30 31

háztartási hulladéknak minősül, és egyszerűen kidobják. Hogy emlékeztessük Önt erre az irányelvre, az összes érintett terméket mostantól az alábbi ábrán látható, áthúzott kuka szimbólummal jelöljük.

Az irányelvnek való megfelelés érdekében régi elektroterápiás készülékét leadhatja nekünk ártalmatlanítás céljából. Egyszerűen nyomtassa ki a www.tenscare.co.uk weboldalunkról a PACKETPOST RETURNS címkét, csatolja ezt egy borítékhoz vagy párnázott zacskóhoz, amelyhez a készüléket mellékel, és küldje vissza nekünk. A visszaérkezést követően feldolgozzuk a régi készüléket alkatrész-visszanyerés és újrahasznosítás céljából, hogy segítsünk megőrizni a világ erőforrásait és minimalizálni a környezetre gyakorolt káros hatásokat.

15. Műszaki specifikációk

Hőterápia

1. szint - 38°C, 2. szint - 41°C

Frekvenciatartomány - 10-110 Hz

Impulzusszélesség tartomány - 50-200 µs

Kezelési idő - 15-45 perc vagy Folyamatos

Hullámforma	Szimmetrikus téglalap alakú kétfázisú
Kimenet	54mA (1mA lépésenként) nulláról csúcsra (500 Ohm terhelés felett)
Max impulzus energia	9.5µC
Kimeneti csatlakozó	Teljesen árnyékolt: érintésbiztos
Csatornák	Egycsatornás
Akkumulátor	3.7V/550mAh
Súly	Bal Stimulátor: 39g Jobb Stimulátor: 37g Összesen: 76g
Méreték	54 x 54 x 18 mm
Biztonsági besorolás	Belső áramforrás. Folyamatos használatra tervezték. Nincs speciális nedvességvédelem.
Szoftver verzió	R4_01
Környezeti specifikációk:	
Működik:	Hőmérséklet-tartomány: 40°C-ig Páratartalom: 15% és 90% RH között, nem kondenzálódó nedvességtartalom Légköri nyomás: 700hPa és 1060hPa között
Tárolás:	Hőmérséklet-tartomány: -10 és 60°C között Páratartalom: 15% - 75% relatív páratartalom, nem kondenzálódik Légköri nyomás: 700hPa és 1060hPa között

Megjegyzés: Az elektromos specifikációk névlegesek, és a felsorolt értékektől a szokásos gyártási tűréshatárok miatt legalább 5%-kal eltérhetnek.






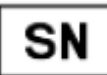






Megjegyzés: Legalább 30 perc szükséges ahhoz, hogy a készülék a minimális/maximális tárolási hőmérsékletről a két használat között felmelegedjen/lehűljön, amíg készen áll a rendeltetésszerű használatra.




Tárolási élettartam

Az öntapadó hidrogélek bontatlan csomagolásának tárolási ideje 3 év. Ezt befolyásolhatja a nagyon magas hőmérséklet vagy a nagyon alacsony páratartalom.

A gép gyakran több mint 5 évig tart.

FELHASZNÁLT SZIMBOLUMOK

	BF TÍPUSÚ FELHASZNÁLT RÉSZ: Elektromos áramütés elleni védelmet nyújtó berendezés, elszigetelt alkalmazott résszel. Jelzi, hogy ez a készülék a végfelhasználóval vezető kapcsolatban van.
	Ez a szimbólum a készüléken azt jelenti: "Lásd a használati utasítást".
	Hőmérsékletkorlátozás: azt a hőmérsékleti határértéket jelzi, amelynek az orvostechnikai eszköz biztonságosan kitehető.
	A tételszám a gyártó tételkódját jelzi, így a tétel vagy tétel azonosítható.
	Páratartalom-korlátozás: azt a páratartalom-határértéket jelzi, amelynek az orvostechnikai eszköz biztonságosan kitehető.
	A sorozatszám a gyártó sorozatszámát jelzi, hogy egy adott orvostechnikai eszköz azonosítható legyen.
	Ne dobja a háztartási hulladékba.
	Katalógusszám: a gyártó katalógusszámát jelzi, hogy a készülék azonosítható legyen.
	Légköri nyomás: azt a légköri határértéket jelzi, amelynek az orvostechnikai eszköz biztonságosan kitehető.
	Orvostechnikai eszköz
	Gyártó szimbólum
	Gyártás dátuma: az orvostechnikai eszköz gyártásának dátumát jelzi. Ezt a dátumot az utazótáskán található sorozatszám tartalmazza, vagy "E/év/szám" (YY/123456) vagy "E/hónap/év/szám" (MM/YY/123456) formában.

	CE-jelölés
	Importőr szimbólum
	Ez az orvostechnikai eszköz otthoni használatra javallott.
<p data-bbox="212 632 337 684">IP22</p>	<p data-bbox="431 600 1219 663">Ez az orvostechnikai eszköz nem vízálló, és meg kell védeni a folyadékoktól.</p> <p data-bbox="431 669 1365 848">Az első 2. szám: Védett a veszélyes alkatrészekhez való hozzáférés ellen ujjal, és a 12 mm ø, 80 mm hosszúságú, csuklós vizsgálati ujjnak megfelelő távolságot kell biztosítani a veszélyes alkatrészekről, és védettnek kell lennie a 12,5 mm ø vagy annál nagyobb szilárd idegen tárgyakkal szemben.</p> <p data-bbox="431 854 1344 997">A második szám 2: Véd a függőlegesen lezúduló vízcseppek ellen, ha a burkolat 15°-ig meg van döntve. A függőlegesen lezúduló vízcseppek nem lehetnek káros hatással, ha a burkolatot a függőlegeshez képest bármelyik oldalon 15°-ig bármilyen szögben megdöntik.</p>