

Használati útmutató: Pillangó (Butterfly) 105x155mm elektróda

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót a készülék helyes használata érdekében.

Az eszköz áttekintése

- **Elektróda típusa:** Újrafelhasználható pillangó alakú elektróda.
- **Készülék típusa:** alkalmazható TENS és EMS egységekhez (pl. TensCare Perfect TENS, Perfect BEAUTY vagy Sports TENS).

Használati utasítás

- **Előkészületek:**
 - Győződjön meg arról, hogy a bőr tiszta és száraz.
 - Ne helyezze az elektródákat sérült vagy érzéketlen bőrfelületre.
- **Csatlakoztatás:**
 - Illessze a vezeték csatlakozóit az elektróda csatlakozóhüvelyű végébe.
 - Ellenőrizze, hogy mindkét vezeték csatlakozója szorosan illeszkedjen.
- **Alkalmazás:**
 - Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt az elektródákat felhelyezi.
 - Helyezze az elektródákat a fájdalom helyére úgy, hogy az ragadós felülete érintkezzen a bőrrel.
 - Finoman nyomja rá az elektródákat a bőrre.
- **Eltávolítás:**
 - Az elektródák eltávolításához fogja meg az elektróda sarkát, és húza le lassan.
 - Kerülje a vezeték rángatását.
- **Tárolás:**
 - Használat után helyezze vissza az elektródákat a műanyag védőfóliára.
 - Tegye azokat az újrazárható tasakba.

Tippek és tanácsok





- Az elektródák latexmentesek.
- Az optimális vezetőképesség érdekében győződjön meg arról, hogy az elektródák tiszták és tapadósak.
- Ha az elektródák elveszítik ragadókéességüket, cserélje ki őket.
- Meleg időben az elektródák gélje megpuhulhat.

Figyelmeztetések

- Ha allergiás reakciót tapasztal, hagyja abba a készülék használatát, és forduljon orvoshoz.
- Az elektródák csak egy személy által használhatók.
- Csak EN 60601-1 és EN 60601-2-10 szabványnak megfelelő stimulátorokkal használja.

Elektróda elhelyezése

- **Felső hátfájdalom:** Helyezze a lapockák közé.
- **Alsó hátfájdalom:** Helyezze az ágyéki szakaszra.
- **Isiász:** Helyezze a far-comb fájdalommal érintett szakaszra.
- **Hasizom tonizálás:** Helyezze a hasizmok középpontjára.
- **Farizom tonizálás:** Helyezze a farizmokra.

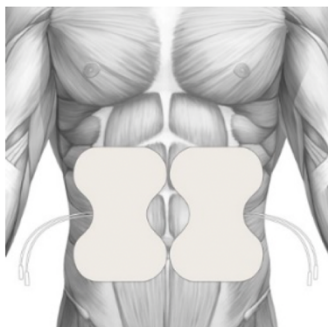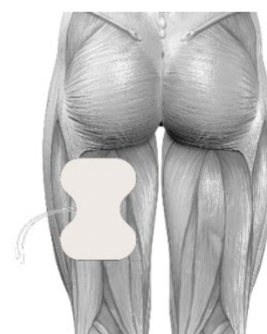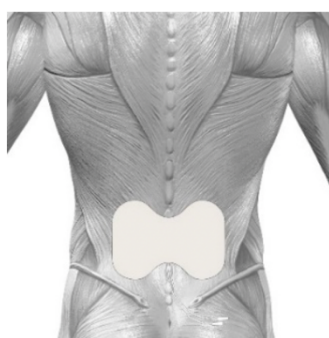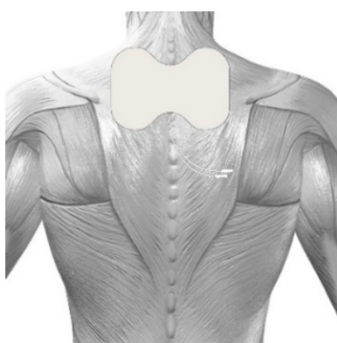

Tárolási tudnivalók

- Az elektródák élettartama 12-20 alkalmazás, a bőr állapotától és a páratartalomtól függően.
- Az eredeti csomagolásban történő tárolás során élettartamuk 2 év.
- Kerülje az extrém hőmérsékletet és alacsony páratartalmat.

Köszönjük, hogy termékünket használja!