

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

POWER Q-1000 PLUS

nyomásterápiás készülék



Végtagi nyomás terápia

A végtagi nyomás terápia segíti a megfelelő vénás keringés kialakítását, a krónikus és akut fájdalmak által okozott végtagi feszültségek csökkentésével. A készülék "pumpáló" mozgása az alsó végtagok izmainak munkáját szimulálja és helyettesíti, ezzel segítve az ott felgyülemlt vér felszívódását. Ez segíti a fájdalom enyhülését és az izmok regenerálódását.

A végtagi nyomás terápia képes a felgyülemlt vér által okozott problémák megoldásában. A külső nyomás lehetővé teszi a fölösleges izomközi folyadékok lecsapolását a szövetekből.

A készülék alkalmazható:

- Keringésjavítás lassú, folytonos nyomással alsó és felső végtagokon, törzsön
- Nyirokrendszeri keringésjavítás
- Nyirokpangás, nyiroködéma csökkentése
- Alsó végtagi visszérelégtelenség eredetű pangás csökkentése
- Egyéb eredetű ödéma csökkentése
- Keringés támogatása a "pumpa" mozgás segítségével
- Izomsorvadás kezelése bénult páciensek esetében
- Relaxáló masszázs

A készülék



A készülék kezelése

1. BE/KI gomb – A készülék bal oldalán
2. Kezelési idő beállító gomb
3. Mandzsetta felfújási nyomás beállító gomb
4. Légtömlő csatlakozó – A készülék jobb oldalán

Tartozékok



A Power Q-1000 Plus csomag tartalma:

- készülék, hálózati kábel

Opcionálisan választható tartozékok

- Légtömlő dupla, 2x4 elvezetéses
- Légtömlő, 4 elvezetéses
- Láb mandzsetta M-L-XL méretekben
- Toldalék láb mandzsetta bővítéshez M-L méretekhez
- Törzs mandzsetta M-L méretekben
- Kar mandzsetta M-L méretekben
- Elosztó kettőnél több mandzsetta egyidejű használatához

Mandzsetta méret

Láb mandzsetta M méret:

- Hossz: 76 cm
- Comb kerület: 65 cm
- Boka kerület: 38 cm

Kar mandzsetta M méret:

- Hossz: 86 cm
- Bicepsz kerület: 50 cm
- Csukló kerület: 36 cm

Has mandzsetta M méret:

- Kerület: 136 cm
- Magasság: 46 cm
- Tépőzár kerület: 31 cm

Toldalékok:

- Max szélesség: 13 cm
- Min szélesség: 6 cm

Átlag testméret felett speciális toldalékok állnak rendelkezésre rendelésre.

Specifikációk

A Power Q-1000 Plus a következő specifikációkkal rendelkezik:

- IIa osztályú készülék (93/42/EEC direktíva, IX-es függelék, 9-es szabály);
- I-es osztályú, BF típusú alkatrész (osztályozva: CEI EN 60601-1);
- A készülék nem vízálló;
- A készülék és alkatrészei nem sterilizálhatóak;
- A készülék nem használható gyúlékony vagy robbanékony anyagok közelében, vagy oxigén dús környezetben;
- Folyamatos működésű készülék;
- A készülék nem használható külterületen.

Technikai specifikációk

Hálózati áram	220-240 VAC, 50-60 Hz
Max kimeneti áram	0,2 A / 53W teljesítmény
Terápiás idő	Állítható (0 - 30 perc)
Max nyomás	20-300 Hgmm ($\pm 20\%$)
Súly	2 Kg


Cél

Klinikai cél: Kezelő terápia
Felhasználás: Klinikai és otthoni használat

Működtetési útmutató

Láb mandzsetta használata


- Vegye fel a láb mandzsettákat, húzza be a cipzárt a végéig, majd zárja be a tépőzárát.
- Vastag lábak esetében használja a toldalékokat;

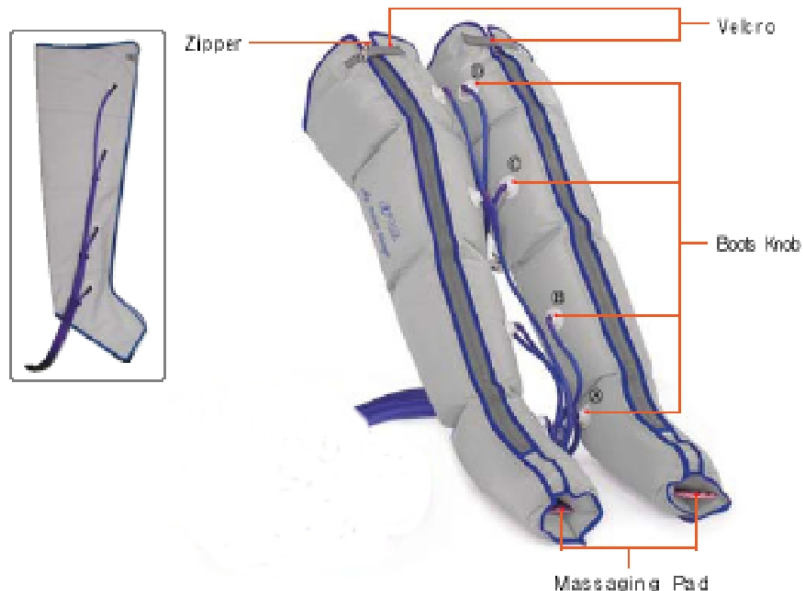

- Ügyeljen a csövek megfelelő pozíciójára a lábak belső oldalán;
- Csatlakoztassa a 4 csövet a készülék elején található 4 csatlakozóba.
- Ügyeljen arra, hogy a hosszabb csöveket a combokhoz közeli csatlakozóba csatlakoztassa: A hosszabb cső és a magasabb pozíciójú csatlakozó sötétebb színű;
- Csatlakoztassa a csövek másik végét a készülék elején levő kimeneti csatlakozókhoz.

Törzs mandzsetta használata

- Helyezze fel a mandzsettát. Az alsó szélé a csípője magasságába essen.
- Csatlakoztassa hozzá a csöveket.
- Ügyeljen arra, hogy a hosszabb csöveket a magasabban lévő csatlakozóba csatlakoztassa;
- Miután csatlakoztatta a csöveket a mandzsettához, csatlakoztassa a csövek másik végét a készülék elején levő kimeneti csatlakozókhoz.
- Amikor csak egy lég-kimenetet használ, helyezze a másik kimenetbe a légmentesen záró kupakot.

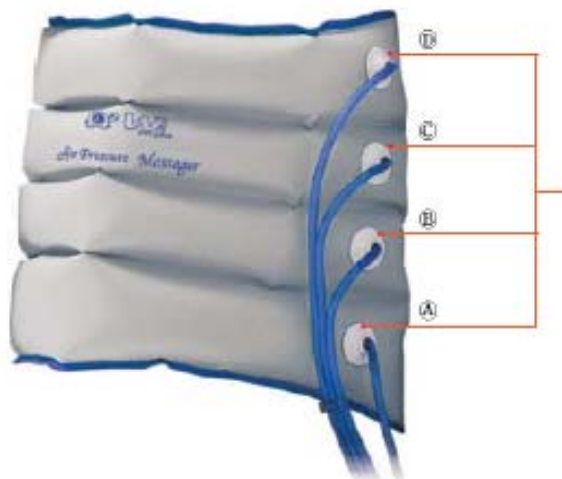

Kar mandzsetta

- Helyezze fel a mandzsettát, majd csatlakoztassa hozzá a csöveket. Ügyeljen arra, hogy a hosszabb csöveket a magasabban lévő csatlakozóba csatlakoztassa;
- Miután csatlakoztatta a csöveket a mandzsettához, csatlakoztassa a csövek másik végét a készülék elején levő kimeneti csatlakozókhoz.
- Amikor csak egy lég-kimenetet használ, helyezze a másik kimenetbe a légmentesen záró kupakot.

Has és láb mandzsetták egyidejű használata

- Vegye fel a láb mandzsettákat (olvassa el a láb mandzsetta használata bekezdést) illetve a törzs perifériákat (olvassa el a has periféria használata bekezdést);
- Csatlakoztassa a 4 csövet a láb mandzsettákhoz. Ügyeljen arra, hogy a hosszabb csöveket a combon magasabban lévő csatlakozóba csatlakoztassa.
- Csatlakoztassa a 4 csövet a törzs mandzsettához.
- Miután csatlakoztatta a csöveket, csatlakoztassa a csövek másik végét a készülék elején levő kimeneti csatlakozókhoz.

Kövesse ugyanezeket az utasítások a kar mandzsetta és a láb mandzsetta együttes használata esetében.


Láb mandzsetták bővítése

- Mielőtt felveszi a láb mandzsettákat, a toldalékot illessze a láb mandzsettába
- A toldalék keskenyebb vége kerüljön a bokához
- Húzza be a zippzárat
- Vegye fel a mandzsettákat a fentebb leírtak szerint és csatlakoztassa a légtömlőket.



A kezelés indítása

- Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy 220-240V aljzatba, majd kapcsolja a BE/KI kapcsolót BE állapotba
- Állítsa be a kezelési időt a bal oldali tekerőgombbal
- A kezelés időtartama 0 - 30 perc között állítható
- Figyelem: Az idő kiválasztó nem mozgatható óra járásával ellentétes irányba a kezelés során!
- Várja meg a kezelés befejezését a terápia idő módosításához
- Állítsa be a mandzsetta nyomást a jobb oldali tekerőgombbal
- A nyomás 0 és 300 Hgmm között állítható
- A pumpa 2 perc alatt tölti fel a mandzsettákat
- Kezdje a kezelést közepes nyomással, majd növelje a szükségleteinek megfelelően.
- Először a legalsó mandzsettarekesz fújódik fel a beállított nyomásra, majd leenged. Ezután a következő, feljebb levő kamra felfújása következik, egymás után. A ciklus végén újraindul amíg a beállított kezelési idő tart.

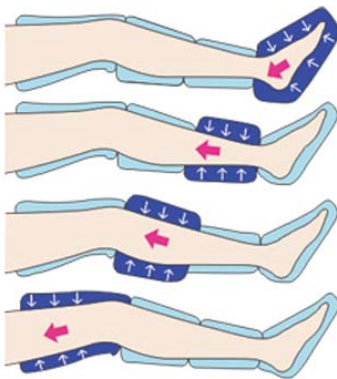







Hibakeresés

Probléma	Megoldás
A Power Q-1000 Plus nem kapcsol be	Ellenőrizze a hálózati kábel megfelelő csatlakoztatását Ellenőrizze a BE/KI gomb megfelelő állását Ellenőrizze, hogy az áramforrás sérült-e
A Power Q-1000 Plus levegő szivárgásra hasonlító hangot ad ki	Ellenőrizze, hogy sérültek-e a csövek, talál-e rajtuk lyukakat Ellenőrizze a csövek megfelelő csatlakoztatását Ellenőrizze, hogy a csövek meghajoltak-e
Nincs nyomás, vagy a levegő nem tud beáramlani a kamrákba	Ellenőrizze, hogy sérültek-e a csövek, talál-e rajtuk lyukakat Ellenőrizze a csövek megfelelő csatlakoztatását Ellenőrizze, hogy a csövek meghajoltak-e Ellenőrizze, hogy a kamrán megfelelő sorban telnek-e meg levegővel
A levegő beáramlik a kamrákba de ki is szivárog	Ellenőrizze, hogy van-e lyuk a kamrákon. Amennyiben nem talál lyukat, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra Ellenőrizze le újra a fenti lépéseket Lépjen kapcsolatba a gyártóval

Figyelmeztetések


A következő figyelmeztetések a felhasználói biztonságot garantálják, és a sérülések megelőzését szolgálják.

Kérjük olvassa el a használatra vonatkozó tanácsokat a Power Q-1000 Plus használata előtt.

 Figyelem Ezen utasítások figyelmen kívül hagyásának esetében sérülés léphet fel a felhasználóban	 Vigyázat Ezen utasítások figyelmen kívül hagyásának esetében sérülés léphet fel a felhasználóban vagy a készülékben
Jelzések	
 Fontos javaslat	 Figyelem
 Ne szerelje szét a készüléket!	 Húzza KI a kábelt!

Figyelem

Ne használja a készüléket amennyiben gyulladásban vagy betegségben szenved!
Fertőzésveszély!

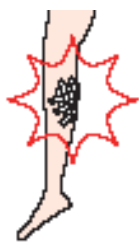

Kérjük lépjen kapcsolatba orvosával a készülék használata előtt, mennyiben emésztési problémákban, csonttörésben, trombózisban, rákban szenved



Ne használja a készüléket rosszullét, fájdalom esetén




NE lépje túl a 20 perces kezelési időt az első kezelése során.
5-10 perces kezdeti kezelési időt ajánlunk.



Csak bejegyző felnőtt használhatja a készüléket



Figyelem, ne öntsön folyadékot a készülékre. A készülék nem vízálló, a folyadék befolyása sérüléseket okoz.

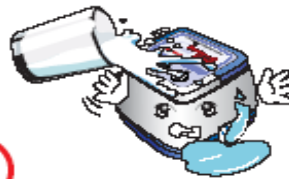

NE használja a készüléket amennyiben hibás működést gyanít. Elektrosokk veszély léphet fel. Lépjen kapcsolatba a gyártóval.



Ne csatlakoztassa vagy csatlakoztassa le a készüléket a konnektorból nedves kézzel. Elektrosokk veszély léphet fel.



A készüléket csak 220V-os áramforrással használja. Elektrosokk veszély lehet fel. Húzza ki a készüléket a konnektorból amennyiben nem használja




NE helyezzen semmit a készülékre vagy annak alkatrészeire, kábeleire.



Ne csatlakoztasson több készüléket ugyan ahhoz az elosztóhoz.




Ne tegye ki a készüléket erős rázkódásnak és ne ejtse le!

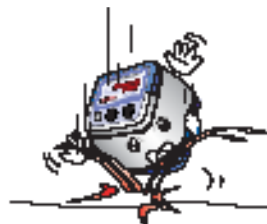

NE helyezzen semmit a készülékre vagy annak alkatrészeire, kábeleire.

1.

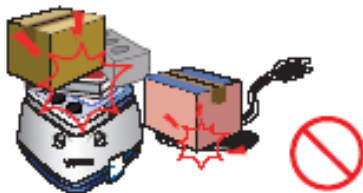


Amennyiben hosszú ideig nem használja a készüléket, vagy hideg környezetben használja azt, hibás működés léphet fel. Működtesse a készüléket 3-4 szer változó intenzitással a hibák megelőzése érdekében.



Repeat
3~4 times



A készüléket száraz, tiszta textillel tisztítsa meg. NE használjon maró, oldó vegyszereket a készülék tisztítására!

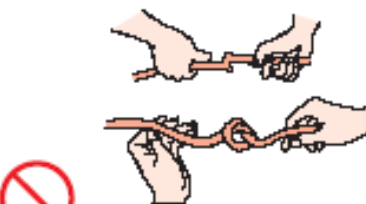

A készüléket csak a felhasználói kézikönyvben leírtakra használja.



A készülék megfelel a WEEE kidobási szabványoknak.



A készülék működtetése közben mozogjon!



Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, ne tárolja hősugárzó közelében.



Karbantartás, szállítás és tárolás

Amennyiben a készüléket a felhasználói kézikönyvnek megfelelően használja, nem szorul karbantartásra.

Szállítási elővigyázatosságok

A készülék szállítására nem szükségesek komoly előkészületek. Ajánljuk, hogy szállítsa a Power Q-1000 Plus-t és kiegészítőit annak eredeti dobozában.

Tárolási feltételek

A Power Q-1000 Plus a következő állapotokban tárolható:

A csomagolásban

hőmérséklet	+5 től + 40 °C ig
páratartalom	30 - 80%
légnyomás	500 - 1060 hPa

A csomagoláson kívül

hőmérséklet	-10 től +55 °C ig
páratartalom	10 - 90%
légnyomás	500 - 1060 hPa

Garancia

A jótállás érdekében lépjen kapcsolatba a helyi viszonteladóval, vagy a gyártóval (Wonjin Mulsan Co).

Szerviz

A készülék minden javítása csak a gyártó vagy meghatalmazott szervize által végezhető el. Bármilyen segítségért lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

Scart Kft.

2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.

Tel: +36 53 570014; Fax: +36 53 570015

info@medimarket.hu www.medimarket.hu

A készülék jótállásának megőrzése érdekében csak eredeti tartozékok és alkatrészek használatát ajánljuk.

A POWER Q-1000 Plus gyártója:



Manufacturer: Wonjin Mulsan Co., Ltd.
Namdong Industrial Complex 10B-7L,
623-6 Namchon-dong, Namdong-gu, Incheon, I
Warranty Service: 82-32-816-0552