

Felhasználói kézikönyv

Tárgya: Végtagkompressziós terápia rendszer

Modell: Power-Q8120



Tartalomjegyzék

1. Terméknév, modell száma, leírás.....	3
2. Származási ország, gyártó, cím, szervizközpont.....	3
3. Felhasználási javaslat.....	4
4. Rendeltetés, az egyes részek megnevezése.....	5
5. Figyelmeztetések.....	6
6. Előkészítés a használatra.....	11
7. A készülék használata.....	12
8. Általános információk.....	19
9. Használat után.....	20
10. Felügyelet és karbantartás.....	20
11. Hibaelhárítás.....	21
12. Címke.....	22
Garancia.....	23

1. Terméknév, modell száma, leírás



Leírás

Terméknév: Végtagkompressziós terápiás rendszer

Modell: Power-Q8120

Méret: 440x330x180 mm

Névleges feszültség: AC 230V, 50/60 Hz

Áramfelhasználás: 120 VA

Állítható üzemidő: 0-99 perc

Maximális nyomás: 200 Hgmm +- 20%

Tömeg (fő készüléktest) : 9,0kg

2. Származási ország, gyártó, cím, szervizközpont

1) Származási ország: Koreai Köztársaság

2) Gyártó: Wonjin Mulsan Co., Kft.

3) Cím: 2F, 89, Geomdan-ro, Seo-gu, Incheon, Korea. Tel: +82-32-816-0552. Fax: +82-32-816-0557

4) Szervizközpont: +82-32-816-0552

3. Felhasználási javaslat

1. Nyiroködéma
2. Végtagbénulás (agyi infarktus)
3. Végtaggöresök (fájdalomesillapítás)
4. Terhes nők végtagjainak gondozása
5. Krónikus vénás betegségek
6. Zsír feloldás
7. Reumás ízületi gyulladás
8. Emésztőrendszeri panaszok, székrekedés
9. Zsibbadt végtagok, stresszoldás
10. Edzés utáni kezelés
11. Gyengeségérzet, Fáradtság, alvásproblémák
12. Bárki, aki szeretne rugalmas bőrt és egészségesebb testet
13. Mélyvénás trombózis (DVT), embólia
14. Visszérkezelés és visszér kialakulás megelőzése

A termék jellemzői

A készülék két kimenettel rendelkezik a levegő számára (A és B), és két mandzsetta helyezendő be a kimenetekbe egyenként azonos időben. Ha csak egy mandzsettát tud használni, a másik kimenetet le kell zárni a levegőt elzáró dugóval.




4. Rendeltetés, az egyes részek megnevezése

1) Rendeltetés

Ez a végtagkompressziós terápiás rendszer egy pneumatikus nyomással működő terápiás rendszer. A végtagzsákok ismételt használata segíti a vérkeringést és megelőzi a vérrögök kialakulását.

2) Az egyes részek megnevezése

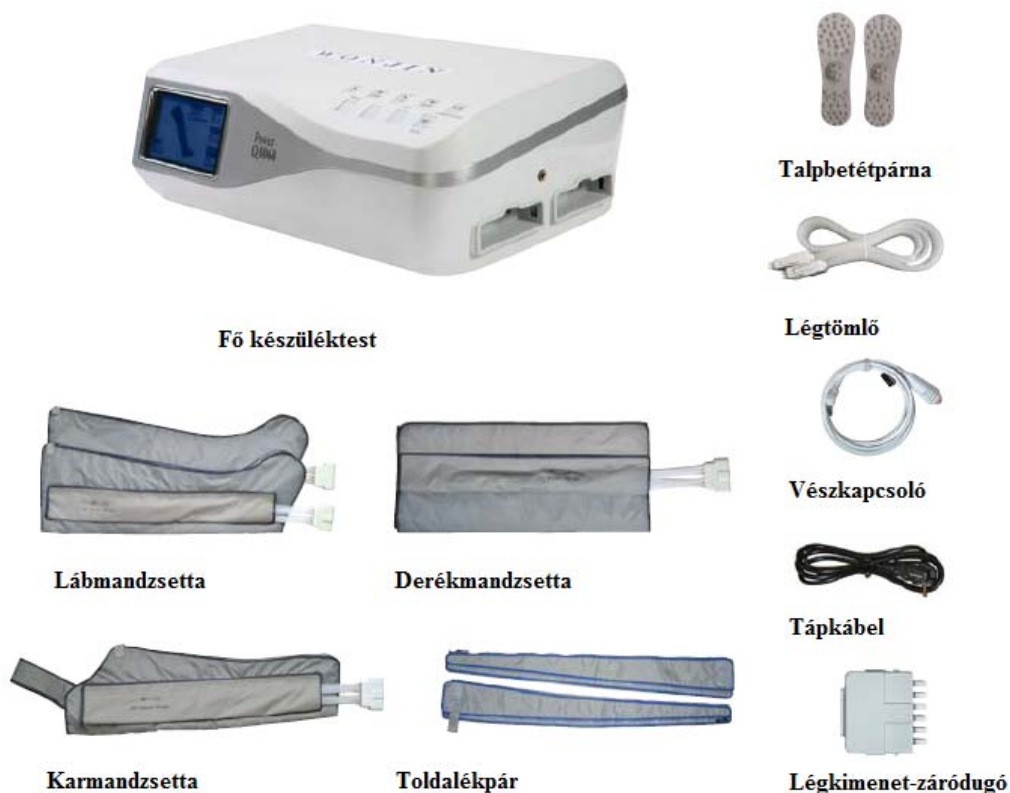

Toldalékpár opcionálisan használható a lábmandzsetta bővítéséhez erősebb testalkatú emberek számára.

A mandzsetták együtt vagy opcionálisan vásárolhatóak meg rendelésre.

5. Figyelmeztetések



A felhasználó biztonsága és az anyagi károk megelőzése érdekében kérjük alaposan olvassa el a figyelmeztetéseket a készülék használata előtt.



"Vigyázat" jelzés: ha az utasításokat nem tartják be, az a felhasználó halálához vagy komoly károkhoz vezethet.



"Figyelem" jelzés: ha az utasításokat nem tartják be, az a felhasználó sérüléséhez vagy anyagi károkhoz vezethet.

	Gyártó		Sorozatszám
	Figyelem		Gyártás dátuma
	Hőmérsékleti korlátozás		Üzemeltetési utasítások
	Tilos nyomni		Nedvességtartalom korlátja
	Kövesse a használati utasításokat		Tilos ráülni
	Általános "tilos" jelzés		Tartsa szárazon
	Tilos rálépni		Ne szedje szét az eszközt
	BF típusú alkalmazott rész		Meghatalmazott képviselő az Európai Közösség területén
	Húzza ki a tápkábelt		Általános "vigyázat" jelzés
	KIWA CERMET tanúsítvány (NB. 0476 sz.)		Általános "kötelező intézkedés" jelzés
	Elektromos felszerelés, ami nem dobható ki (beleértve a tömlőt, amin ez a jelzés megtalálható)		

- Ez az eszköz kizárólag kórházi használatra készült.
- A betegek felöltözött állapotban használhatják a mandzsettákat.
- Operátor-kompatibilis: ez a készülék hivatásos, képzett személyzet által kezelendő.
- Környezet: ez a készülék kórházi használatra készült, és nem használandó egészségügyi intézmények területén kívül.

Mellékhatások

Forduljon orvoshoz, ha a felhasználóra a következők valamelyike vonatkozik:

- Orvosi elektronikus implantátumot használ (műszív, pacemaker)
- Tüdőödéma, szívbetegség, vénás rák, magas vérnyomás, magas láz
- Bőrbetegségek, mint pl. bőr égése, bőrgyulladás, felfekvés, gennyes fertőzés, rosszindulatú tumor, stb.
- Korábbi bőrműtét (bőráttűtetés) a kezelendő végtagon
- A keringési rendszer betegségei, mint pl. érelmeszesedés, angina, szívinfarktus, stb.
- Vértörög gyanúja
- Olyan beültetett anyagok, amivel nem érintkezhetnek a készülék részei (mesterséges ízület, gyöngyök, fémek, stb.)
- Friss visszérműtét
- Műtét utáni lábadozó betegek, terhes nők, gyermekek
- Ha erősödik a fájdalom a készülék használata után



Vigyázat!


Ne használja olyan más orvosi berendezésekkel egyidőben, amelyek az élet mesterséges fenntartásához használatosak, illetve ne viselje együtt más felhelyezett orvosi eszközökkel, mint pl. EKG. Ne használja magas vérnyomás vagy akadályoztatott vérkeringés esetében.



Ne használja a terméket, ha gyulladást, fertőzést, ismeretlen eredetű fájdalmat vagy vérzést (belső vagy külső) tapasztal a használat területe környékén.



Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ne nyomja a tápkábelt asztalnak vagy székek (áramütést, elektromos szivárgást vagy tüzet okozhat).

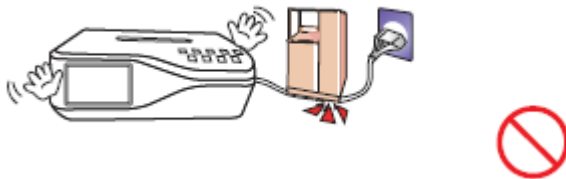

Ne áztassa vízbe a készüléket, mivel ez egy elektronikus eszköz.



Amikor a tápkábelt csatlakoztatja a fali konnektorhoz vagy amikor kihúzza, száraz kézzel nyúljon hozzá (a nedvesség áramütést, elektromos szivárgást vagy tüzet



okozhat).



Ellenőrizze a megfelelő feszültséget a használathoz. (A felhasználó megéghet, áramütést kaphat vagy megsérülhet.)



Használjon alsóneműt vagy sportruházatot, hogy a bőr ne érintkezzen közvetlenül a mandzsettával vagy párnával.



Ne használja a készüléket, ha fájdalmat vagy kellemetlen érzést érzékel. Azonnal fejezze be a készülék használatát. Legyen óvatos, amikor felcipzározza a mandzsettát. Ruha, hajszálak vagy bőr becsípődhet a cipzárba.



Ne ejtse le a készüléket, mert az túl erős rázkódást okozhat (károsodhat a készülék).




Ne használja a masszázson kívül más célra. Tartsa csecsemőket és gyermekeket távol a készüléktől az áramütés vagy egyéb sérülések kockázata miatt.



Figyelem!

Ne használja olyan környezetben, ahol túl sok az elektromágneses hullám. Károsíthatja a készüléket vagy üzemzavarát okozhatja.

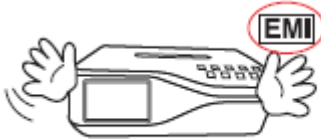


Ne tárolja az eszközhöz tartozó szövetanyagokat tűzhely, cigaretta vagy más hőtermelő eszköz közelében, mivel ez tűzveszélyes. Ne tárolja a szövetanyagokat tű, olló vagy más éles eszközök közelében, mert azok károsíthatják őket.



Figyeljen oda, hogy víz vagy más anyag ne kerüljön a készülék belsejébe.



Ha a készülék meghibásodik vagy nem működik, ne próbálja meg felnyitni, megjavítani vagy szétszedni a főegységet vagy a készüléket. (Ez kockázatos, tűzhez, áramütéshez vagy egyéb sérüléshez vezethet.)

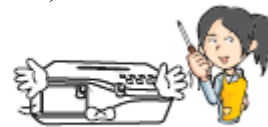

Használat közben maradjon egy helyben, ne sétáljon vagy mozogjon a helyiségben.



Ha egyszer használja a készüléket, 20 percen belül maradjon a használat időtartama. (Kezdetben 5 percről induljon, és fokozatosan növelje a használati időt, a fizikai állóképességet figyelembe véve. Ha hosszú ideig használja folyamatosan, az ellenkező hatást válthatja ki.)



Ha hosszabb ideje nem használta a készüléket vagy hideg helyen szeretné használni, az eszköz esetleg nem működik normálisan. Ebben az esetben használja a készüléket, miután három vagy négy alkalommal az Alacsony-Közepes-Magas erősségen működtette.



A közvetlen napsütésnek ne tegye ki a terméket, illetve fűtőberendezések és gáztűzhely közelében ne tárolja. A termék elváltozhat vagy elszíneződhet.



A készülék tisztításakor száraz törlőronggyal törölje meg, mindenféle vegyi anyag vagy mosószer használata nélkül, különben külsőleg károsíthatja a készüléket, pl. elszíneződés vagy lepattogzás keletkezhet.



A terméket veszélyes hulladékként kezelje. Környezetszennyezést okozhat.



Figyelem!

Különálló konnektort használjon, illetve ne csatlakoztasson egynél több tápkábelt egyszerre. Tűzveszély, áramütés vagy más sérülés veszélye áll fenn.






Figyeljen oda, hogy a légtömlő ne csavarodjon vagy hajoljon meg.



Télen ne tárolja az eszközöket túl alacsony hőmérsékleten. Megkeményedhetnek vagy megsérülhetnek.

Ne mossa mosógépben a mandzsettákat és ne merítse őket víz alá. A mandzsettákat óvatosan letörölheti egy megnedvesített törülközővel vagy törlőronggyal. Ha szükséges, enyhe hatású

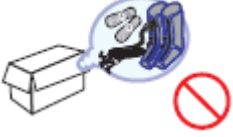	<p>mosószer használható.</p> 
<p>Ha a készüléket hosszabb ideig szeretné tárolni, a dobozában tartson minden eszközt.</p> 	

6. Előkészítés a használatra

- 1) Válassza ki a megfelelő mandzsettát vagy párnát a használathoz.
- 2) Kapcsolja a tömlőt a mandzsettához vagy párnához és helyezze be a légkimenet-záródugót a légkimenetbe.
- 3) Vegye fel a mandzsettát vagy párnát a használathoz, ha a tömlő és a dugó megfelelően csatlakoztatva lettek.
 - A lábmandzsettákat használja kinyújtott lábbal.
 - A derékmandzsetta használható a has és a csípő környékén, a mellkas területére felhelyezve fájdalmas lehet.
 - A karmandzsetta a váll és a mellkasi terület egy részén rögzíthető a rögzítőszalaggal.
- 4) Kapcsolja a tömlőt a fő készüléktesthez.



A fő készüléktesthez kapcsolva



A mandzsettához kapcsolva

7. A készülék használata



7-1. Jelmagyarázat

Szám	Megnevezés	Jelmagyarázat
1	Üzem mód	Válasszon ki egy üzemmódot. A1, A2-B-C1, C2, C3-D1, D2-E1, E2
2	Szünet	Minden egyes kezelési ciklus befejezése után kiválaszthatja a ciklusok közötti szünet időtartamát. Válasszon egy időtartamot (0-60 mp között).
3	Nyomási időtartam	Válasszon ki egy nyomási időtartamot (0-15mp között)
4	Időtartam	A gyári alapbeállítás 15 perc. Ha meg szeretné változtatni a működés időtartamát, állítsa be az időtartamot, 0 és 99 perc között.
5	Nyomás	A nyomás értéke: 1) 0-200 Hgmm: A1, A2, B, E1, E2 2) 0-130 Hgmm: C1, C2, C3, D1, D2 - A nyomás értéke rekeszenként állítható. - A nyomás értéke 10 Hgmm-enként állítható.
6	Indítás/Leállítás	Elindítja vagy leállítja a készülék működését.
7	Menü	Aktiválja a funkciókhoz tartozó utasításokat, ahogyan az a kijelzőn látható, és utasításonként léphet köztük.
8	Léptetés	Léptet az egyes rekeszek között a nyomási érték vagy a nyomási időtartam beállításakor. - Amikor ezt a gombot használja, minden rekesz sorszáma a "szünet" pozícióban van feltüntetve.
9	Beállítás	Beállítja az adott funkció értékét.
10	Mentés	Elmenti a beállítás értékét, ahogyan az a kijelzőn látható. Tartsa nyomva a gombot 5 másodpercig folyamatosan.
11	Visszaállítás	Visszaállítja az alapbeállításokat. Tartsa nyomva a gombot 5 másodpercig folyamatosan.

7-2. A készülék használata

Funkciók

1) A készülék 10 programmodot ismer a nyomásterápiához.

(A1, A2, B1, C1, C2, C3, D1, D2, E1, E2.)

A felhasználó kiválaszthatja a beteg állapotának megfelelő működési módot.

2) Nyomás kikapcsolása (0 Hgmm): Ha a felhasználó szeretné valamelyik rekeszt kihagyni a használatból, állítsa be a hozzá tartozó nyomást 0 Hgmm-re. Ekkor a 0 Hgmm beállítással a nyomás megszűnik.

3) Egyéni nyomásbeállítások: Önállóan állítható a nyomás értéke rekeszenként 0-200 Hgmm vagy 0-130 Hgmm között a beteg állapotának megfelelően beállított üzemmódhoz.


4) Vészkapcsoló: Adott üzemmódban működtetve az eszközt, ha a felhasználó kellemetlen érzést tapasztal vagy azonnal meg kell állítania a kezelést, egyszerűen megnyomhatja a vészkapcsolót a biztonság helyreállításához.

Üzem mód

Mode : A1




Mode : A2

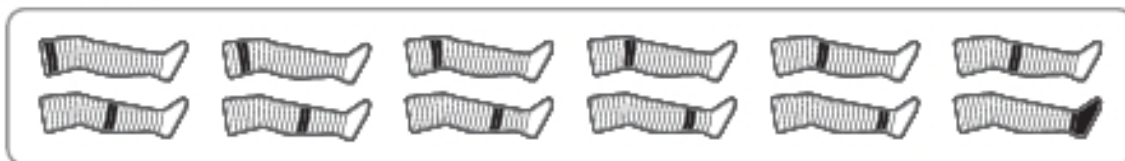

Mode : B1



Mode : C1

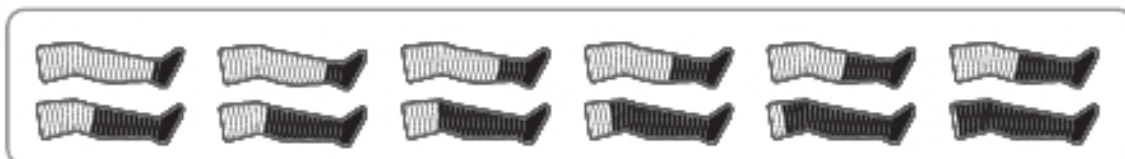





Mode : C3



Mode : D1

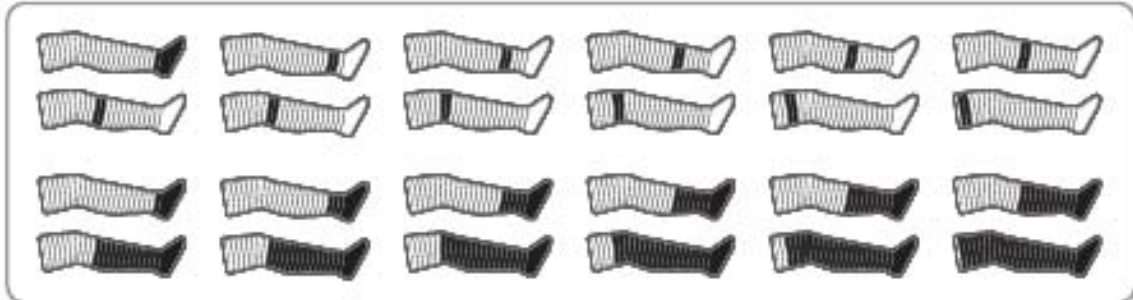

Mode : D2

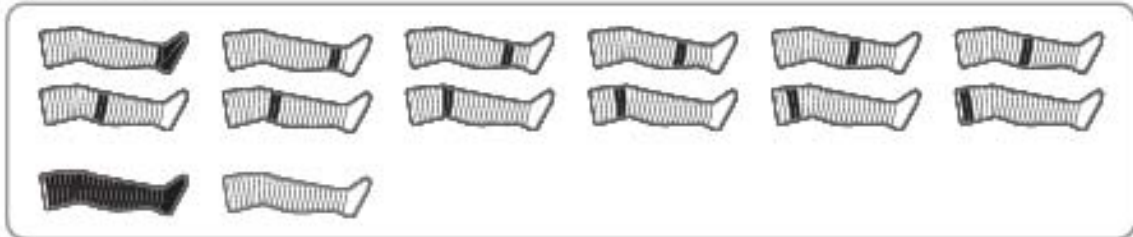

Mode : E1



Mode : E2



Az üzemmód beállítása

Amikor bekapcsolja a készüléket, a kezdeti üzemmód (A1) van automatikusan kiválasztva. Az üzemmód beállításához:

- 1) Nyomja meg a Menü gombot.
- 2) Lépjen az Üzemmód kurzorra a Menü gomb használatával.
- 3) Nyomja meg a Beállítás gombot (fel vagy le), hogy beállítsa a kiválasztott "Üzemmódot".
- 4) Ha villog a kiválasztandó betű, akkor az üzemmód sikeresen ki lett választva.
- 5) Lépjen másik funkcióra a Menü gomb használatával az Üzemmód beállítása után.

A szünet időtartamának (0-60 mp) beállítása

- 1) Nyomja meg a Menü gombot.
- 2) Lépjen a "Szünet" kurzorra a Menü gomb használatával.
- 3) Nyomja meg a Beállítás gombot (fel vagy le), hogy beállítsa a kiválasztott "Szünet időtartamot".
- 4) Ha villog a kiválasztandó betű, akkor a szünet időtartama sikeresen ki lett választva.
- 5) Lépjen másik funkcióra a Menü gomb használatával a szünet időtartamának beállítása után.

12 rekesz nyomási időtartamának (0-15mp) beállítása egyszerre

- 1) Nyomja meg a Menü gombot.
- 2) Lépjen a "Nyomási időtartam" kurzorra a Menü gomb használatával.
- 3) Ezután az összes rekesz villogni fog.
- 4) Nyomja meg a Beállítás gombot (fel vagy le), hogy beállítsa a kiválasztott "Nyomási időtartamot".
- 5) Ha villog a kiválasztandó betű, akkor a nyomási időtartam sikeresen ki lett választva.
- 6) Lépjen másik funkcióra a Menü gomb használatával a nyomási időtartam beállítása után.

Egy rekesz nyomási időtartamának (0-15mp) beállítása

- 1) Nyomja meg a Menü gombot.
- 2) Lépjen a "Nyomási időtartam" kurzorra a Menü gomb használatával.
- 3) Ezután az összes rekesz villogni fog.
- 4) Nyomja meg a Léptetés gombot (fel vagy le), és mozgassa a kurzort a kiválasztott rekeszhez.
- 5) Minden rekesz sorszáma a "szünet" pozícióban van feltüntetve.
- 6) Nyomja meg a Beállítás gombot (fel vagy le), hogy beállítsa a kiválasztott "Nyomási időtartamot".
- 7) Ha villog a kiválasztandó betű, akkor a nyomási időtartam sikeresen ki lett választva.
- 8) Lépjen másik funkcióra a Menü gomb használatával a nyomási időtartam beállítása után.

Az időtartam (0-99 perc) beállítása

- 1) Nyomja meg a Menü gombot.
- 2) Lépjen az "Időtartam" kurzorra a Menü gomb használatával.
- 3) Nyomja meg a Beállítás gombot (fel vagy le), hogy beállítsa a kiválasztott "működési Időtartamot".
- 4) Ha villog a kiválasztandó betű, akkor a működési időtartam sikeresen ki lett választva.
- 5) Lépjen másik funkcióra a Menü gomb használatával a működési időtartam beállítása után.

12 rekesz nyomásbeállításának kezelése egyszerre

- 1) Nyomja meg a Menü gombot.
- 2) Lépjen a "Nyomás" kurzorra a Menü gomb használatával. Ezután az összes rekesz villogni fog.
- 3) Nyomja meg a Beállítás gombot (fel vagy le), hogy beállítsa a kiválasztott "Nyomást".
- 4) Ha villog a kiválasztandó betű, akkor a nyomási érték sikeresen ki lett választva.
- 5) Lépjen másik funkcióra a Menü gomb használatával a nyomási érték beállítása után.

* Ha szeretné kihagyni valamelyik rekeszt az üzemmódból, először menjen a kiválasztott rekeszre és állítsa be a nyomás értékét 0 Hgmm-re. Ezután a sűrített levegő nem lesz alkalmazva az adott rekeszre.

*** Az egyes üzemmódok maximális nyomási értéke:

1) 0-200 mmHg: A1, A2, B1, E1, E2

2) 0-130 mmHg: C1, C2, C3, D1, D2

Egy rekesz nyomásbeállításának kezelése

1) Nyomja meg a Menü gombot.

2) Lépjen a "Nyomás" kurzorra a Menü gomb használatával. Ezután az összes rekesz villogni fog. Nyomja meg a Léptetés gombot (fel vagy le), és mozgassa a kurzort a kiválasztott rekeszhez.

3) Minden rekesz sorszáma a "szünet" pozícióban van feltüntetve.

4) Nyomja meg a Beállítás gombot (fel vagy le), hogy beállítsa a kiválasztott "Nyomást".

5) Ha villog a kiválasztandó betű, akkor a nyomási érték sikeresen ki lett választva.

6) Lépjen másik funkcióra a Menü gomb használatával a nyomási érték beállítása után.

*** Az egyes üzemmódok maximális nyomási értéke:

1) 0-200 mmHg: A1, A2, B1, E1, E2

2) 0-130 mmHg: C1, C2, C3, D1, D2

Újraindítás

1) Nyomja meg és tartsa a Visszaállítás gombot (Léptetés-Le gomb) folyamatosan lenyomva 5 másodpercig.

2) Az "A1" üzemmód jelenik meg az LCD kijelzőn.

3) A rendszer helyreállt.






Mentés

1) A mentési funkció használata előtt állítsa be az adott működési értékeket.


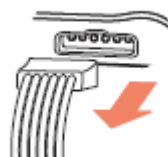

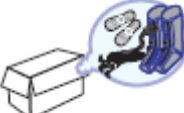
2) A kurzor villogásának leállása után használható a mentési funkció.

- Ha 10 másodpercig vár, a kurzorvillogás leáll.
- Ha megnyomja a Menü gombot 3 másodpercre, a kurzorvillogás leáll.
- Nyomja meg az Indítás gombot normál üzemmódhoz, utána pedig a Leállítás gombot, és a mentési funkció elérhetővé válik.

8. Általános információk






<p>1. Helyezze a tápcsatlakozót a konnektorba. - Ellenőrizze a megfelelő feszültség használatát a készülék használatához.</p>	
<p>2. Kapcsolja be a készüléket. - Nyomja meg a "Bekapcsolás" gombot.</p>	
<p>3. Ha már használ egy beállított értéket, nyomja meg az "Indítás" gombot. - Ha meg akarja változtatni a beállított értéket, a Menü, Léptetés, Beállítás gombokkal állíthatja az értéket. - Miután beállította a funkciót, nyomja meg az "Indítás" gombot. - Ha el szeretné menteni a beállított értéket, nyomja meg a Mentés gombot 5 másodperccel a kurzor villogásának leállása után. - Ha megnyomja a Menü gombot 3 másodpercre, a kurzorvillogás leáll.</p>	
<p>4. Az Üzem mód szabályozása. - Az A1 üzemmód a gyári alapbeállítás.</p>	
<p>5. Vészkapcsoló - A működés közbeni károkozás vagy vészhelyzet elkerülése érdekében a készüléken elérhető egy vészkapcsoló. - Ha kellemetlen probléma merül fel a működés közben, egyszerűen nyomja meg a kapcsolót és a készülék működése leáll.</p>	
<p>6. Nyomja meg az "Indítás/Leállítás" gombot. Ha az üzemi idő befejeződik, a készülék automatikusan leáll.</p>	

9. Használat után

<p>A működés leállása után, 1) nyomja meg a kikapcsológombot 2) húzza ki a tápcsatlakozót a konnektorból.</p>	
<p>Húzza ki a tápcsatlakozót a fő készüléktestből. (Figyelem) Amikor kihúzza a tápcsatlakozót, a csatlakozót fogja meg, ne a kábelt.</p>	
<p>Válassa le a tömlő csatlakozóját a mandzsettákról (párnákról).</p>	
<p>A készülék használata befejeztével tárolja a készüléket és a tartozékokat a dobozában.</p>	

10. Felügyelet és karbantartás

A mandzsetták nem javítható fogyasztási cikkek. Legyen mindig óvatos.

<p>Ne tegye a mandzsettát éles tárgyak közelébe, mint pl. kazán, tű, olló, stb.</p>	
<p>Tartsa száraz helyen, vizet és nedvességet kerülje.</p>	
<p>Ne mossa mosógépben a mandzsettákat és ne merítse őket víz alá. A mandzsettákat óvatosan letörölheti egy megnedvesített törülközővel vagy törlőronggyal. Ha szükséges, enyhe hatású mosószer használható.</p>	
<p>Télen ne tárolja az eszközöket túl alacsony hőmérsékleten. Megkeményedhetnek vagy megsérülhetnek.</p>	
<p>Ha a készüléket hosszabb ideig szeretné tárolni, a dobozában tartson minden eszközt.</p>	

Környezeti adatok üzemeltetéshez és fenntartáshoz:


















Üzemi hőmérséklet: 10-40 C, relatív páratartalom: 30-85%

Légnyomás: 700-1060 hPa

11. Hibaelhárítás

Probléma részletei	Mit ellenőrizzen
Ha nem működik a készülék	<ul style="list-style-type: none">- Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a hálózatba.- Kapcsolja be a bekapcsológombbal.- Ellenőrizze a tápkábelt (nézze meg a feszültséget).- Ellenőrizze, hogy az időzítés be van-e kapcsolva.
Ha levegőszivárgásra hasonlító hangot ad ki a készülék	<ul style="list-style-type: none">- Ellenőrizze a tömlő és a csatlakozója épségét.- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó a géphez van-e csatlakoztatva.- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó tömlő megnyomódott-e vagy meghajlott-e.
Ha a levegő nem kerül adagolásra a mandzsettákba vagy derékpárnába, vagy ha nem jön létre a nyomás	<ul style="list-style-type: none">- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó a géphez van-e csatlakoztatva.- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó tömlőn nincsen-e nehéz tárgy vagy megnyomódott-e.- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó tömlő helyesen van-e csatlakoztatva a párna vájatába ritmikus hang kiadásával.
Ha továbbra is huzat kerül a mandzsettákba, vagy hallja a huzat áramlását	<ul style="list-style-type: none">- Ellenőrizze, hogy hol található a légszivárgás a mandzsettákban. Ha nem talál szivárgást, kapcsolja ki a készüléket, aztán kapcsolja be megint és ellenőrizze, hogy működik-e. <p>(A mandzsetták és mindegyik párna fogyasztási cikknek számít.)</p>

12. Címke

 0476	Végtagkompressziós terápiás rendszer		
	MODELLNÉV	POWER Q-8120	
NÉVLEGES TÁPFESZÜLTÉS	AC 230V~	TÁPFREK- VENCIA	50~60Hz
ÁRAMFELHASZ- NÁLÁS	120VA	MAXIMÁLIS NYOMÁS	200mmHg ± 20%
 			
          			
	Wonjin Mulsan Co., Ltd. Tel : 82-32-816-0552 Fax : 82-32-816-0557 89, Geomdan-ro, Seo-gu, Incheon, Korea		 WONJIN MULSAN CO., LTD. MADE IN KOREA
	I.A.C.E.R srl Via Sandro pertini 24/A 30030 Martellago(VE), Italy		

Garancia

Terméknév: Végtagkompressziós terápiás rendszer

Adott modell: Power-Q8120

Vásárlási dátum:

Sorozatszám:

Eladó:

Garancia időtartama: Készüléktest: 1 év. Mandzsetták (fogyasztási cikkek): 3 hónap (munkahelyen).

A szolgáltatásunkról

Ezt a terméket a Wonjin Mulsan Co. Kft szigorú minőségellenőrzési folyamatok alkalmazásával gyártotta a Koreai Élelmiszer- és Gyógyszerhivatal engedélye és jóváhagyása, valamint az Elektromos Cikkek Biztonsági Hitelesítési Rendszer által ellenőrizve.

A Wonjin Mulsan Co. Kft biztosítja az alkatrészek listáját és a karbantartási kézikönyvet a termékek számára, illetve további információkat a rendszer karbantartásához és javításához.

EMC (elektromágneses kompatibilitás):

A termékek megfelelnek az EMC standard követelményeinek. Kérjük különös óvatossággal kövesse az alábbi útmutatásokat az EMC irányelvei érdekében.

- Ha a felhasználó nem követi a gyártó utasításait, az befolyásolhatja a készülék teljesítményét, tartósságát vagy az elektromágneses kibocsátást.
- Mobiltelefon és más kommunikációs eszközök befolyásolhatják az orvosi készülék megfelelő működését. A felhasználó ellenőrizze az orvosi készülék működését, mielőtt ilyen eszközöket használ.
- Vegye fel a kapcsolatot a Wonjin Mulsan Co. Kft műszaki dolgozóival, ha szeretne többet megtudni az EMC-ről.

Fizetős szolgáltatások

Figyeljen oda arra, hogy a szolgáltatási díjat felszámoljuk a garancia időtartama alatt, ha a vásárló saját hanyagsága okán szorul a szolgáltatásra vagy ha a készülék hibamentesnek találtatott.

A vásárló hibájából előforduló hibák (ha a hiba a vásárló hanyagsága vagy hibás javítási kísérlete miatt keletkezik):

- Ha a hibát az elektromos kapacitásnak nem megfelelő használat okozza.
- Ha a hibát a készülék leejtése okozza szállítás közben a telepítés után.
- Ha a hibát a készülék és opcionális tartozékainak nem rendeltetésszerű használata okozza.
- Ha a hiba más cég által megkísérelt javítás miatt keletkezik.
- Ha a hiba a termék tiltott területen való (kültéri) használata során keletkezik, vagy a termék eredeti felhasználási körén túli használata során keletkezik, vagy mert a vásárló szétszerelte, módosította vagy megjavította saját belátása szerint.
- Ha a vásárló nem követte a kézikönyv figyelemfelhívó részeit. (Olvassa el a figyelemfelhívó részeket körültekintően.)

Egyéb esetek

- Természeti katasztrófák esetében (tűz, tengeri szél, árvíz, vihar, villámlás, földrengés stb. által okozott kár)
- Ha a fogyasztási cikkek elhasználódtak vagy a garanciális időtartam már eltelt.
- A gyártó által biztosított, hitelesített alkatrészeket és utánpótlást használja, különben problémát vagy balesetet okozhatnak.

Kiadás dátuma: 2015. február 6., Rev. 7.



Wonjin Mulsan Co., Ltd.

<http://www.wonjininc.net>

2F, 89, Geomdan-ro, Seo-gu, Incheon, Korea

A/S : 82-32-816-0552